

Die Verwendung dieses Produkts ist durch Patente geschützt, die sich im Besitz von Illumina, Inc. befinden und für Illumina, Inc. lizenziert wurden. Mit der Zahlung für dieses Produkt wird das begrenzte, nicht übertragbare Recht erworben, dieses Produkt wie vorgesehen und im Einklang mit seiner Dokumentation und allen anderen zugehörigen Geschäftsbedingungen zu verwenden. Eine repräsentative, nicht vollständige Liste solcher Patente ist unter www.illumina.com/patents zu finden. Kein Recht wird im Rahmen eines anderen Patents oder für eine anderweitige Nutzung weder ausdrücklich noch implizit bzw. durch Rechtsverwirkung abgetreten.

Dieses Dokument und dessen Inhalt sind Eigentum von Illumina, Inc. sowie deren Partner-/Tochterunternehmen („Illumina“) und ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch durch den Kunden in Verbindung mit der Verwendung des hier beschriebenen Produkts/der hier beschriebenen Produkte und für keinen anderen Bestimmungszweck ausgelegt. Dieses Handbuch und dessen Inhalt dürfen ohne schriftliches Einverständnis von Illumina nicht verwendet und zu keinem anderen Zweck verteilt bzw. anderweitig übermittelt, offengelegt oder auf irgendeine Weise reproduziert werden. Illumina überträgt mit diesem Dokument keine Lizenzen unter seinem Patent, Markenzeichen, Urheberrecht oder bürgerlichem Recht bzw. ähnlichen Rechten an Drittparteien.

Die Anweisungen in diesem Dokument müssen von qualifiziertem und entsprechend ausgebildetem Personal genau befolgt werden, damit die in diesem Dokument beschriebene Verwendung des Produkts/der Produkte sicher und ordnungsgemäß erfolgt. Vor der Verwendung des Produkts/der Produkte muss der Inhalt dieses Dokuments vollständig gelesen und verstanden worden sein.

FALLS NICHT ALLE HIERIN AUFGEFÜHRTEN ANWEISUNGEN VOLLSTÄNDIG GELESEN UND BEFOLGT WERDEN, KÖNNEN PRODUKTSCHÄDEN, VERLETZUNGEN DER BENUTZER UND ANDERER PERSONEN SOWIE ANDERWEITIGER SACHSCHADEN EINTRETEN UND JEGLICHE FÜR DAS PRODUKT/DIE PRODUKTE GELTENDE GEWÄHRLEISTUNG ERLISCHT.

ILLUMINA ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE AUS DER UNSACHGEMÄSSEN VERWENDUNG DER HIERIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE (EINSCHLIESSLICH TEILEN HIERVON ODER DER SOFTWARE) ENTSTEHEN.

© 2019 Illumina, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Marken sind Eigentum von Illumina, Inc. bzw. der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen zu Marken finden Sie unter www.illumina.com/company/legal.html.

Versionsverlauf

Dokument	Datum	Beschreibung der Änderung
Dokument-Nr. 1000000001949 v03	Dezember 2019	<p>Nummer und Adresse der benannten Stelle auf der Rückseite aktualisiert.</p> <p>Angaben zu nicht ausgeschlossenen Bereichen sowie Angaben und Metriken zu NCD in den Abschnitten zur Qualitätssicherung der Analyse aktualisiert.</p> <p>Fehler in der Abschnittsüberschrift „VeriSeq Onsite Server“ sowie im entsprechenden Produktnamen korrigiert. Im Abschnitt „Lokale Datenbank“ angegebene Servergröße korrigiert.</p>
Dokument-Nr. 1000000001949 v02	April 2018	<p>Im Kapitel „VeriSeq NIPT Workflow Manager“ wurden folgende Aktualisierungen vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Abschnitt „VeriSeq NIPT Batch Manager“ wurde die Zeile „Probenattribute bearbeiten“ zur Tabelle hinzugefügt. • In die Probenblatteingabetabelle wurden die Informationen „batch_name“ und „sample_barcode“ aufgenommen. • Die Aufgabe „Bearbeiten von Probenattributen“ wurde hinzugefügt. • Die Schritte der Aufgaben „Ungültigmachen von Proben“, „Ungültigmachen von Batches“ und „Ungültigmachen von Pools“ wurden überarbeitet. • Der Abschnitt „Hochladen von Probenblättern“ wurde hinzugefügt. • In den Abschnitt „Assay Configuration (Assay-Konfiguration)“ wurden die Werte für „Default Sex Chromosome Reporting“ (Standard-Geschlechtschromosomen-Berichterstellung) beschrieben. <p>Im Kapitel „VeriSeq NIPT Assay Software“ wurden folgende Abschnitte überarbeitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Abschnitt „Qualitätssicherung von negativen Kontrollproben (NTC)“ wurden die Informationen zu den NTC-Proben pro Lauf geändert. • In die Abschnitte „Lokale Festplatte“ und „Zuordnen von Serverlaufwerken“ wurde ein Hinweis zum SMP-Protokoll (Server Message Box) aufgenommen. <p>Auf der Rückseite wurden Informationen zu Australien hinzugefügt.</p>
Dokument-Nr. 1000000001949 v00	Februar 2017	Erste Version

Inhaltsverzeichnis

Versionsverlauf	iii
Kapitel 1 VeriSeq NIPT Solution	1
Einleitung	1
Systemarchitektur	3
Kapitel 2 VeriSeq NIPT Workflow Manager	4
Einleitung	4
VeriSeq NIPT Method	4
VeriSeq NIPT Batch Manager	4
VeriSeq NIPT Services	10
Kapitel 3 Sequenzierer der nächsten Generation	13
Einleitung	13
Sequenzierungs-Pool	13
Integration der Datenspeicherung	13
Durchsatzkapazität für die Analyse	14
Durch den Netzwerkverkehr bedingte Einschränkungen	14
Kapitel 4 VeriSeq NIPT Assay Software	15
Einleitung	15
Assay Software	15
Web-Benutzeroberfläche	19
Analyse und Berichterstellung	28
VeriSeq Onsite Server	31
Anhang A Metriken der Qualitätssicherung	35
Metriken und Grenzwerte für die Quantifizierungsqualitätssicherung	35
Metriken und Grenzwerte für die Sequenzierungsqualitätssicherung	36
Metriken und Grenzwerte für die analytische Qualitätssicherung	37
Qualitätssicherung von negativen Kontrollproben (NTC)	38
Anhang B Systemberichte	39
Einleitung	39
Übersicht über die Systemberichte	40
Ereignisse für das Erstellen von Berichten	41
Berichte zu Ergebnissen und Benachrichtigungen	43
Prozessberichte	49
Anhang C Fehlerbehebung	56
Einleitung	56
Benachrichtigungen der Assay Software	56

Systemprobleme	65
Datenverarbeitungstests	66
Anhang D Weitere Ressourcen	68
Anhang E Akronyme	69
Technische Unterstützung	70

VeriSeq NIPT Solution

Einleitung	1
Systemarchitektur	3


Einleitung

VeriSeq NIPT Solution ist ein *In-vitro*-Diagnostest und als sequenzierungsbasierter Screening-Test für den Nachweis fetaler Aneuploidien aus mütterlichen peripheren Vollblutproben von Schwangeren, die sich mindestens in der 10. Schwangerschaftswoche befinden, bestimmt. VeriSeq NIPT bietet Informationen zum Aneuploidie-Status der Chromosomen 21, 18, 13, X und Y. Dieses Produkt darf nicht als alleinige Grundlage für eine Diagnose oder andere, die Schwangerschaft betreffende Entscheidungen verwendet werden.

Die Systemarchitektur von VeriSeq NIPT Solution umfasst Folgendes:

- ▶ **VeriSeq NIPT Microlab STAR (ML STAR):** Ein Gerät für das automatisierte Liquid-Handling. Es verwendet den VeriSeq NIPT Workflow Manager und die VeriSeq NIPT Sample Prep Kits, um Bibliotheksproben vorzubereiten und nachzuverfolgen. Das ML STAR bereitet für die Analyse mit der VeriSeq NIPT Assay Software bestimmte Proben gemäß den Gebrauchsanweisungen in *der Packungsbeilage zu VeriSeq NIPT Solution (Dokument-Nr. 1000000001856)* vor.
- ▶ **Sequenzierer der nächsten Generation (NGS):** Ein Gerät für die Genomsequenzierung. Es führt die Clusterbildung im Gerät und die Sequenzierung durch. Die Steuerungssoftware des Sequenzierers steuert die Schritte für die Konfiguration eines Sequenzierungslaufs und erzeugt Sequenzierungs-Reads für alle Proben in dem quantifizierten Bibliotheken-Pool. Die Sequenzierungsdaten werden vom Analyse-Handler der Assay Software ausgewertet.
- ▶ **VeriSeq Onsite Server:** Ein Standalone-Server, der mithilfe der Assay Software Paired-End-Sequenzierungsdaten analysiert. Die Assay Software bietet verschiedene Statistiken, darunter Log-Likelihood-Quotienten für die Beurteilung einer Über- oder Unterrepräsentanz von Chromosomen in jeder Probe.


Abbildung 1 Komponenten von VeriSeq NIPT Solution

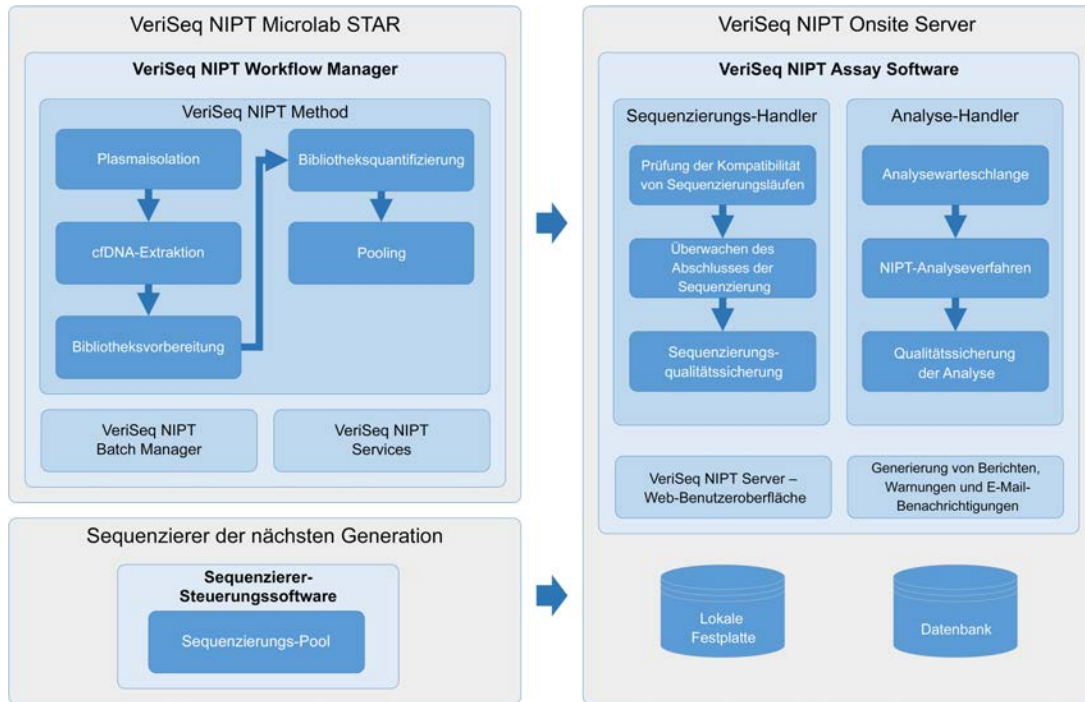

Systemarchitektur

VeriSeq NIPT Solution verwendet das LAN (Local Area Network) des Labors, um alle Geräte des Systems über dasselbe Subnetz miteinander zu verbinden. Die Nutzung des LAN ermöglicht es, die Geräte flexibel zu platzieren und den Datendurchsatz durch den Anschluss zusätzlicher Sequenzierer und/oder ML STAR-Workstations zu erhöhen. [Abbildung 2](#) bietet eine Übersicht.

Abbildung 2 VeriSeq NIPT Solution – Übersicht

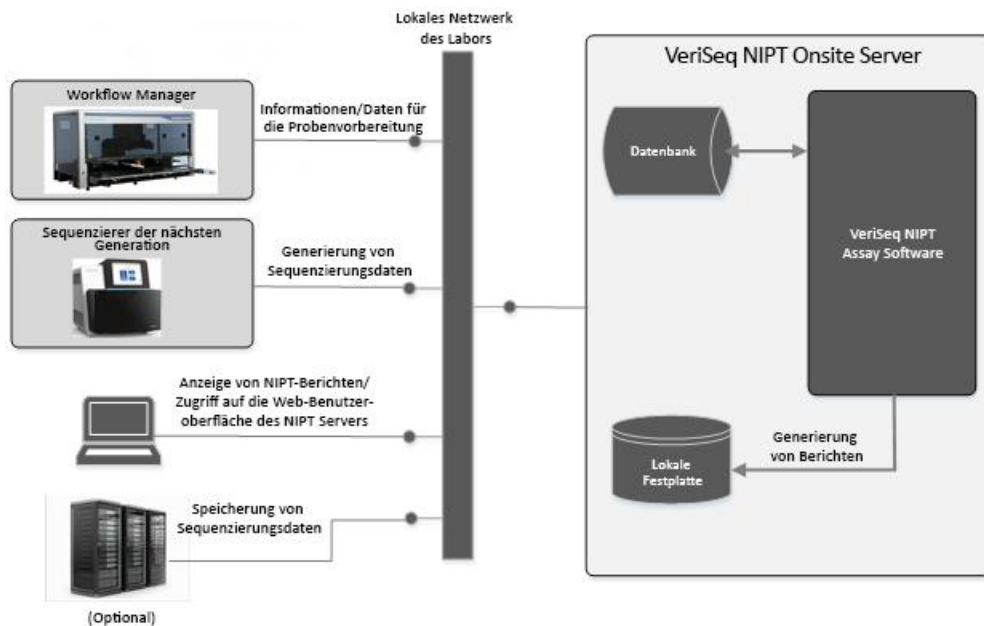

VeriSeq NIPT Workflow Manager

Einleitung	4
VeriSeq NIPT Method	4
VeriSeq NIPT Batch Manager	4
VeriSeq NIPT Services	10

Einleitung

Der VeriSeq NIPT Workflow Manager (Workflow Manager) ist auf dem ML STAR-Gerät installiert. Er bietet eine einfache und intuitive grafische Benutzeroberfläche und automatisiert die Vorbereitung von Blutproben gemäß der VeriSeq NIPT Solution. Der Workflow Manager hält eine Datenverbindung zum Onsite Server für die Datenverarbeitung und -speicherung sowie die Probenverfolgung und die Umsetzung der Workflow-Logik aufrecht.

Der Workflow Manager bietet Zugang zu drei Methoden:

- ▶ VeriSeq NIPT Method
- ▶ VeriSeq NIPT Batch Manager
- ▶ VeriSeq NIPT Services

VeriSeq NIPT Method

VeriSeq NIPT Method (Method) steuert die automatische Verarbeitung von Proben auf dem ML STAR-Gerät. Es werden die folgenden Verarbeitungsschritte durchgeführt:

- ▶ **Plasmaisolation:** Übertragung von 1 ml isoliertem Plasma aus einem Blutentnahmeröhrchen. Die Prozesslogik erstellt einen Batch mit der Assay Software. Jeder Batch enthält Probanden, z. B. den Barcode der Probe, den Probenotyp, die Well-Position und das Geschlechtsberichts-Flag.
- ▶ **cfDNA-Extraktion:** Reinigt cfDNA aus 900 µl Plasma.
- ▶ **Bibliotheks Vorbereitung:** Erzeugt Bibliotheken aus gereinigter cfDNA, die für die Sequenzierung bereit sind. Die Bibliotheken weisen einen eindeutigen Index für jede Probe im Batch auf.
- ▶ **Bibliotheksquantifizierung:** Ermittelt die cfDNA-Konzentration mit einem interkalierenden Fluoreszenzfarbstoff in einem 384-Well-Mikroplattenformat. Die Platte enthält eine beschriftete DNA-Standardkurve und Duplikate von jeder Probe im Batch. Ein R-Skript berechnet anhand der Rohfluoreszenzdaten des Mikroplatten-Readers die Probenkonzentrationen basierend auf der Standardkurve.
- ▶ **Pooling und Normalisierung:** Kombiniert Bibliotheken in einzelnen Pools für die Sequenzierung. Ein zweites R-Skript berechnet anhand der zuvor ermittelten Konzentrationen die entsprechenden Übertragungsvolumina für jede Probe im sequenzierergereinigten Pool.

VeriSeq NIPT Batch Manager

Der VeriSeq NIPT Batch Manager (Batch Manager) verwaltet den Status der Proben, Batches und Pools. Dies erfolgt über dieselbe Benutzeroberfläche, über die die automatisierten Verfahren ausgeführt werden. Das System ermöglicht die Probenverfolgung mit dem Analyseverfahren über mehrere Liquid-Handling-Systeme und Sequenzierer hinweg. Weitere Informationen zu den Probenverarbeitungsverfahren finden Sie in der *Packungsbeilage zu VeriSeq NIPT Solution (Dokument-Nr. 1000000001856)*.

Die Proben werden im Workflow durch die folgenden Objekte verwaltet:

Objekt	Beschreibung
Probe	Ergebnis einer einmaligen Entnahme von 1 ml Plasma aus einem einzelnen Blutröhrchen. Die Proben sind dem Barcode des Blutröhrchens (dem Barcode der Probe) und dem Batch zugeordnet.
Batch	Platte mit 48 oder 96 Proben, die durch cfDNA-Extraktion und mit dem Bibliotheksvorbereitungsverfahren verarbeitet wird.
Pool	Normalisiertes und verdünntes Volumen von sequenzierereigneten, doppelt indizierten Bibliotheken. Jeder Pool enthält bis zu 48 Proben.

Bei der Verarbeitung können folgende Aktionen für die Objekte durchgeführt werden:

Maßnahme	Objekt	Generierter Bericht	Beschreibung
Ungültigmachung	Probe	Sample Invalidation (Ungültigmachen von Proben)	Der Benutzer hat die Probe als ungültig für die Verarbeitung markiert. Für ungültig gemachte Proben wird kein Testergebnis generiert. Beispiel: Bei der Plasmaisolation stellen Sie eine Blutzellen-Verschleppung fest.
	Batch	Batch Invalidation (Ungültigmachen von Batches)	Der Benutzer hat den Batch als ungültig markiert. Wenn das Ungültigmachen des Batches vor der Poolgenerierung erfolgt, werden alle Proben ungültig gemacht. Beispiel: Die Platte wurde fallen gelassen oder anderweitig unsachgemäß gehandhabt.
	Pool	Pool Invalidation (Ungültigmachen von Pools)	Der Benutzer hat den Pool als ungültig markiert. Nach zwei Pool-Ungültigmachungen werden alle Proben im Pool ungültig gemacht. Beispiel: Das gesamte Pool-Volumen wurde bei zwei fehlerhaften Sequenzierungen verbraucht.
Nichtbestehen der Qualitätssicherung	Probe	Sample Invalidation (Ungültigmachen von Proben)	VeriSeq NIPT Solution hat aufgrund des Nichterreichens einer angegebenen Qualitätssicherungsmetrik oder eines vom System festgestellten Fehlers beim Liquid-Handling die Probe als ungültig markiert.
	Batch	Batch Invalidation (Ungültigmachen von Batches)	VeriSeq NIPT Solution hat den gesamten Batch automatisch als ungültig markiert. Beispiel: Systemfehler beim Liquid-Handling.
Abbruch	Probe	Sample Cancellation (Abbrechen von Proben)	Die Laborleitung hat die Probe als abgebrochen markiert. Es wird kein Testergebnis generiert.
Bearbeiten von Probenattributen	Probe	Sample Sex Reporting (Geschlechtsbericht der Probe)	Der Benutzer hat für den Geschlechtsbericht „Yes“ (Ja), „No“ (Nein) oder „SCA“ ausgewählt. Wenn für den Geschlechtsbericht der Probe „Yes“ (Ja) ausgewählt wurde, wird das Geschlecht der Probe angegeben. Wenn für den Geschlechtsbericht der Probe „No“ (Nein) ausgewählt wurde, wird das Geschlecht der Probe nicht angegeben. Wenn für den Geschlechtsbericht der Probe „SCA“ ausgewählt wurde, werden nur Aneuploidien der Geschlechtschromosomen im Bericht angegeben.
	Probe	Sample Sex Type (Geschlechtstyp der Probe)	Der Benutzer hat den Geschlechtstyp als „Singleton“ (Einling), „Twin“ (Zwilling), „NTC“ (Negativkontrolle) oder „Control“ (Kontrolle) markiert. Die Geschlechtstypbezeichnung der Probe wirkt sich unmittelbar auf die Analyse des Tests aus. Um genaue Testergebnisse zu gewährleisten, ist die korrekte Angabe des Geschlechtstyps der Probe erforderlich.

Nach dem Ungültigmachen, Nichtbestehen der Qualitätssicherung oder dem Abbrechen wird das betreffende Objekt nicht weiterverarbeitet. Labor-Informations-Management-Systeme (LIS/LIMS) können Berichte zum Ungültigmachen von Proben verwenden, um die erneute Probenverarbeitung aus dem Blutentnahmeröhrchen anzugeben.

Probenblatteingabe

Das Eingabe-Probenblatt enthält patientenbezogene Probandaten, z. B. den Probentyp und den Status der Geschlechtschromosomenberichterstellung. Das System benötigt zur Generierung von Sequenzierungspools vollständige Probandaten.

Das Eingabe-Probenblatt muss eine tabulatorgetrennte Textdatei (*.txt) sein. Die Spaltenüberschriften in der Datei müssen exakt den in der folgenden Tabelle aufgeführten Spaltenüberschriften entsprechen.

Spaltenüberschrift	Datentyp	Anforderung	Beschreibung
batch_name	Zeichenfolge/Leer	Erforderlich	Gibt den Batchnamen der Probe an. Der Name muss dem Batchnamen entsprechen, der in die Calling-Methode (Workflow Manager) eingegeben wurde, um sicherzustellen, dass das Eingabe-Probenblatt dem korrekten Batch zugeordnet wird. Die maximal zulässige Länge beträgt 26 Zeichen. Die Spalte kann leer bleiben. HINWEIS: Probenblätter ohne die Spalte „batch_name“ werden nicht akzeptiert.
sample_barcode	Zeichenfolge	Erforderlich	Barcodes der in das ML STAR-Gerät geladenen Blutprobenröhrchen. Proben-Barcodes aus Ganzzahlen dürfen aus maximal 15 Ziffern bestehen. Alphanumerische Proben-Barcodes dürfen maximal 32 Zeichen lang sein. Es sind nur Zahlen, Buchstaben, Bindestriche (-) und Unterstriche (_) zulässig.
sample_type	Zeichenfolge	Erforderlich	Gibt den Probentyp für die Analyse an. Zulässige Werte sind „Singleton“ (Einling), „Twin“ (Zwilling), „Control“ (Kontrolle) und „NTC“ (Negativkontrolle).
sex_chromosomes	Zeichenfolge	Erforderlich	Gibt an, ob eine Berichterstellung zu den fetalen Geschlechtschromosomen erfolgen soll. Zulässige Werte sind „yes“ (ja, Bericht), „no“ (nein, kein Bericht) und „sca“ (nur Bericht zu Aneuploidien der Geschlechtschromosomen).

Das Eingabe-Probenblatt wird während der Plasmatisolation oder des Poolings hochgeladen. Zum Hochladen kann der Batch Manager verwendet werden. Die Probandaten werden beim Hochladen der Proben geprüft. Bei den während der Plasmatisolation hochgeladenen Proben kann es sich um eine vollständige Probenliste oder eine Teilmenge von Proben handeln. Beim Pooling fordert das System fehlende Probandaten an, die während der Plasmatisolation nicht hochgeladen wurden.

Der Benutzer hat die Kontrolle über das Laden der Proben entweder für alle Proben im Batch (Batches, die vom LIMS des Kunden erstellt wurden) oder für erneute Tests (die verbleibenden offenen Positionen werden mit verfügbaren Proben befüllt).

Wählen Sie eine der drei Nutzungsmöglichkeiten für Probenblätter:

- ▶ Vordefinierte Batches (vom LIMS erstellte Batches)
- ▶ Ad-hoc-Batcherstellung (Workflow Manager erstellt Batches)
- ▶ Hybride Batcherstellung (Proben werden nach LIMS-Priorität aufgefüllt)

Vordefinierte Batches (vom LIMS erstellte Batches)

Batches können vor Beginn der Probenverarbeitung vom LIMS des Kunden erstellt werden.

Bei vordefinierten Batches sind alle Proben bereits einem Batch zugeordnet, bevor sie in das ML STAR-Gerät geladen werden. Das während der Plasmaisolation hochgeladene Probenblatt enthält alle Proben des Batches und sämtliche Probanddaten. Probenblätter für vom LIMS erstellte Batches müssen die Batch-ID-Spalte enthalten, um sicherzustellen, dass zu Beginn der Verarbeitung die korrekte Batch-ID manuell in den Workflow Manager eingegeben wurde.

Dieser Ansatz hat den Vorteil einer genauen Kontrolle über die zu ladenden Proben, da das System erfordert, dass alle im Probenblatt aufgeführten Proben im Batch enthalten sind. Es werden keine weiteren Informationen benötigt und das Labor kann ohne die Eingabe zusätzlicher Daten bis zum endgültigen Bericht fortfahren.

- ▶ **Vorteile:** Bietet die vollständige Kontrolle über den Batchinhalt. Verhindert das Laden unerwünschter Proben.
- ▶ **Nachteile:** Es wird ein System für das Erstellen von Batches aus dem Bestand (modernes LIMS) benötigt. Erfordert ggf. Laborpersonal, das die korrekten Proben aus dem Lagerungsbereich abrufen, oder ein modernes Probenlagerungssystem.

Ad-hoc-Batcherstellung – Erstellte Batches

Batches können im Labor erstellt werden, d. h., die Probenröhrchen werden gesammelt und bei der Plasmaisolation auf das ML STAR-Gerät geladen. Eine vorherige Proben-zu-Batch-Zuordnung ist nicht erforderlich und der Labormitarbeiter legt fest, welche Proben zum Batch hinzugefügt werden.

Wenn der Benutzer dazu aufgefordert wird, wählt er während der Plasmaisolation **No Sample Sheet** (Kein Probenblatt) aus. Der Workflow Manager ordnet die geladenen Proben der manuell eingegebenen Batch-ID zu und erstellt einen Bericht zur Batchinitialisierung. Der Bericht kann an das LIMS-System des Labors gesendet werden, um anzugeben, dass der Batch erstellt wurde, und um die Liste der zugeordneten Proben bereitzustellen.

- ▶ **Vorteile:** Ein LIMS oder ein Probenblatt wird nicht benötigt. Die Benutzer können den Bericht zur Batchinitialisierung mit Informationen zum Probentyp und Geschlechtsbericht für das Hochladen während des Poolings ändern. Flexibel, Proben können jederzeit hinzugefügt werden.
- ▶ **Nachteile:** Keine automatisierte Kontrolle über die Proben, die in den Batch aufgenommen werden. Der Benutzer kann unerwünschte Proben laden. Die Probanddaten müssen beim Pooling hochgeladen werden.

Hybride Batcherstellung – Proben nach LIMS-Priorität

Das LIMS-System des Kunden kann einen Batch mit einer Teilmenge der vordefinierten Proben erstellen. Die restlichen Proben des Batches werden vom Workflow Manager aus den geladenen Proben befüllt. Der Benutzer lädt in diesem Fall ein unvollständiges Probenblatt während der Plasmaisolation hoch. Auch hier wird Laboren empfohlen, die Batch-ID-Spalte auszufüllen, wenn die Batchnamen zuvor festgelegt werden sollen. Manchmal lädt der Benutzer ggf. ein leeres Probenblatt hoch, das nur den Batchnamen enthält, um den manuell eingegebenen Batchnamen zu überprüfen. Diese Methode eignet sich gut für die Priorisierung hochwertiger Proben, z. B. erneute Tests, um sicherzustellen, dass diese hochwertigen Proben im Lauf enthalten sind. Welche Proben in den Batch aufgenommen werden, wird teils vom LIMS und teils vom Labormitarbeiter festgelegt.

- ▶ **Vorteile:** Bietet die Flexibilität der Ad-hoc-Batcherstellung und ermöglicht gleichzeitig die Vorgabe des Batchnamens und einiger Proben im Batch (z. B. erneute Tests).

- ▶ **Nachteile:** Nicht alle Proben werden vorgegeben, sodass immer noch das Risiko besteht, dass eine unerwünschte Probe geladen wird. Bei dieser Methode müssen Sie beim Pooling noch Informationen zu einigen Proben angeben.

Bearbeiten von Probenattributen

Mit dem VeriSeq NIPT Batch Manager können Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem Starten eines Sequenzierungslaufs die Attribute für die Geschlechtschromosomen-Berichterstellung und den Probentyp für einzelne Proben ändern.

- 1 Starten Sie den Batch Manager.
- 2 Geben Sie die Batch-ID und den Benutzernamen oder die Initialen des Bedieners ein und klicken Sie auf **OK**.
- 3 Klicken Sie im Batch-Platten-Diagramm auf die Well-Position der gewünschten Probe.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass die korrekte Probe angezeigt wird, und wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Sample Type“ (Probentyp) das gewünschte Probentypattribut aus.
- 5 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Sex Reporting“ (Geschlechtsbericht) das gewünschte Attribut aus.
- 6 Klicken Sie auf **Edit** (Bearbeiten).

Ungültigmachen von Proben, Pools und Batches

Je nach Probenverarbeitungsschritt kann der Benutzer eine einzelne Probe, einen Batch oder einen Proben-Pool ungültig machen. Nach dem Ungültigmachen wird die Verarbeitung der betreffenden Probe bzw. des Batches oder Pools abgebrochen.

Verwenden Sie zu jedem Zeitpunkt vor dem Erstellen eines Testberichts VeriSeq NIPT Method oder den Batch Manager, um eine oder mehrere Proben ungültig zu machen.

Ungültigmachen von Proben mit VeriSeq NIPT Method

- 1 Wählen Sie während der Probenverarbeitung die ungültig zu machenden Wells im Fenster „Well Comments“ (Well-Anmerkungen) am Ende jedes Workflow Manager-Prozesses aus und klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie mindestens eine Annotation aus den Dropdown-Menüs aus oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Other** (Andere) und geben Sie eine Anmerkung ein.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Fail Sample** (Probe ungültig machen) und klicken Sie auf **OK**.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass das System die Probe ungültig macht.

Ungültigmachen von Proben mit dem Batch Manager

Mit dem Batch Manager können Sie Folgendes ungültig machen:

- ▶ eine Probe.
- ▶ eine Probe, bevor der Pool-Schritt abgeschlossen ist.
- ▶ einen Proben-Pool nach dem Ende des Pool-Schritts und vor der Generierung eines Testberichts.



HINWEIS

Schließen Sie alle aktiven Methoden, bevor Sie den Batch Manager starten.

Zugriff auf den Batch Manager

- 1 Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf den Batch Manager zuzugreifen:
 - ▶ Klicken Sie im **App Launcher** auf **VeriSeq NIPT Batch Manager**.
 - ▶ Navigieren Sie auf einem Computer, der mit dem Netzwerk verbunden ist, zu „C:\Programme (x86)\HAMILTON-Methods\VeriSeqNIPT“. Öffnen Sie die **Methoden-Datei von Batch Manager** (VeriSeqNIPT_Batch_Manager.med) mit **Hamilton Run Controller**.

Ungültigmachen von Proben

- 1 Starten Sie den Batch Manager.
- 2 Geben Sie die Batch-ID und den Benutzernamen oder die Initialen des Bedieners ein und klicken Sie auf **OK**.
- 3 Klicken Sie im Batch-Platten-Diagramm auf die Well-Position der Probe, die ungültig gemacht werden soll.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass die korrekte Probe angezeigt wird, und klicken Sie auf **Invalidate Sample** (Probe ungültig machen).
- 5 Geben Sie den Grund für das Ungültigmachen ein und klicken Sie auf **Invalidate** (Ungültig machen). Im Batch-Platten-Diagramm wird die Farbe der ungültig gemachten Probe von Grün in Rot geändert und in der Statusanzeige ändert sich der Status von „gültig“ in „fehlgeschlagen“.

Ungültigmachen von Batches

- 1 Starten Sie den Batch Manager.
- 2 Geben Sie die Batch-ID und den Benutzernamen oder die Initialen des Bedieners ein und klicken Sie auf **OK**.
- 3 Klicken Sie im Batch-Platten-Diagramm auf **Invalidate Batch** (Batch ungültig machen).
- 4 Geben Sie den Grund für das Ungültigmachen ein und klicken Sie auf **Invalidate** (Ungültig machen). Wenn keine gültigen Pools für den Batch vorhanden sind, ändert sich auf dem Batch-Platten-Diagramm die Farbe der Proben von Grün in Rot. Gültige Pools im Batch bleiben gültig.

Ungültigmachen von Pools

- 1 Starten Sie den Batch Manager.
- 2 Geben Sie die Batch-ID und den Benutzernamen oder die Initialen des Bedieners ein und klicken Sie auf **Pool Manager** (Pool-Manager).
- 3 Scannen Sie den Barcode des Pools.
- 4 Geben Sie den Benutzernamen oder die Initialen des Bedieners ein und klicken Sie auf **OK**.
- 5 Geben Sie den Grund für das Ungültigmachen ein und klicken Sie auf **Invalidate** (Ungültig machen).

Hochladen von Probenblättern

Der Benutzer kann ein Probenblatt mit Probanddaten mit dem Batch Manager hochladen. Mit dieser Funktion kann der Benutzer beispielsweise Probeninformationen in umfangreichen Sets hochladen oder ändern.

- 1 Starten Sie den Batch Manager.
- 2 Geben Sie die Batch-ID und den Benutzernamen oder die Initialen des Bedieners ein und klicken Sie auf **OK**.
- 3 Klicken Sie auf **Upload New Sample Sheet** (Neues Probenblatt hochladen).
- 4 Navigieren Sie zum gewünschten Probenblatt und wählen Sie es aus. Klicken Sie anschließend auf **OK**.

Abbrechen von Proben

- 1 Starten Sie den Batch Manager.
- 2 Geben Sie die Batch-ID und den Benutzernamen oder die Initialen des Bedieners ein und klicken Sie auf **OK**.
- 3 Klicken Sie im Batch-Platten-Diagramm auf die Well-Position der Probe, die abgebrochen werden soll.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass die korrekte Probe angezeigt wird, und klicken Sie auf **Cancel Sample** (Probe abbrechen).
- 5 Geben Sie den Grund für das Abbrechen der Probe ein und klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen).
Im Batch-Platten-Diagramm wird die Farbe der abgebrochenen Probe von Grün in Rot geändert.

VeriSeq NIPT Services

Die VeriSeq NIPT Services (Services) umfassen mehrere Tools für die Konfiguration und Verifizierung des ML STAR-Geräts und des Workflow Managers. Diese Tools sind nicht für den normalen Betrieb des Systems erforderlich. Sie werden aber ggf. vom technischen Support von Illumina oder Hamilton für die Fehlersuche bei Systemproblemen benötigt. Die Tools werden auch zum Anpassen der Systemparameter aufgrund von Abweichungen in der Clusterdichte verwendet.

Starten von VeriSeq NIPT Services



HINWEIS

Schließen Sie alle aktiven Methoden, bevor Sie die Services ausführen.

Öffnen Sie Hamilton Run Controller und anschließend die Methoden-Datei:

- ▶ Öffnen Sie VeriSeq NIPT Services vom Hamilton AppLauncher aus.
ODER
- ▶ „C:\Programme (x86)\HAMILTON-Methods\VeriSeqNIPT\VeriSeqNIPT_Service.med“

Die Tools der Services bieten zwei Arten von Tests:

- ▶ **Einzeltests:** Komponententests für die Fehlersuche bei ML STAR-Hardwarefehlern.
- ▶ **Service-Tools:** Tools für die Konfiguration des Workflow Managers.

Einzeltests

Zur Behebung von Hardware-Problemen, die im Workflow Manager festgestellt wurden, ist ggf. die Durchführung der folgenden Systemtests erforderlich.

Systemtest	Beschreibung
Barcode/Autoload (Barcode/Autom. laden)	Prüft die ordnungsgemäße Konfiguration des Systemdecks, des AutoLoaders und der Barcodescannen-Funktion.
CPAC	Testet die Funktion der CPAC-Heizsysteme auf dem Deck. Prüft außerdem die ordnungsgemäße Verkabelung der einzelnen Einheiten zum Steuergerät.
BVS Vacuum (BVS-Vakuum)	Testet die Funktion des Basis-Vakuumsystems (BVS) auf dem Deck, um sicherzustellen, dass das Vakuum erzeugt und der Betriebsdruck erreicht werden kann.
Independent Channel (Unabhängiger Kanal)	Testet die Funktion der unabhängigen Pipettenkanäle. Führt einen Flüssigkeitsretentionstest durch, um festzustellen, ob die Pipettenkanäle tropfen und das Abgabevolumen konsistent ist.
iSwap	Testet die Funktion des iSwap-Roboterarms und prüft die groben Deck-Lernpositionen.
96-Head (96-Kopf)	Testet die Funktion des CO-RE-96-Pipettenkopfs. Führt einen Flüssigkeitsretentionstest durch, um festzustellen, ob die Pipettenkanäle tropfen und das Abgabevolumen konsistent ist.

So führen Sie die Einzeltests durch:

- 1 Wählen Sie den gewünschten Test aus.



HINWEIS

Bei der Durchführung einer vollständigen IOQ (Installations-Funktionalitätsqualifizierung) werden alle sechs Tests der Reihe nach durchgeführt.

- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und notieren Sie Beobachtungen in Bezug auf die Gerätefunktion und aufgetretene Systemfehler.
- 3 Klicken Sie nach Abschluss auf **Abort** (Abbrechen), um den Vorgang zu beenden.
- 4 Wenn Sie die während des Tests erstellten Systemprotokolle bereitstellen sollen, so finden Sie diese an folgendem Speicherort:
„C:\Programme (x86)\HAMILTON\LogFiles“.
Die Protokolldateinamen beginnen mit „VeriSeqNIPT_Services...“

Service Tools

Mit den Service Tools können Sie den Workflow Manager konfigurieren und einige Assay-Parameter festlegen.

Systemtest	Beschreibung
Server Configuration (Serverkonfiguration)	Konfiguriert und testet die Verbindung zwischen dem VeriSeq NIPT Workflow Manager und der Assay Software. Der Workflow Manager kann nur ausgeführt werden, wenn die Kommunikation zwischen diesen Systemen ordnungsgemäß funktioniert.
Assay Configuration (Assay-Konfiguration)	Wird zum Zurücksetzen der Standardbibliothekskonzentration verwendet.
Deck Teach Tool	Wird zum Exportieren und Importieren von Deck Teach-Positionen aus einer Datei verwendet.

Server Configuration (Serverkonfiguration)

Wenn sich die Netzwerkadresse des Onsite Servers ändert, leiten Sie den Workflow Manager zur neuen Adresse um.

- 1 Wählen Sie im Menü „Services Tools“ (Service-Tools) die Option **Server Configuration** (Serverkonfiguration) aus.
- 2 Ändern Sie die URL in die neue Adresse des Onsite Servers.
- 3 Klicken Sie auf **Test Connection** (Verbindung testen).
Wenn Sie diese Nachricht nicht erhalten, wenden Sie sich an den technischen Support von Illumina.
- 4 Klicken Sie im Bildschirm „System Configuration“ (Systemkonfiguration) auf **OK** und klicken Sie anschließend auf **Apply** (Anwenden), um den neuen Wert zu speichern.

Assay Configuration (Assay-Konfiguration)

Sie können für jeden Lauf die Konzentration der Sequenzierungsbibliotheken in den Sequenzierungspools während des Pooling-Prozesses im Workflow Manager anpassen (siehe *Packungsbeilage zu VeriSeq NIPT Solution (Dokument-Nr. 1000000001856)*). Mit diesem Tool können Sie außerdem den Standardwert für diese Konzentration ändern.

Dieser Parameter legt das Attribut fest, das den Proben zugewiesen wird, wenn bei der Probenvorbereitung die Schaltfläche „Use Default“ (Standard verwenden) ausgewählt wird. Mit dem Tool „Assay Configuration“ (Assay-Konfiguration) kann dieser Wert geändert werden.

- 1 Klicken Sie auf **Assay Configuration** (Assay-Konfiguration).
- 2 Geben Sie im Feld „Target Library Concentration (pg/μl)“ (Zielbibliothekskonzentration [pg/μl]) den gewünschten Wert ein.
- 3 Wählen Sie für „Default Sex Chromosome Reporting“ (Standard-Geschlechtschromosomen-Berichterstellung) den gewünschten Wert aus.
- 4 Klicken Sie auf **Apply** (Anwenden).
Wenn keine Fehler festgestellt werden, wird die Standardeinstellung für die Zielbibliothekskonzentration zurückgesetzt.

Deck Teach Tool

Zu Fehlerbehebungszwecken ist ggf. das Exportieren der gelernten Positionswerte erforderlich. Verwenden Sie das Deck Teach Tool, um eine Liste mit den Positionen und deren Werten zu erstellen.

- 1 Klicken Sie auf **Deck Teach Tool**.
- 2 Klicken Sie auf **Export** (Exportieren).
- 3 Wählen Sie einen Ausgabespeicherort für die Textdatei mit den gelernten Deckpositionen aus.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.
Das Deck Teach Tool speichert eine Textdatei mit den Werten aller gelernten Labware-Positionen für die Workflow Manager-Installation.
- 5 Klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen), um zum Bildschirm „Method Selection“ (Methodenauswahl) zurückzukehren.

Sequenzierer der nächsten Generation

Einleitung	13
Sequenzierungs-Pool	13
Integration der Datenspeicherung	13
Durchsatzkapazität für die Analyse	14
Durch den Netzwerkverkehr bedingte Einschränkungen	14

Einleitung

Ein Sequenziersystem der nächsten Generation erzeugt Sequenzierungs-Reads für alle Proben in dem quantifizierten Bibliotheken-Pool und wird über den Onsite Server in VeriSeq NIPT Solution integriert. Die Sequenzierungsdaten werden vom Analyse-Handler der Assay Software ausgewertet.

Berücksichtigen Sie bei der Integration eines Sequenziersystems der nächsten Generation mit VeriSeq NIPT Solution folgende Punkte:

- ▶ Integration der Datenspeicherung
- ▶ Durchsatzkapazität für die Analyse
- ▶ Durch den Netzwerkverkehr bedingte Einschränkungen

Sequenzierungs-Pool

Die Assay Software benötigt einen Sequenzierer der nächsten Generation, der dafür ausgelegt ist, gemäß den folgenden Spezifikationen Sequenzierungsdaten aus dem vorbereiteten Bibliotheks-Pool zu generieren:

- ▶ Produktion von 2 x 36 Paired-End-Reads
- ▶ Mit Index-Adaptern im VeriSeq NIPT Sample Prep Kit kompatibel
- ▶ Auf zwei Farbstoffen basierende Chemie
- ▶ Automatische Erzeugung von .BCL-Dateien

Integration der Datenspeicherung

Ein typischer Sequenzierungslauf für VeriSeq NIPT Solution benötigt 25–30 GB Speicherplatz für die Daten des Sequenziersystems der nächsten Generation. Die tatsächliche Datengröße kann je nach endgültiger Clusterdichte variieren. Der Onsite Server bietet mehr als 7,5 TB an Speicherplatz, also ausreichend Speicherplatz für ca. 300 Sequenzierungsläufe ($7.500 / 25 = 300$).

Ordnen Sie zu Datenspeicherungszwecken das Sequenziersystem der nächsten Generation dem Onsite Server für eine der folgenden Methoden zu:

- ▶ Verwendung des Onsite Servers als Daten-Repository. In dieser Konfiguration wird der Sequenzierer direkt dem Server zugeordnet und er speichert Daten auf dem lokalen Laufwerk.
- ▶ Verwenden Sie in Laboren mit hohem Durchsatz ein NAS-System. Konfigurieren Sie das Sequenziersystem der nächsten Generation so, dass die Sequenzierungsdaten direkt an einem bestimmten Speicherort im NAS-System gespeichert werden.
Konfigurieren Sie in diesem Fall den Onsite Server zur Überwachung des spezifischen NAS-Speicherorts, was dem Server ermöglicht, anstehende Sequenzierungsläufe zu überwachen. Mehrere Sequenziersysteme der nächsten Generation können hinzugefügt werden, um den Probendurchsatz zu erhöhen. Weitere Informationen darüber, wie Sie den Server dem NAS-System zuordnen, finden Sie unter *Verwalten eines freigegebenen Netzlaufwerks* auf Seite 25.

Weitere Informationen darüber, wie die Sequenziersysteme der nächsten Generation dem Server oder dem NAS-System zugeordnet werden, finden Sie im Benutzerhandbuch des Herstellers.

Durchsatzkapazität für die Analyse

Die Verarbeitung der Daten eines einzelnen Sequenzierungslaufs mit dem VeriSeq NIPT Analyseverfahren dauert in der Regel etwa 5 Stunden. Wenn Sie Ihr Labor für einen höheren Probendurchsatz erweitern möchten, beachten Sie, dass ein einzelner Server maximal 4 Läufe pro Tag verarbeiten kann, d. h. insgesamt $48 \text{ Proben} \times 4 = 192 \text{ Proben pro Tag}$. Wenden Sie sich an den Support von Illumina, wenn Sie Lösungen für einen höheren Durchsatz benötigen.

Durch den Netzwerkverkehr bedingte Einschränkungen

VeriSeq NIPT Solution verwendet das LAN (Local Area Network) des Labors für den Datendurchsatz zwischen dem Sequenziersystem der nächsten Generation, dem Onsite Server und dem NAS-System (sofern konfiguriert). Wenn Sie den Probendurchsatz erweitern möchten, beachten Sie die folgenden IT-Infrastrukturbeschränkungen für den Datenverkehr:

- ▶ Der durchschnittliche Datenverkehr von ca. 25 GB, der über einen Zeitraum von ca. 10 Stunden generiert wird, beträgt pro Sequenzierer etwa 0,7 MB/Sekunde.
- ▶ Die Laborinfrastruktur unterstützt möglicherweise auch andere Datenverkehrsquellen, die einkalkuliert werden müssen.

VeriSeq NIPT Assay Software

Einleitung	15
Assay Software	15
Web-Benutzeroberfläche	19
Analyse und Berichterstellung	28
VeriSeq Onsite Server	31

Einleitung

Der Onsite Server ist eine zentrale Komponente von VeriSeq NIPT Solution und der Verbindungspunkt zwischen dem Workflow Manager, dem Sequenzierer der nächsten Generation und dem Benutzer. Auf dem Onsite Server befindet sich die Assay Software, die als Hintergrunddienst kontinuierlich läuft.


Die Assay Software generiert Statistiken, um die Chromosomen-Kopienzahl der getesteten Proben zu bewerten, und bietet den Nachweis von Aneuploidien bei den Zielchromosomen 21, 18, 13, X und Y. Ein Sequenzierungsgerät der nächsten Generation erzeugt Eingangsdaten für die Analyse in Form von Paired-End-Reads mit 36 Basen. Die Assay Software richtet die Reads am Referenzhumangenom aus und analysiert die Reads, die einer eindeutigen Position im Genom zugeordnet sind. Die Assay Software schließt doppelte Reads und Positionen aus, die mit hohen Coverage-Variationen über euploide Proben hinweg assoziiert sind. Die Sequenzierungsdaten werden für Nukleotid-Inhalt sowie zur Korrektur von Batch-Effekten und anderen Quellen unerwünschter Variabilität normalisiert. Die Informationen zur cfDNA-Fragmentlänge werden von den Paired-End-Sequenzierungs-Reads abgeleitet. Darüber hinaus untersucht die Assay Software Statistiken zur Sequenzierungs-Coverage für Regionen, die für eine Anreicherung von fetaler oder mütterlicher cfDNA bekannt sind. Die aus der Analyse der Fragmentlänge und der Coverage generierten Daten werden verwendet, um die fetale Fraktion für jede Probe zu schätzen. Anhand dieser Informationen generiert die VeriSeq NIPT Assay Software Statistikwerte für jedes Test-Chromosom in jeder Probe und ermittelt Aneuploidien, indem sie Folgendes vergleicht:

- ▶ Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Probe angesichts der normalisierten Sequenzierungsdaten zu einem Bereich betroffen ist.
- ▶ Die geschätzte fetale Fraktion mit der Wahrscheinlichkeit, dass eine Probe angesichts derselben Informationen nicht betroffen ist.

Assay Software

Die Assay Software verarbeitet und überwacht kontinuierlich neue Sequenzierungsdaten, die zum Ordner „Input“ (Eingabe) auf dem Onsite Server hinzugefügt werden. Wenn ein neuer Sequenzierungslauf erkannt wird, beginnt der nachfolgend beschriebene Datenfluss.

Abbildung 3 Datenflussdiagramm

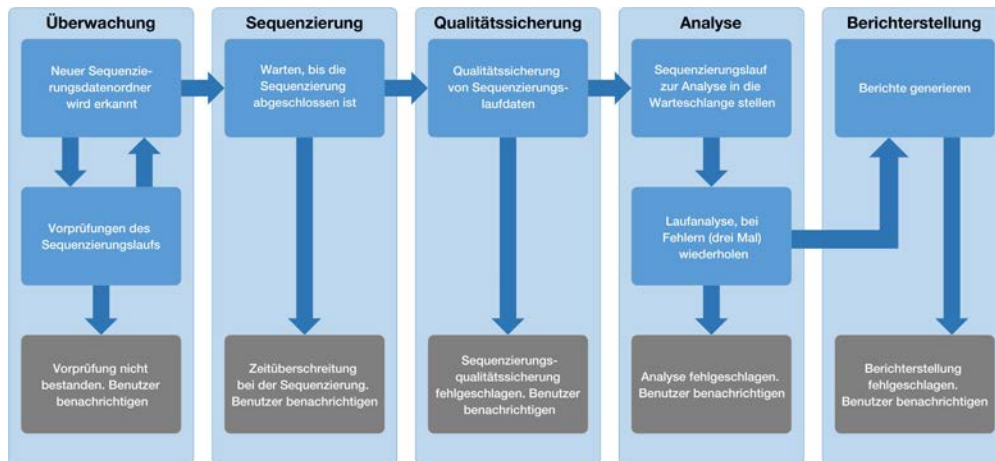

- Überwachung:** Vorprüfung der Validität des neuen Sequenzierungslaufs. Bei der Validitätsprüfung werden die Kompatibilität der Laufparameter (Stimmen die Werte mit den erwarteten Werten überein?) und die Zuordnung der Fließzelle zu einem bekannten vorhandenen Pool-Röhrchen geprüft. Außerdem wird sichergestellt, dass Ergebnisse für dieselben Proben in diesem Pool nicht bereits vorliegen (erneute Verarbeitung). Wenn eine dieser Prüfungen fehlschlägt, wird der Benutzer über das E-Mail-Benachrichtigungssystem und das Warnmeldungsprotokoll auf der Web-Benutzeroberfläche benachrichtigt.
- Sequenzierung:** Überwacht kontinuierlich die Durchführung des Sequenzierungslaufs. Es wird ein Zeitpunkt festgelegt, bis zu dem der Lauf abgeschlossen sein muss. Wird dieses Zeitüberschreitungslimit erreicht, wird der Benutzer über das E-Mail-Benachrichtigungssystem und das Warnmeldungsprotokoll auf der Web-Benutzeroberfläche benachrichtigt.
- Qualitätssicherung:** Prüft die vom Sequenzierer generierten InterOp-QS-Dateien. Die Assay Software prüft die Gesamtzahl der Cluster, die Clusterdichte und die Qualitäts-Scores der Reads. Wenn die QS-Kriterien nicht erfüllt werden, wird der Benutzer über das E-Mail-Benachrichtigungssystem und das Warnmeldungsprotokoll auf der Web-Benutzeroberfläche benachrichtigt.
- Analyse:** Verwaltet die Warteschlange der Analyse für mehrere Sequenzierungsläufe, die von verschiedenen, für den Server konfigurierten Geräten generiert wurden. Der Server verarbeitet die einzelnen Analyseläufe nacheinander nach dem FIFO-Prinzip (First In, First Out). Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Analyselaufs wird die nächste anstehende Analyse in der Warteschlange gestartet. Wenn ein Analyselauf fehlschlägt oder das Zeitüberschreitungslimit erreicht, startet die Assay Software die Analyse automatisch bis zu drei Mal neu. Nach jedem Fehlschlagen eines Laufs wird der Benutzer über das E-Mail-Benachrichtigungssystem und das Warnmeldungsprotokoll auf der Web-Benutzeroberfläche benachrichtigt.
- Berichterstellung:** Generiert nach Abschluss der Analyse den Bericht mit den endgültigen Ergebnissen. Wenn ein Fehler auftritt und keine Berichte erstellt werden, wird der Benutzer über das E-Mail-Benachrichtigungssystem und das Warnmeldungsprotokoll auf der Web-Benutzeroberfläche benachrichtigt.

Aufgaben der Assay Software

Die Assay Software führt automatisierte und vom Benutzer initiierte Aufgaben durch.

Automatisierte Aufgaben

Die Assay Software führt folgende automatisierte Aufgaben durch:

- ▶ **Sammlung und Speicherung von Probenvorbereitungsprotokollen:** Am Ende jedes Schritts generiert die Software mehrere Ausgabedateien und speichert diese im Ordner „ProcessLog“ im Ordner „Output“ (Ausgabe). Eine Übersicht finden Sie unter *Struktur der Berichtsdateien auf Seite 39* und ausführliche Informationen unter *Prozessberichte auf Seite 49*.
- ▶ **Generierung von Warnungen, E-Mail-Benachrichtigungen und Berichten:** Überwachung des Validitätsstatus des Batches, des Pools und der Probe während der Probenvorbereitungsschritte und der Qualitätssicherung der Sequenzierungsdaten und Analyseergebnisse pro Probe. Basierend auf diesen Validitätsprüfungen legt die Assay Software fest, ob die Verarbeitung fortgesetzt wird und die Ergebnisse protokolliert werden. Wenn eine Probe oder ein Pool gemäß den Ergebnissen der Qualitätssicherung ungültig ist, beendet die Assay Software die Verarbeitung. Sie sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an den Benutzer, erstellt einen Bericht und zeigt eine Warnung auf der Web-Benutzeroberfläche an.
- ▶ **Analyse der Sequenzierungsdaten:** Analyse der Sequenzierungsrohdaten jeder multiplexierten Probe im Pool unter Verwendung des integrierten Informatik-Pipeline-Algorithmus. Die Assay Software ermittelt die Aneuploidieergebnisse für jede Probe. Das System liefert keine Ergebnisse zu Proben, die der Benutzer ungültig gemacht oder abgebrochen hat. Bei Proben, die die Qualitätssicherungskriterien nicht erfüllen, gibt das System den genauen Grund für die Nichterfüllung an, die Ergebnisse der fehlgeschlagenen Probe werden jedoch nicht angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter *NIPT Report (NIPT-Bericht) auf Seite 43*.
- ▶ **Ergebnisdateierstellung:** Ausgabe der Probenergebnisse in eine Datei mit durch Tabulatorzeichen getrennten Werten, die im Ordner „Output“ (Ausgabe) gespeichert wird. Weitere Informationen finden Sie unter *Struktur der Berichtsdateien auf Seite 39*.
- ▶ **Berichterstellung:** Die Assay Software erstellt Ergebnis-, Benachrichtigungs- und Prozessberichte. Weitere Informationen finden Sie unter *Ereignisse für das Erstellen von Berichten auf Seite 41*.
- ▶ **Ungültigmachen von Proben, Pools und Batches:**
 - ▶ **Ungültigmachen von Proben:** Die Assay Software markiert einzelne Proben als ungültig, wenn der Benutzer:
 - ▶ die entsprechende Probe explizit ungültig macht.
 - ▶ die gesamte Platte bei der Bibliotheksvorbereitung und vor dem Erstellen der Pools ungültig macht.
 Wird eine Probe als ungültig markiert, wird automatisch ein „Sample Invalidation Report“ (Bericht zum Ungültigmachen von Proben) erstellt (siehe *Sample Invalidation Report (Bericht zum Ungültigmachen von Proben) auf Seite 47*).
 - ▶ **Erstellung eines Berichts zum Ungültigmachen von Pools und Batches:** Pools und Batches können nur vom Benutzer ungültig gemacht werden. Ungültig gemachte Pools werden vom System nicht verarbeitet. Aus dem Batch stammende Pools, die vor der Ungültigmachung erstellt wurden, gelten nicht automatisch als ungültig und können vom System weiterverarbeitet werden. Es können jedoch keine neuen Pools aus dem ungültig gemachten Batch erstellt werden. Wenn ein Pool ungültig gemacht wird, erstellt das System einen „Pool Retest Request Report“ (Bericht über die Anforderung auf erneutes Testen des Pools), wenn Folgendes zutrifft:
 - ▶ Der Batch ist gültig.
 - ▶ Es gibt keine weiteren Pools für diesen Batch.

- ▶ Die Anzahl der zulässigen Pools aus dem Batch ist nicht erreicht.

Weitere Informationen finden Sie unter *Pool Retest Request Report (Bericht über die Anforderung auf erneutes Testen des Pools)* auf Seite 48.

▶ Verwaltung erneuter Tests:

- ▶ **Fehlgeschlagene Pools:** In der Regel handelt es sich bei fehlgeschlagenen Pools um solche, die die Metriken für die Sequenzierungsqualitätssicherung nicht erreicht haben. Die Assay Software fährt nicht mit der Verarbeitung fehlgeschlagener Pools fort, wenn der Lauf beendet wird. Führen Sie eine erneute Sequenzierung mit einem zweiten Aliquot des Pools durch.
- ▶ **Fehlgeschlagene Proben:** Die Software ermöglicht das erneute Testen der Proben, sofern erforderlich. Fehlgeschlagene Proben müssen in einen neuen Batch integriert werden und gemäß den Assay-Schritten erneut verarbeitet werden.
- ▶ **Erneute Ausführung von Läufen:** Das System führt keine erneute Analyse von Pools mit Proben durch, die bereits erfolgreich verarbeitet und protokolliert wurden. Sie können eine Probe erneut ausführen, wenn Sie sie in einen neuen Batch aufnehmen.

Vom Benutzer initiierte Aufgaben

VeriSeq NIPT Solution ermöglicht Ihnen die Durchführung der folgenden Aufgaben:

Mit dem Workflow Manager:

- ▶ Eine einzelne Probe oder alle Proben in einem Batch bzw. in einem Pool als ungültig markieren.
- ▶ Eine bestimmte Probe als abgebrochen markieren. Die Assay Software markiert anschließend das Ergebnis im Bericht mit den endgültigen Ergebnissen als abgebrochen.

Mit der Assay Software:

- ▶ Software konfigurieren, die installiert und in die Netzwerkinfrastruktur des Labors integriert werden soll.
- ▶ Konfigurationseinstellungen ändern, z. B. Netzwerkeinstellungen, Speicherorte freigegebener Ordner und Benutzerkontenverwaltung.
- ▶ System- und Batch-Status, Ergebnis- und Batch-Verarbeitungsberichte, Aktivitäts- und Prüfprotokolle und Assay-Ergebnisse anzeigen.



HINWEIS

Benutzer können abhängig von ihren Benutzerberechtigungen bestimmte Aufgaben durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter *Zuweisen von Benutzerrollen* auf Seite 23.

Sequenzierungs-Handler

Die Assay Software verwaltet die von den Sequenzierungsgeräten generierten Sequenzierungsläufe über den Sequenzierungs-Handler. Der Sequenzierungs-Handler identifiziert neue Sequenzierungsläufe, validiert Laufparameter und ordnet den Pool-Barcode einem bekannten, während des Bibliotheksvorbereitungsprozesses erstellten Pool zu. Wenn eine Assoziation nicht durchgeführt werden kann, wird eine Benachrichtigung an den Benutzer generiert und die Verarbeitung des Sequenzierungslaufs wird gestoppt.

Nach erfolgreichem Abschluss der Validierung setzt die Assay Software die Überwachung der Sequenzierungslaufdurchführung fort. Abgeschlossene Sequenzierungsläufe werden in die Warteschlange eingereiht und vom Analyseverfahren-Handler weiterverarbeitet (siehe *Analyseverfahren-Handler* auf Seite 19).

Kompatibilität von Sequenzierungsläufen

Der Server analysiert nur Sequenzierungsläufe, die mit dem analytischen cfDNA-Workflow kompatibel sind. Verwenden Sie nur kompatible Sequenzierungsmethoden und Softwareversionen, um Base-Calls zu generieren.



HINWEIS

Überwachen Sie regelmäßig die Leistungsmetriken der Sequenzierungsdaten, um sicherzugehen, dass die Datenqualität den Spezifikationen entspricht.

Konfigurieren Sie die Sequenzierung mithilfe kompatibler Read-Parameter.

- ▶ Paired-End-Lauf mit Reads mit 36 x 36 Zyklen
- ▶ Doppelte Indizierung mit zwei Index-Reads mit acht Zyklen

Analyseverfahren-Handler

Der Analyseverfahren-Handler startet das Analyseverfahren für den Nachweis von Aneuploidien. Das Verfahren verarbeitet die Sequenzierungsläufe einzeln mit einer durchschnittlichen Dauer von weniger als 5 Stunden pro Pool. Wenn die Verarbeitung des Pools fehlschlägt oder wegen eines Stromausfalls oder einer Zeitüberschreitung nicht abgeschlossen wird, stellt der Analyseverfahren-Handler den Lauf automatisch erneut in die Verarbeitungswarteschlange. Wenn die Verarbeitung des Pools drei Mal hintereinander fehlschlägt, wird der Lauf als fehlgeschlagen markiert und der Benutzer erhält eine entsprechende Benachrichtigung.

Nach erfolgreicher Durchführung der Analyse wird die Erstellung des NIPT-Berichts gestartet. Weitere Informationen finden Sie unter *NIPT Report (NIPT-Bericht)* auf Seite 43.

Zeitüberschreitungs- und Speicherungsanforderungen für den Workflow

Der analytische cfDNA-Workflow unterliegt den folgenden Zeitüberschreitungs- und Speicherungsbeschränkungen.

Parameter	Standardwert
Maximale Laufparameter-Wartezeit	4 Stunden
Maximale Sequenzierungsdauer	20 Stunden
Maximale Dauer der Analyse	10 Stunden
Minimaler temporärer Speicherplatz	2 TB

Web-Benutzeroberfläche

Die Assay Software verfügt über eine lokale Web-Benutzeroberfläche, die von jedem Standort im Netzwerk aus einen einfachen Zugang zum Onsite Server ermöglicht. Die Web-Benutzeroberfläche bietet die folgenden Funktionen:

- ▶ **View recent activities** (Zuletzt durchgeführte Aktivitäten anzeigen): Gibt die Schritte der Assay-Ausführung an, die abgeschlossen wurden. Der Benutzer wird über das E-Mail-Benachrichtigungssystem über viele dieser Aktivitäten informiert. Weitere Informationen finden Sie unter *Benachrichtigungen der Assay Software* auf Seite 56.


- ▶ **View errors and alerts** (Fehler und Alarme anzeigen): Identifiziert Probleme, die die weitere Assay-Verarbeitung ggf. verhindern. Fehlermeldungen und Alarme werden über das E-Mail-Benachrichtigungssystem an den Benutzer gesendet. Weitere Informationen finden Sie unter *Benachrichtigungen der Assay Software auf Seite 56*.
- ▶ **Configure the server network settings** (Netzwerkeinstellungen konfigurieren): Die Konfiguration des Netzwerks wird in der Regel von Mitarbeitern von Illumina bei der Installation des Systems durchgeführt. Ggf. sind Anpassungen erforderlich, wenn IT-Änderungen am lokalen Netzwerk vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Ändern der Netzwerk- und Servereinstellungen auf Seite 27*.
- ▶ **Manage server access** (Serverzugriff verwalten): Der Zugang zum Onsite Server ist mit Administrator- und mit Bedienerzugriffsberechtigung möglich. Diese Bedienerberechtigungen steuern das Anzeigen der Aktivitäts-, Alarm- und Fehlerprotokolle sowie das Ändern der Einstellungen für das Netzwerk und die Datenzuordnung. Weitere Informationen finden Sie unter *Verwalten von Benutzern auf Seite 23*.
- ▶ **Configure sequencing data folder** (Sequenzierungsdatenordner konfigurieren): Standardmäßig werden die Sequenzierungsdaten auf dem Server gespeichert. Zur Erhöhung der Speicherkapazität können Sie jedoch ein zentrales NAS-System hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter *Zuordnen von Serverlaufwerken auf Seite 33*.
- ▶ **Configure email notification subscribers list** (Empfängerlisten für E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren): Verwaltet eine Liste mit Empfängern, die per E-Mail über Fehlermeldungen und bei der Assay-Verarbeitung aufgetretene Alarme benachrichtigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Konfigurieren von System-E-Mail-Benachrichtigungen auf Seite 28*.
- ▶ **Reboot or shutdown the server** (Server neu starten oder herunterfahren): Führt bei Bedarf einen Neustart des Servers durch. Das Neustarten oder Herunterfahren kann z. B. nach einem Serverausfall oder zur Aktivierung von Konfigurationseinstellungen erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter *Durchführen eines Server-Neustarts auf Seite 33*.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Bei der ersten Anmeldung bei der Web-Benutzeroberfläche werden Sie aufgefordert, die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (End User License Agreement, EULA) zu akzeptieren. Wenn Sie auf **Download EULA** (EULA herunterladen) klicken, können Sie die Lizenzvereinbarung auf Ihren Computer herunterladen. Sie müssen die Lizenzvereinbarung akzeptieren, um mit der Web-Benutzeroberfläche weiterarbeiten zu können.

Nachdem Sie der Lizenzvereinbarung zugestimmt haben, können Sie zur Lizenzvereinbarungsseite zurückkehren und das Dokument bei Bedarf herunterladen.

Konfigurieren der Web-Benutzeroberfläche

Wählen Sie das Symbol „Settings“ (Einstellungen) , um eine Dropdown-Liste mit Konfigurationseinstellungen zu öffnen. Die angezeigten Einstellungen hängen von der Benutzerrolle und den zugeordneten Berechtigungen ab. Weitere Informationen finden Sie unter *Zuweisen von Benutzerrollen auf Seite 23*.



HINWEIS

Techniker haben keinen Zugriff auf diese Funktionen.

Einstellung	Beschreibung
User Management (Benutzerverwaltung)	Hinzufügen, Aktivieren/Deaktivieren und Bearbeiten von Benutzeranmeldedaten. Nur Servicetechniker und Administratoren.
Email Configuration (E-Mail-Konfiguration)	Bearbeiten der Empfängerliste für E-Mail-Benachrichtigungen.
Change Shared Folder Password (Kennwort für freigegebenen Ordner ändern)	Ändern des sbsuser-Kennworts für den Zugriff auf das NAS-System.
Reboot Server (Server neu starten)	Nur Servicetechniker oder Administratoren.
Shut Down Server (Server herunterfahren)	Nur Servicetechniker oder Administratoren.

Anmelden bei der Web-Benutzeroberfläche

So greifen Sie auf die Benutzeroberfläche der Assay Software zu und melden sich an:

- Starten Sie auf einem Computer, der mit demselben Netzwerk wie der Onsite Server verbunden ist, einen der folgenden Webbrowser:
 - ▶ Chrome v33 oder höher
 - ▶ Firefox v27 oder höher
 - ▶ Internet Explorer v11 oder höher
- Geben Sie die Server-IP-Adresse oder den von Illumina bei der Installation vergebenen Namen des Servers ein (entspricht \\<IP-Adresse des VeriSeq Onsite Servers>\Anmeldedaten).
Beispiel: \\10.10.10.10\Anmeldedaten.
- Falls eine Browser-Sicherheitswarnung angezeigt wird, fügen Sie eine Sicherheitsausnahme hinzu, um zum Anmeldebildschirm zu gelangen.
- Geben Sie im Anmeldebildschirm den Benutzernamen und das von Illumina zur Verfügung gestellte Kennwort ein (achten Sie auf die Groß-/Kleinschreibung) und klicken Sie auf **Log In** (Anmelden).



HINWEIS

Nach 10 Minuten Inaktivität wird der aktuelle Benutzer automatisch abgemeldet.

Verwenden des Dashboards

Das Dashboard der VeriSeq NIPT Assay Software ist das Hauptnavigationsfenster und wird angezeigt, nachdem Sie sich angemeldet haben. Sie können jederzeit auf die Menüoption **Dashboard** klicken, um zum Dashboard zurückzukehren.

Im Dashboard sehen Sie die 50 zuletzt protokollierten Aktivitäten (wenn weniger Aktivitäten protokolliert wurden, sind nur diese aufgeführt). Sie können die 50 vorherigen protokollierten Aktivitäten abrufen und durch die Aktivitätenhistorie blättern. Klicken Sie hierzu auf „Previous“ (Vorherige) in der rechten unteren Ecke der Aktivitätentabelle.

Abbildung 4 Dashboard der VeriSeq NIPT Assay Software

The screenshot shows a dashboard with a header 'Dashboard' and a navigation bar with 'Recent activities', 'Recent errors', and 'Server status'. The 'Recent activities' tab is active, displaying a table with the following data:

WHEN	USER	SUBSYSTEM	DETAILS	LEVEL
2016-07-29 09:17 PDT		Assay	Aneuploidy Detection Report generated for '160728_NB551043_0005_AHCLWJBGXY'	Activity
2016-07-29 09:17 PDT		Assay	Analysis started for '160728_NS500411_0171_AHCLGJBGXY'	Activity
2016-07-29 05:23 PDT		Assay	Sequencing QC passed for '160728_NS500411_0171_AHCLGJBGXY'	Activity
2016-07-29 05:14 PDT		Assay	Analysis started for '160728_NB551043_0005_AHCLWJBGXY'	Activity
2016-07-29 05:14 PDT		Assay	Sequencing QC passed for '160728_NB551043_0005_AHCLWJBGXY'	Activity
2016-07-28 19:56 PDT		Assay	Sequencing started for '160728_NB551043_0005_AHCLWJBGXY'	Activity
2016-07-28 19:55 PDT		Assay	Sequencing started for '160728_NS500411_0171_AHCLGJBGXY'	Activity
2016-07-28 17:18 PDT		Assay	Batch 'DVT0151_PL02_1': pool 'PT2008505' created	Activity
2016-07-28 17:18 PDT		Assay	Batch 'DVT0151_PL02_1': pool 'PT2008521' created	Activity
2016-07-28 16:14 PDT		Assay	Batch 'DVT0151_PL02_1' completed library	Activity
2016-07-28 10:30 PDT		Assay	Batch 'DVT0151_PL02_1' initiated	Activity

Anzeigen der zuletzt durchgeführten Aktivitäten

Die Registerkarte „Recent Activities“ (Letzte Aktivitäten) enthält eine Liste mit einer kurzen Beschreibung der zuletzt durchgeführten Aktivitäten der Assay Software und des Onsite Servers.

Name	Beschreibung
When (Zeitpunkt)	Datum und Uhrzeit der Aktivität
User (Benutzer)	Gibt, sofern zutreffend, den Benutzer an, der die Aktivität durchgeführt hat
Subsystem	Einheit oder Prozess, der die Aktivität durchgeführt hat, z. B. Benutzer, Assay oder Konfiguration
Details	Beschreibung der Aktivität
Level (Stufe)	Stufe, die der Aktivität gemäß den folgenden Optionen zugewiesen wurde: <ul style="list-style-type: none"> • Activity (Aktivität): Gibt eine Aktivität auf dem Server an, z. B. einen Systemneustart oder die Anmeldung/Abmeldung eines Benutzers. • Notice (Hinweis): Gibt einen Schritt an, der nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte. Beispiel: Ungültigmachen von Proben oder QS fehlgeschlagen. • Warning (Warnung): Gibt an, dass bei normaler Durchführung und ordnungsgemäßer Hardware-Funktion ein Fehler aufgetreten ist. Beispiel: unerkannte Laufparameter oder fehlgeschlagene Analyse.

Anzeigen der zuletzt aufgetretenen Fehler

Die Registerkarte „Recent Errors“ (Zuletzt aufgetretene Fehler) enthält eine Liste mit einer kurzen Beschreibung der zuletzt aufgetretenen Software- und Serverfehler.

Name	Beschreibung
When (Zeitpunkt)	Datum und Uhrzeit der Aktivität
User (Benutzer)	Gibt, sofern zutreffend, den Benutzer an, der die Aktivität durchgeführt hat

Name	Beschreibung
Subsystem	Einheit oder Prozess, der die Aktivität durchgeführt hat, z. B. Benutzer, Assay oder Konfiguration
Details	Beschreibung der Aktivität
Level (Stufe)	Stufe, die der Aktivität gemäß den folgenden Optionen zugewiesen wurde: <ul style="list-style-type: none"> • Urgent (Dringend): Erheblicher Hardwarefehler, der den Systembetrieb beeinträchtigt. Wenden Sie sich an den technischen Support von Illumina. • Alert (Alarm): Fehler während des Normalbetriebs. Beispiel: Beschädigung der Festplatte oder Speicherplatz- bzw. Konfigurationsprobleme, die das Erstellen von Berichten oder E-Mail-Benachrichtigungen verhindern. • Error (Fehler): System- oder Serverfehler während des Normalbetriebs. Beispiel: Fehler in der Konfigurationsdatei oder Hardwarefehler.

Anzeigen von Systemstatus und -alarmen

Um eine Zusammenfassung des Serverstatus anzuzeigen, klicken Sie im Dashboard auf die Registerkarte **Server Status** (Serverstatus).

- ▶ **Date** (Datum): Das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit.
- ▶ **Time zone** (Zeitzone): Die für den Server festgelegte Zeitzone. Sie wird für die Datums- und Uhrzeitangaben in E-Mails, Warnungen und Berichten verwendet.
- ▶ **Hostname**: Der Name des Systems besteht aus dem Netzwerk-Hostnamen und dem DNS-Domännennamen.
- ▶ **Disk space usage** (Speicherplatznutzung): Der Prozentsatz an Speicherplatz, der für das Speichern von Daten belegt ist.
- ▶ **Software**: Regulatorische Software-Konfiguration (z. B. CE-IVD).
- ▶ **Version**: Version der VeriSeq NIPT Assay Software.

Verwalten von Benutzern



HINWEIS

Nur Servicetechniker und Administratoren verfügen über die Berechtigung zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Berechtigungen für Techniker und andere Benutzer auf ihrer Ebene.

Zuweisen von Benutzerrollen

Benutzerrollen legen die Zugriffsrechte des Benutzers fest sowie dessen Rechte für die Ausführung bestimmter Aufgaben.

Rolle	Beschreibung
Service	Ein Illumina-Servicetechniker, der die Erstinstallation und die Konfiguration des Systems (einschließlich der Einrichtung eines Administrators) durchführt. Außerdem führt er Fehlerbehebungen und Serverreparaturen durch, nimmt Konfigurationseinstellungen und -änderungen vor und bietet kontinuierlichen Software-Support.
Administrator	Ein Laboradministrator, der die Konfigurationseinstellungen festlegt und pflegt, Benutzer verwaltet, E-Mail-Empfängerlisten erstellt, das Kennwort für den freigegebenen Ordner ändert und den Server neu startet oder herunterfährt.
Technician (Techniker)	Ein Labortechniker, der den Systemstatus und Warnungen sieht.

Hinzufügen von Benutzern

Bei der Erstinstallation fügt der Servicetechniker von Illumina den Benutzer „Administrator“ hinzu.

So fügen Sie einen Benutzer hinzu:

- 1 Wählen Sie im Bildschirm „User Management“ (Benutzerverwaltung) die Option **Add New User** (Neuen Benutzer hinzufügen).



HINWEIS

Alle Felder müssen ausgefüllt werden.

- 2 Geben Sie den Namen des Benutzers ein.



HINWEIS

Zulässige Zeichen für die Eingabe des Benutzernamens sind nur alphanumerische Zeichen (z. B. a–z und 0–9, Groß-/Kleinschreibung wird nicht beachtet), „_“ (Unterstriche) und „-“ (Trennstriche). Der Benutzername muss 4–20 Zeichen lang sein und mindestens ein numerisches Zeichen enthalten. Das erste Zeichen darf keine Zahl sein.

Die Assay Software verwendet Benutzernamen zur Identifizierung der Personen, die an den verschiedenen Aspekten der Assay-Verarbeitung mitwirken und mit der Assay Software interagieren.

- 3 Geben Sie den vollständigen Namen des Benutzers ein. Der vollständige Name wird nur im Benutzerprofil angezeigt.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein und bestätigen Sie es.

Hinweis

Kennwörter müssen 8–20 Zeichen lang sein und mindestens einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und ein numerisches Zeichen enthalten.
- 5 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.
Für jeden Benutzer ist die Eingabe einer eindeutigen E-Mail-Adresse erforderlich.
- 6 Wählen Sie die gewünschte Benutzerrolle aus der Dropdown-Liste aus.
- 7 Wählen Sie das Feld **Active** (Aktiv), um den Benutzer sofort zu aktivieren, oder heben Sie die Auswahl auf, um die Aktivierung zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen (z. B. nachdem der Benutzer entsprechend geschult wurde).
- 8 Klicken Sie zweimal auf **Save** (Speichern), um die Änderungen zu bestätigen und zu speichern. Der neue Benutzer wird jetzt im Bildschirm „User Management“ (Benutzerverwaltung) angezeigt.

Bearbeiten von Benutzern

So bearbeiten Sie Benutzerinformationen:

- 1 Wählen Sie im Bildschirm „User Management“ (Benutzerverwaltung) den Benutzernamen des gewünschten Benutzers aus.
- 2 Bearbeiten Sie Informationen des Benutzers nach Bedarf und klicken Sie auf **Save** (Speichern), wenn Sie fertig sind.
- 3 Klicken Sie erneut auf **Save** (Speichern), wenn Sie aufgefordert werden, die Änderungen zu bestätigen. Im Bildschirm „User Management“ (Benutzerverwaltung) werden die geänderten Benutzerdaten angezeigt.

Deaktivieren von Benutzern

So deaktivieren Sie einen Benutzer:

- 1 Wählen Sie im Bildschirm „User Management“ (Benutzerverwaltung) den gewünschten Benutzernamen aus.
- 2 Heben Sie die Aktivierung des Kontrollkästchens **Activate** (Aktivieren) auf und klicken Sie auf **Save** (Speichern).
- 3 Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf **Save** (Speichern).
Im Bildschirm „User Management“ (Benutzerverwaltung) ändert sich der Benutzerstatus in „Disabled“ (Deaktiviert).

Verwalten eines freigegebenen Netzlaufwerks



HINWEIS

Nur Servicetechniker und Administratoren verfügen über die Berechtigung zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von freigegebenen Ordnerspeicherorten.

Hinzufügen eines freigegebenen Netzlaufwerks

Konfigurieren Sie das System so, dass die Sequenzierungsdaten auf einem dedizierten NAS-System und nicht auf dem mit dem Sequenziersystem verbundenen Server gespeichert werden. Ein NAS-System ermöglicht größere Speicherkapazitäten und fortlaufende Datensicherungen.

- 1 Wählen Sie im Dashboard **Folders** (Ordner).
- 2 Klicken Sie auf **Add folder** (Ordner hinzufügen).
- 3 Geben Sie die folgenden Informationen ein, die Sie vom IT-Administrator erhalten haben:
 - ▶ **Location** (Speicherort): Vollständiger Pfad zum NAS-Speicherort und Ordner, in dem die Daten gespeichert werden.
 - ▶ **Username** (Benutzername): Festgelegter Benutzername für den Onsite Server für den Zugang zum NAS-System.
 - ▶ **Password** (Kennwort): Festgelegtes Kennwort für den Onsite Server für den Zugang zum NAS-System.
- 4 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).
- 5 Klicken Sie auf **Test** (Testen), um die NAS-Verbindung zu testen.
Wenn die Verbindung fehlschlägt, erkundigen Sie sich beim IT-Administrator nach dem Server-, Speicherort- und Benutzernamen sowie dem Kennwort.
- 6 Starten Sie den Server neu, damit die Änderungen wirksam werden.



HINWEIS

Ein freigegebenes Netzlaufwerk kann nur für einen Sequenzierungsdatenordner konfiguriert werden.

Bearbeiten eines freigegebenen Netzlaufwerks

- 1 Wählen Sie im Dashboard **Folders** (Ordner).
- 2 Ändern Sie den Pfad des Speicherorts und klicken Sie auf **Save** (Speichern).
- 3 Klicken Sie auf **Test** (Testen), um die NAS-Verbindung zu testen.

Wenn die Verbindung fehlschlägt, erkundigen Sie sich beim IT-Administrator nach dem Server-, Speicherort- und Benutzernamen sowie dem Kennwort.

Löschen eines freigegebenen Netzlaufwerks

- 1 Wählen Sie im Dashboard **Folders** (Ordner).
- 2 Klicken Sie auf den zu ändernden Pfad.
- 3 Klicken Sie auf **Delete** (Löschen), um den externen Sequenzierungsordner zu entfernen.

Konfigurieren von Netzwerk- und Zertifikatseinstellungen

Servicetechniker von Illumina verwenden den Bildschirm „Network Configuration“ (Netzwerkkonfiguration), um während der anfänglichen Installation Netzwerk- und Zertifikatseinstellungen zu konfigurieren.



HINWEIS

Nur Servicetechniker und Administratoren verfügen über die Berechtigung zum Ändern der Netzwerk- und Zertifikatseinstellungen.

- 1 Wählen Sie im Dashboard **Configuration** (Konfiguration) aus.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Network Configuration** (Netzwerkkonfiguration) und konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen entsprechend.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Certification Configuration** (Zertifizierungskonfiguration), um das SSL-Zertifikat zu generieren.

Ändern der Zertifikatseinstellungen

Ein SSL-Zertifikat ist eine Datendatei, die eine sichere Verbindung vom Onsite Server zu einem Browser zulässt.

- 1 Verwenden Sie die Registerkarte „Certificate Configuration“ (Zertifikatskonfiguration), um SSL-Zertifikatseinstellungen hinzuzufügen oder zu ändern.
 - ▶ **Laboratory Email** (E-Mail-Adresse des Labors): E-Mail-Adresse des Testlabors (ein gültiges E-Mail-Adressformat ist erforderlich)
 - ▶ **Organization Unit** (Organisationseinheit): Abteilung
 - ▶ **Organization** (Organisation): Name des Testlabors
 - ▶ **Location** (Standort): Anschrift des Testlabors
 - ▶ **State** (Bundesland): Bundesland, in dem sich das Testlabor befindet (Feld wird automatisch anhand der E-Mail-Adresse ausgefüllt)
 - ▶ **Country** (Land): Land, in dem sich das Testlabor befindet (Feld wird automatisch anhand der E-Mail-Adresse ausgefüllt)
 - ▶ **Certificate Thumbprint (SHA1)** (Fingerabdruck des Zertifikats [SHA1]): ID des Zertifikats



HINWEIS

Der Fingerabdruck des Zertifikats (SHA1) wird angezeigt, sobald ein Zertifikat generiert bzw. neu generiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter *Neugenerierung eines Zertifikats auf Seite 27*.

- 2 Klicken Sie auf **Save** (Speichern), um ggf. vorgenommene Änderungen anzuwenden.



HINWEIS

SHA1 stellt sicher, dass Benutzer keine Zertifikatswarnungen erhalten, wenn sie auf die VeriSeq NIPT Assay Software zugreifen.

Ändern der Netzwerk- und Servereinstellungen



HINWEIS

Stimmen Sie alle Änderungen der Netzwerk- und Servereinstellungen mit dem IT-Administrator ab, um Serververbindungsfehler zu vermeiden.

- 1 Verwenden Sie die Registerkarte „Network Configuration“ (Netzwerkconfiguration), um die Einstellungen für das Netzwerk und den Onsite Server festzulegen bzw. zu ändern.
 - ▶ **Static IP Address** (Statische IP-Adresse): Festgelegte IP-Adresse des Onsite Servers
 - ▶ **Subnet Mask** (Subnetzmaske): Subnetzmaske des lokalen Netzwerks
 - ▶ **Default Gateway Address** (Standard-Gateway-Adresse): Standard-IP-Adresse des Routers
 - ▶ **Hostname**: Zugewiesener Name des Onsite Servers im Netzwerk (standardmäßig als „localhost“ definiert)
 - ▶ **DNS Suffix** (DNS-Erweiterung): Zugewiesene DNS-Erweiterung
 - ▶ **Nameserver 1 and 2** (Namensserver 1 und 2): IP-Adresse bzw. Name des DNS-Servers für NTP-Uhrzeitsynchronisierungsserver
 - ▶ **NTP Time Server 1 and 2** (NTP-Zeitserver 1 und 2): Server für die NTP-Uhrzeitsynchronisierung
 - ▶ **MAC Address** (MAC-Adresse): MAC-Adresse des Netzwerkserver (nur Lesezugriff)
 - ▶ **Timezone** (Zeitzone): Lokale Zeitzone des Servers
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Einträge korrekt sind, und klicken Sie auf **Save** (Speichern), um den Server neu zu starten und alle vorgenommenen Änderungen anzuwenden.



VORSICHT

Falsche Einstellungen können die Verbindung mit dem Server unterbrechen.

Herunterladen und Installieren von Zertifikaten

So laden Sie ein SSL-Zertifikat herunter und installieren es:

- 1 Wählen Sie im Dashboard **Configuration** (Konfiguration) aus.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Certification Configuration** (Zertifizierungskonfiguration).
- 3 Wählen Sie im Bildschirm „Network Configuration“ (Netzwerkconfiguration) die Option **Download Certificate** (Zertifikat herunterladen).
- 4 Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und wählen Sie **Install Certificate** (Zertifikat installieren).
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen des Importassistenten, um das Zertifikat zu installieren.
- 6 Klicken Sie auf **OK** in den Dialogfeldern, um sie zu schließen.

Neugenerierung eines Zertifikats



HINWEIS

Nur Servicetechniker und Administratoren verfügen über die Berechtigung, Zertifikate neu zu generieren und das System neu zu starten.

So generieren Sie ein Zertifikat, nachdem sich Netzwerk- oder Zertifikatseinstellungen geändert haben:

- 1 Wählen Sie im Bildschirm „Network Configuration“ (Netzwerkconfiguration) die Option **Regenerate Certificate** (Zertifikat neu generieren).

- 2 Klicken Sie auf **Regenerate Certificate and Reboot** (Zertifikat neu generieren und Neustart durchführen), um fortzufahren, oder klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen), um den Vorgang abzubrechen.

Konfigurieren von System-E-Mail-Benachrichtigungen

Die VeriSeq NIPT Assay Software sendet Benutzern E-Mail-Benachrichtigungen, in denen der Assay-Fortschritt angegeben ist und Alarme zu Fehlern oder erforderlichen Benutzeraktionen enthalten sind. Die verschiedenen vom System gesendeten E-Mail-Benachrichtigungen werden unter *Benachrichtigungen der Assay Software* auf Seite 56 beschrieben.




HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Spam-Einstellungen für E-Mails E-Mail-Benachrichtigungen vom Server zulassen. E-Mail-Benachrichtigungen werden von einem Konto namens VeriSeq@<E-Mail-Domäne des Kunden> gesendet, wobei die <E-Mail-Domäne des Kunden> vom lokalen IT-Team bei der Installation des Servers angegeben wird.

Erstellen einer Empfängerliste für E-Mail-Benachrichtigungen

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um eine Liste mit Empfängern zu erstellen, an die E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden sollen.

So erstellen Sie eine Empfängerliste:

- 1 Klicken Sie im Dashboard auf das Einstellungssymbol .
- 2 Wählen Sie **Email Configuration** (E-Mail-Konfiguration).
- 3 Geben Sie im Feld „Subscribers“ (Empfänger) die E-Mail-Adressen ein. Trennen Sie die einzelnen Adressen durch Kommas.
Vergewissern Sie sich, dass Sie die E-Mail-Adressen korrekt eingegeben haben. Die Software validiert nicht das Format der E-Mail-Adressen.
- 4 Klicken Sie auf **Send test message** (Testnachricht senden), um eine Test-E-Mail-Nachricht an die Empfängerliste zu senden.
Prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um sicherzustellen, dass die E-Mail versendet wurde.
- 5 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).

Analyse und Berichterstellung

Nachdem die Sequenzierungsdaten erfasst wurden, werden sie demultiplexiert, in das FASTQ-Format konvertiert, an einem Referenzgenom aligniert und für den Nachweis von Aneuploidien analysiert. Es werden verschiedene Metriken, wie nachfolgend beschrieben, ermittelt, um die endgültige Qualitätsbeurteilung für die entsprechende Probe vorzunehmen.

Demultiplexierung und FASTQ-Generierung

Im BCL-Format gespeicherte Sequenzierungsdaten werden von der Konvertierungssoftware „bcl2fastq“ verarbeitet. Dabei werden Daten demultiplexiert und BCL-Dateien für die nachgeschaltete Analyse in standardmäßige FASTQ-Dateiformate konvertiert. Die Assay Software erstellt für jeden Sequenzierungslauf ein Probenblatt (SampleSheet.csv). Diese Datei enthält Probeninformationen, die während des Probenvorbereitungsprozesses an die Software übermittelt werden (mithilfe der Software-API). Ein Probenblatt enthält einen Kopfbereich mit Informationen über den Lauf sowie Deskriptoren für die in einer bestimmten Fließzelle verarbeiteten Proben.

In der folgenden Tabelle sind Details zu den Probenblattdaten aufgeführt.



HINWEIS

Es wird dringend empfohlen, dass Sie diese Probenblattdatei NICHT ändern, da sie vom System generiert wird und Änderungen zu unerwünschten Auswirkungen bis hin zu Analysefehlern führen können.

Spaltenname	Beschreibung
SampleID	Proben-ID
SampleName	Probenname, Standard: Identisch mit SampleID (Proben-ID)
Sample_Plate	Platten-ID einer angegebenen Probe, Standard: leer
Sample_Well	Well-ID auf der Platte einer angegebenen Probe
I7_Index_ID	ID des ersten Indexadapters
index	Nukleotidsequenz des ersten Adapters
I5_Index_ID	ID des zweiten Adapters
index2	Nukleotidsequenz des zweiten Adapters
Sample_Project	Projekt-ID einer angegebenen Probe, Standard: leer
SexChromosomes	Analyse in Bezug auf Geschlechtschromosomen. Einer der folgenden Werte: <ul style="list-style-type: none"> • yes (ja): Bericht zur Aneuploidie der Geschlechtschromosomen und Geschlechtsbericht angefordert • no (nein): Weder Bericht zur Aneuploidie der Geschlechtschromosomen noch Geschlechtsbericht angefordert • sca: Bericht zur Aneuploidie der Geschlechtschromosomen angefordert, Geschlechtsbericht nicht angefordert
SampleType	Probentyp. Einer der folgenden Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Singleton (Einling): Einlingsschwangerschaft • Twin (Zwilling): Mehrlingsschwangerschaft • Control (Kontrolle): Kontrollprobe von bekanntem Geschlecht und Aneuploidieklassifizierung • NTC: Negativkontrollprobe (keine DNA)

Sequenzierungsqualitätssicherung

Mit den Metriken für die Sequenzierungsqualitätssicherung werden Fließzellen identifiziert, deren Analyse mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlschlägt. Die Clusterdichte, der Prozentsatz der Reads nach Filterung, die Vorphasierungs- und Phasierungsmetriken beschreiben die generelle Sequenzierungsdatenqualität und werden in vielen Sequenzierungsanwendungen der nächsten Generation verwendet. Die Metrik der vorhergesagten alignierten Reads schätzt die Sequenzierungstiefebene der Fließzelle. Falls Daten niedriger Qualität die Metrik der vorhergesagten alignierten Reads nicht erreichen, wird die Verarbeitung des Laufs beendet. Weitere Informationen finden Sie unter *Metriken und Grenzwerte für die Sequenzierungsqualitätssicherung* auf Seite 36.

Schätzung der fetalen Fraktion

Die fetale Fraktion ist der Prozentsatz der zellfreien zirkulierenden DNA in einer Probe mütterlichen Bluts, die aus der Plazenta gewonnen wird. Die Assay Software berechnet die Schätzung der fetalen Fraktion mithilfe eines vorgegebenen gewichteten Durchschnitts von zwei Werten: Der erste Wert basiert auf der Größenverteilung der cfDNA-Fragmente und der zweite Wert auf Unterschieden in der genomischen Coverage der cfDNA von Mutter und Fetus.¹

¹Kim, S.K., et al, Determination of fetal DNA fraction from the plasma of pregnant women using sequence read counts, Prenatal Diagnosis August 2015; 35(8):810-5.

Statistikwerte für die endgültige Bewertung

Bei Autosomen werden die Paired-End-Sequenzierungsdaten gegen das Referenzgenom (HG19) aligniert. Eindeutige, nicht doppelt vorhandene alignierte Reads werden in 100-kb-Bereichen zusammengefasst. Die entsprechenden Bereichs-Counts werden an die GC-Verzerrung und gemäß der zuvor festgelegten regionspezifischen genomischen Coverage angepasst. Mit diesen normalisierten Bereichs-Counts werden durch Vergleich der abgedeckten Regionen, die Aneuploidien aufweisen können, mit den restlichen Autosomen Statistikwerte abgeleitet. Unter Berücksichtigung dieser Coverage-basierten Werte und der geschätzten fetalen Fraktion wird für jede Probe ein Log-Likelihood-Quotient (log likelihood ratio, LLR) berechnet. Der LLR ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Probe mit der beobachteten Coverage und fetalen Fraktion betroffen ist, gegenüber der Wahrscheinlichkeit, dass eine Probe mit derselben beobachteten Coverage nicht betroffen ist. Bei der Berechnung dieser Relation wird auch die geschätzte Unsicherheit der fetalen Fraktion berücksichtigt. Für nachfolgende Berechnungen wird der natürliche Logarithmus des LLR verwendet. Die Assay Software bewertet den LLR für jedes Zielchromosom und jede Probe, um Aneuploidien zu ermitteln.

Die Statistikwerte für X- und Y-Chromosomen und die Statistikwerte, die für Autosomen verwendet werden, sind unterschiedlich. Bei Föten, die als weiblich identifiziert wurden, erfordern SCA-Calls eine Klassifizierungsübereinstimmung von LLR und normalisiertem Chromosomenwert.¹ Für [45,X] (Turner-Syndrom) und für [47,XXX] werden spezifische LLR-Werte berechnet. Bei Föten, die als männlich identifiziert wurden, können SCA-Calls für [47,XXY] (Klinefelter-Syndrom) oder für [47,XYY] auf dem Verhältnis zwischen den normalisierten Chromosomenwerten für die X- und Y-Chromosomen (NCV_X und NCV_Y) basieren.* Proben in Zusammenhang mit männlichen Föten, bei denen NCV_X in dem Bereich liegt, der bei euploiden weiblichen Proben beobachtet wurde, können einen Call von [47,XXY] generieren. Proben in Zusammenhang mit männlichen Föten, bei denen NCV_X in dem Bereich liegt, der bei euploiden männlichen Proben beobachtet wurde, und das Y-Chromosom überrepräsentiert ist, können einen Call von [47,XYY] generieren. Einige Werte von NCV_Y und NCV_X liegen außerhalb des Bereichs, in dem das System eine Aneuploidie der Geschlechtschromosomen ermitteln kann. Diese Proben erzeugen für die XY-Klassifizierung das Ergebnis „Not Reportable“ (Nicht ausweisbar). Die autosomalen Ergebnisse für diese Proben werden jedoch ausgewiesen, sofern die anderen Qualitätssicherungsmetriken erfüllt wurden.

Qualitätssicherung der Analyse

Bei der Analyse werden Metriken zur analytischen Qualitätssicherung berechnet, um Proben zu ermitteln, die zu weit vom erwarteten Verhalten abweichen. Probanden, die diesen Metriken nicht entsprechen, werden als unzuverlässig betrachtet und als fehlgeschlagen markiert. Die Metriken für die analytische Qualitätssicherung und die zugeordneten Cutoffs oder zulässigen Bereiche werden unter *Metriken und Grenzwerte für die analytische Qualitätssicherung auf Seite 37* beschrieben. In der nachfolgenden Tabelle werden die Metriken beschrieben.

Kategorie	Metrik	Beschreibung
Qualitätssicherung Zählung	Clusters	Weist auf eine niedrige (eher wahrscheinlich) oder hohe (äußerst unwahrscheinlich) Clusterdichte hin.
Qualitätssicherung Zählung	NonExcludedSites (aligned_reads)	Gibt die erforderliche Mindestsequenzierungstiefe für den allgemeinen Nachweis von Aneuploidien an.

¹Bianchi D, Platt L, Goldberg J et al. Genome Wide Fetal Aneuploidy Detection by Maternal Plasma DNA Sequencing. Obstet Gynecol. 2012; 119(5):890–901. doi:10.1097/aog.0b013e31824fb482.

Kategorie	Metrik	Beschreibung
Wahrscheinlichkeitswert für Chromosomen-Denominatoren	NCD_13 NCD_18 NCD_21 NCD_X NCD_Y	Gibt die Coverage-Einheitlichkeit für die Gesamtgenom-Sequenzierung im Vergleich zum erwarteten Verhalten an. Proben, die diese Metriken der Qualitätssicherung nicht erzielen, können entweder starke genomische Anomalien (außerhalb der Regionen, die für den Nachweis von Aneuploidien von Interesse sind) aufweisen, oder die Bibliotheken dieser Proben sind nicht verzerrt.
Verteilung der Fragmentgröße	FragSizeDist (frag_size_dist)	Gibt die Verteilung der cfDNA-Fragmentgröße im Vergleich zum erwarteten Verhalten an. Gescherte genomische DNA hat z. B. eine andere Verteilung der Fragmentgröße als cfDNA und wird diese Metrik nicht erfüllen.
Coverage in Relation zur fetalen Fraktion	NES_FF_QC	Gibt an, ob die Sequenzierungstiefe für die angegebene geschätzte Fraktion der jeweiligen Probe ausreichend ist. Der Nachweis von Aneuploidien kann bei Proben mit hoher fetaler Fraktion auf einem angegebenen Konfidenzniveau bei niedrigerer Sequenzierungstiefe als bei Proben mit niedrigerer fetaler Fraktion erreicht werden.
Coverage in Relation zur fetalen Fraktion	iFACT	Gibt an, ob für die angegebene geschätzte fetale Fraktion der jeweiligen Probe eine ausreichende Sequenzierungstiefe beobachtet wurde. Der Nachweis von Aneuploidien kann bei Proben mit hoher fetaler Fraktion auf einem angegebenen Konfidenzniveau bei niedrigerer Sequenzierungstiefe als bei Proben mit niedrigerer fetaler Fraktion erreicht werden.

Qualitätssicherung von negativen Kontrollproben (NTC)

VeriSeq NIPT Solution ermöglicht es Ihnen, NTC-Proben zu Ihrem Lauf hinzuzufügen. ML STAR kann pro Lauf bis zu zwei NTC-Proben für Batches mit 48 Proben und bis zu vier NTC-Proben für Batches mit 96 Proben generieren. Unabhängig von der Anzahl an NTC-Proben, die Sie hinzufügen, prüft die Software auf durchschnittlich mindestens 4.000.000 eindeutig zugeordnete Fragmente pro Probe und pro Pool. Fügen Sie daher nicht mehr als zwei NTC-Proben pro Pool hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter *Metriken und Grenzwerte für die Sequenzierungsqualitätssicherung* auf Seite 36.

Die Statuswerte der Qualitätssicherung für NTC-Proben sind folgende:

- ▶ **NTC sample processing** (Verarbeitung einer NTC-Probe): Bei der Verarbeitung einer NTC-Probe wird das Ergebnis „PASS QC“ (Qualitätssicherung bestanden) angewendet, wenn die Probe, wie für NTC-Proben erwartet, eine niedrige Coverage aufweist.
- ▶ **Patient sample as NTC** (Patientenprobe als NTC): Bei der Verarbeitung einer als NTC markierten Patientenprobe wird eine hohe Coverage festgestellt. Da die Probe als NTC markiert ist, wird der Qualitätssicherungsstatus „FAIL“ (Nicht bestanden) mit folgendem Grund angegeben: NTC SAMPLE WITH HIGH COVERAGE (NTC-Probe mit hoher Coverage).

VeriSeq Onsite Server

Der VeriSeq Onsite Server läuft unter einem auf Linux basierenden Betriebssystem und bietet ca. 7,5 TB Speicherkapazität für Daten. Unter Zugrundelegung eines Datenumfangs von 25 GB pro Sequenzierungslauf kann der Server bis zu 300 Läufe speichern. Eine automatisch generierte Benachrichtigung wird gesendet, wenn die Mindestspeicherkapazität nicht zur Verfügung steht. Der Server wird im LAN installiert.

Archivierung von Daten

Illumina empfiehlt die Archivierung der Verzeichnisse /data01/runs und /data01/analysis_output entsprechend der lokalen IT-Site-Archivierungsrichtlinie. Die Assay Software überwacht den verbleibenden Speicherplatz im Verzeichnis /data01/runs und benachrichtigt den Benutzer per E-Mail, wenn die Speicherkapazität unter 1 TB sinkt.

Der Onsite Server ist nicht für die Speicherung von Daten vorgesehen. Übertragen Sie die Daten auf den Analysis Server und archivieren Sie sie in regelmäßigen Abständen an einem anderen Speicherort.

Ein typischer, mit dem cfDNA-Analyse-Workflow kompatibler Sequenzierungslauf benötigt 25–30 GB für die Durchführung auf einem Sequenzierer der nächsten Generation. Die tatsächliche Größe des Laufordners hängt von der endgültigen Clusterdichte ab. Der Server bietet mehr als 7,5 TB an Speicherplatz, also ausreichend Speicherplatz für etwa 300 Sequenzierungsläufe.

Archivieren Sie Daten nur dann, wenn sich das System im Leerlauf befindet und keine Analyse- oder Sequenzierungsläufe durchgeführt werden.

Lokale Festplatte

Die Assay Software macht dem Benutzer bestimmte Ordner auf dem Onsite Server zugänglich. Diese Ordner können mithilfe des Samba-Freigabeprotokolls jeder Workstation oder jedem Laptop im lokalen Netzwerk zugeordnet werden.

Ordnername	Beschreibung	Zugang
Input (Eingabe)	Enthält Sequenzierungsdaten, die von dem dem Server zugeordneten Sequenziersystem der nächsten Generation generiert wurden	Lese- und Schreibzugriff
Output (Ausgabe)	Enthält alle von der Software generierten Berichte	Nur Lesezugriff
Backup	Enthält Datenbank-Backups	Nur Lesezugriff



HINWEIS

Die Zuordnung der lokalen Festplatte basiert auf dem SMB-Protokoll (Server Message Block). Die Software unterstützt derzeit die Versionen SMB1 und SMB2. Vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Gerät (Laptop/Workstation), das Sie zuordnen, aktiviert sind.

Lokale Datenbank

Die Assay Software verfügt über eine lokale Datenbank, in der die Bibliotheksinformationen, die Informationen zu Sequenzierungsläufen und die Analyseergebnisse gespeichert sind. Die Datenbank ist ein integraler Bestandteil der Assay Software und für den Benutzer nicht zugänglich. Das System enthält einen automatischen Mechanismus für Datenbank-Backups auf dem Onsite Server. Zusätzlich zu den folgenden Datenbankprozessen wird empfohlen, die Datenbank regelmäßig an einem externen Speicherort zu sichern.

- ▶ **Datenbank-Backup:** Eine Momentaufnahme der Datenbank wird automatisch stündlich, täglich und monatlich gespeichert. Stündliche Backups werden entfernt, sobald ein tägliches Backup erstellt wurde. Ebenso werden die täglichen Backups entfernt, wenn die wöchentliche Sicherung abgeschlossen ist. Die wöchentlichen Backups werden entfernt, sobald ein monatliches Backup erstellt wurde, und nur ein monatliches Backup wird aufbewahrt. Es wird empfohlen, ein automatisiertes Skript zu erstellen, das den Backup-Ordner im lokalen NAS-System speichert.
- ▶ **Datenbank-Wiederherstellung:** Die Datenbank kann von jeder beliebigen Backup-Momentaufnahme wiederhergestellt werden. Wiederherstellungen werden ausschließlich von Illumina-Servicetechnikern durchgeführt.

- ▶ **Datensicherung:** Obwohl der Onsite Server als Hauptspeicherort für Sequenzierungsläufe verwendet werden kann, bietet er Speicherplatz für nur ca. 300 Läufe. Illumina empfiehlt die Einrichtung einer automatisierten Datensicherung, die in regelmäßigen Intervallen durchgeführt wird und Daten auf einem anderen permanenten Speichergerät oder im NAS-System speichert.
- ▶ **Wartung:** Abgesehen von der Datensicherung muss der Benutzer keine weiteren Wartungsarbeiten am Onsite Server durchführen. Updates für die Assay Software bzw. den Onsite Server selbst werden vom technischen Support von Illumina bereitgestellt.

Zuordnen von Serverlaufwerken

Der Onsite Server verfügt über drei Ordner, die jedem beliebigen Windows-Computer individuell zugeordnet werden können:

- ▶ **input** (Eingabe): Wird den Sequenzierungsdatenordnern zugeordnet. Aktivieren Sie das Laufwerk auf dem Computer, der mit dem Sequenziersystem verbunden ist. Konfigurieren Sie das Sequenziersystem so, dass es Daten in den Ordner „input“ streamt.
- ▶ **output** (Ausgabe): Wird den Serveranalyse- und Assay-Prozessberichten zugeordnet.
- ▶ **backup** (Backup): Wird den Datenbank-Backupdateien zugeordnet.

So ordnen Sie jeden Ordner zu:

- 1 Melden Sie sich beim Computer im Onsite-Server-Subnetzwerk an.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Computer** und wählen Sie **Map network drive** (Netzwerklaufwerk verbinden).
- 3 Wählen Sie einen Buchstaben aus der Dropdown-Liste „Drive“ (Laufwerk) aus.
- 4 Geben Sie im Feld „Folder“ (Ordner) „\\<IP-Adresse des VeriSeq Onsite Servers>\<Ordnername>“ ein.
Beispiel: \\10.50.132.92\input.
- 5 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
Erfolgreich zugeordnete Ordner werden auf dem Computer als gemountet angezeigt.



HINWEIS

Die Zuordnung der lokalen Festplatte basiert auf dem SMB-Protokoll (Server Message Block). Die Software unterstützt derzeit die Versionen SMB1 und SMB2. Vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Gerät (Laptop/Workstation), das Sie zuordnen, aktiviert sind.

Abmelden

- ▶ Wählen Sie das Benutzerprofilsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und klicken Sie auf **Log Out** (Abmelden).

Durchführen eines Server-Neustarts



HINWEIS

Nur Servicetechniker und Administratoren verfügen über die entsprechende Berechtigung zum Neustarten des Servers.

So starten Sie den Server neu:

- 1 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Settings** (Einstellungen) die Option **Reboot Server** (Server neu starten) aus.
- 2 Wählen Sie **Reboot** (Neu starten), um das System neu zu starten, bzw. **Cancel** (Abbrechen), um den Vorgang abzubrechen.
- 3 Geben Sie den Grund für das Herunterfahren des Servers ein.
Der Grund wird zu Fehlerbehebungszwecken protokolliert.



HINWEIS

Ein Neustart des Systems kann mehrere Minuten dauern.

Herunterfahren des Servers



HINWEIS

Nur Servicetechniker und Administratoren verfügen über die entsprechende Berechtigung zum Herunterfahren des Servers.

So fahren Sie den Onsite Server herunter:

- 1 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Settings** (Einstellungen) die Option **Shut Down Server** (Server herunterfahren).
- 2 Wählen Sie **Shut Down** (Herunterfahren), um den Onsite Server herunterzufahren, oder wählen Sie **Cancel** (Abbrechen), um den Vorgang abzubrechen.
- 3 Geben Sie den Grund für das Herunterfahren des Onsite Servers an.
Der Grund wird zu Fehlerbehebungszwecken protokolliert.

Wiederherstellung nach unerwartetem Ausschalten

Falls während des Analyselaufs ein Stromausfall auftritt oder der Benutzer das System versehentlich herunterfährt, geschieht Folgendes:

- ▶ Die Assay Software wird automatisch neu gestartet, wenn das System neu gestartet wird.
- ▶ Das System erkennt, dass der Analyselauf fehlgeschlagen ist, und stellt den Lauf erneut in die Verarbeitungswarteschlange.
- ▶ Das System generiert die entsprechende Ausgabe, wenn die Analyse erfolgreich durchgeführt wurde.



HINWEIS

Falls die Analyse fehlschlägt, kann das System den Lauf zwecks Analyse bis zu drei Mal erneut in die Verarbeitungswarteschlange stellen.

Metriken der Qualitätssicherung

Metriken und Grenzwerte für die Quantifizierungsqualitätssicherung	35
Metriken und Grenzwerte für die Sequenzierungsqualitätssicherung	36
Metriken und Grenzwerte für die analytische Qualitätssicherung	37
Qualitätssicherung von negativen Kontrollproben (NTC)	38

Metriken und Grenzwerte für die Quantifizierungsqualitätssicherung

Metrik	Beschreibung	Untergrenze	Obergrenze	Begründung
standard_r_squared	Bestimmtheitsmaß (R-Quadratwert) des Standardkurvenmodells	0,980	n. z.	Standardkurvenmodelle, die eine schlechte Linearität in der doppelten logarithmischen Darstellung zeigen, sind keine guten Prädiktoren für die tatsächlichen Probenkonzentrationen.
standard_slope	Bestimmtheitsmaß des Standardkurvenmodells	0,95	1,15	Standardkurvenmodelle mit Steigungswerten außerhalb des erwarteten Leistungsbereichs sind als unzuverlässig zu betrachten.
ccn_library_pg_ul	Maximal zulässige Probenkonzentration	n. z.	1.000 pg/µl	Proben, deren berechnete DNA-Konzentrationen die Spezifikationen überschreiten, weisen auf eine übermäßige genomische DNA-Kontamination hin.
median_ccn_pg_ul	Median des berechneten Konzentrationswerts für alle Proben im Batch	16 pg/µl	n. z.	Ein Sequenzierungspool mit einem entsprechenden Volumen kann nicht über eine sehr große Anzahl an übermäßig verdünnten Proben verfügen. Batches mit einer großen Anzahl an verdünnten Proben weisen auf einen Fehler bei der Probenvorbereitung hin.

Metriken und Grenzwerte für die Sequenzierungsqualitätssicherung

Metrik	Beschreibung	Untergrenze	Obergrenze	Begründung
cluster_density	Sequenzierungsclusterdichte	152.000 pro mm ²	338.000 pro mm ²	Eine Fließzelle mit geringer Clusterdichte erzeugt keine ausreichende Anzahl von Reads. Cluster-Fließzellen mit zu hoher Clusterdichte generieren in der Regel Sequenzierungsdaten von geringer Qualität.
pct_pf	Prozentsatz der Reads, die den Reinheitsfilter passieren	≥ 50 %	n. z.	Fließzellen mit extrem niedrigem prozentuaem PF-Wert können eine fehlerhafte Basendarstellung aufweisen und deuten auf Probleme mit PF-Reads hin.
prephasing	Anteil der Vorphasierung	n. z.	≤ 0,003	Empirisch optimierte Empfehlungen für VeriSeq NIPT Solution.
phasing	Anteil der Phasierung	n. z.	≤ 0,004	Empirisch optimierte Empfehlungen für VeriSeq NIPT Solution.
predicted_aligned_reads	Geschätzte durchschnittliche Anzahl der eindeutig zugeordneten Fragmente pro Probe	≥ 4.000.000	n. z.	Ermittelt als minimale, über die Normalbevölkerung beobachtete NES.

Metriken und Grenzwerte für die analytische Qualitätssicherung

Kategorie	Metrik	Untere Grenze	Obere Grenze	Fehlermeldung	Erwartete Fehlerrate	Potenzielle Ursachen
Qualitätssicherung Zählung	NonExcludedSites (aligned_reads)	2.000.000	60.000.000	FAILED iFACT (iFACT fehlgeschlagen)	<1 %	Schlechte Bibliothek oder falsche Bibliotheksquantifizierung, niedrige Clusterzahlen, ggf. nach erneuter Verarbeitung des Plasmas wiederherstellbar.
Wahrscheinlichkeitswert für Chromosomen-Denominatoren	<ul style="list-style-type: none"> • NCD_13 • NCD_18 • NCD_21 • NCD_X • NCD_Y 	<ul style="list-style-type: none"> • 17,61 • -16,40 • -17,20 • -14,89 • -42,97 	10.000 (für alle)	DATA OUTSIDE OF EXPECTED RANGE (Daten außerhalb des erwarteten Bereichs)	<0,2 %	Unerwartete Chromosomendarstellung irgendwo im Genom, wahrscheinlich nicht durch erneute Verarbeitung der Probe zu lösen. Möglicher Grund: Daten außerhalb des erwarteten Bereichs.
Verteilung der Fragmentgröße	FragSizeDist (frag_size_dist)	0	0,07	FRAGMENT SIZE DISTRIBUTION OUTSIDE OF EXPECTED RANGE (Verteilung der Fragmentgröße außerhalb des erwarteten Bereichs)	<1 %	Unerwartete Verteilung der Fragmentgrößen. Mögliche Gründe: Fehler bei der Größenauswahl, niedrige Coverage, beeinträchtigte Probe.
Coverage in Relation zur fetalen Fraktion	NES_FF_QC	0	1,5	FAILED iFACT (iFACT fehlgeschlagen)	ca. 1,2 %	Unzureichende Coverage im Vergleich zur fetalen Fraktion.

Qualitätssicherung von negativen Kontrollproben (NTC)

VeriSeq NIPT Solution ermöglicht es Ihnen, NTC-Proben zu Ihrem Lauf hinzuzufügen. ML STAR kann pro Lauf bis zu zwei NTC-Proben für Batches mit 48 Proben und bis zu vier NTC-Proben für Batches mit 96 Proben generieren. Unabhängig von der Anzahl an NTC-Proben, die Sie hinzufügen, prüft die Software auf durchschnittlich mindestens 4.000.000 eindeutig zugeordnete Fragmente pro Probe und pro Pool. Fügen Sie daher nicht mehr als zwei NTC-Proben pro Pool hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter *Metriken und Grenzwerte für die Sequenzierungsqualitätssicherung auf Seite 36*.

Die Statuswerte der Qualitätssicherung für NTC-Proben sind folgende:

- ▶ **NTC sample processing** (Verarbeitung einer NCT-Probe): Bei der Verarbeitung einer NTC-Probe wird das Ergebnis „PASS QC“ (Qualitätssicherung bestanden) angewendet, wenn die Probe, wie für NTC-Proben erwartet, eine niedrige Coverage aufweist.
- ▶ **Patient sample as NTC** (Patientenprobe als NTC): Bei der Verarbeitung einer als NTC markierten Patientenprobe wird eine hohe Coverage festgestellt. Da die Probe als NTC markiert ist, wird der Qualitätssicherungsstatus „FAIL“ (Nicht bestanden) mit folgendem Grund angegeben: NTC SAMPLE WITH HIGH COVERAGE (NTC-Probe mit hoher Coverage).

Systemberichte

Einleitung	39
Übersicht über die Systemberichte	40
Ereignisse für das Erstellen von Berichten	41
Berichte zu Ergebnissen und Benachrichtigungen	43
Prozessberichte	49

Einleitung

Die Assay Software erstellt zwei Kategorien von Berichten:

- ▶ Berichte zu Ergebnissen und Benachrichtigungen
- ▶ Prozessberichte

Es gibt außerdem zwei Berichtstypen:

- ▶ **Zur Information:** Die prozessspezifischen Berichte enthalten Informationen zum Assay-Fortschritt. Anhand dieser Berichte können Sie prüfen, ob ein spezifischer Schritt abgeschlossen wurde. In diesen Berichten finden Sie auch die Qualitätssicherungsergebnisse und die ID-Nummern.
- ▶ **Aktion erforderlich:** Die Generierung dieser asynchronen Berichte erfolgt nach einem Systemereignis oder einer Benutzeraktion, das bzw. die die Aufmerksamkeit des Benutzers erfordert.

Im folgenden Abschnitt finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Berichte und die Berichtsdetails für die LIMS-Integration.

Ausgabedateien


Die Assay Software-Berichte werden auf dem internen Laufwerk des Onsite Servers generiert, das als schreibgeschützter Ordner „Output“ (Ausgabe) dem Benutzerlaufwerk zugeordnet ist. Jeder Bericht wird mit einer entsprechenden Standard-MD5-Prüfsumme erstellt, die sicherstellt, dass die Datei nicht geändert wurde.

Die Berichte sind tabulatorgetrennte Textdateien. Sie können mit einem beliebigen Texteditor oder mit einem entsprechenden Programm zum Lesen von tabulatorgetrennten Dokumenten, wie z. B. Microsoft Excel, geöffnet werden.

Struktur der Berichtsdateien

Die Assay Software speichert Berichte in einer bestimmten Struktur im Ordner „Output“ (Ausgabe).

Abbildung 5 Ordnerstruktur der Assay Software-Berichte

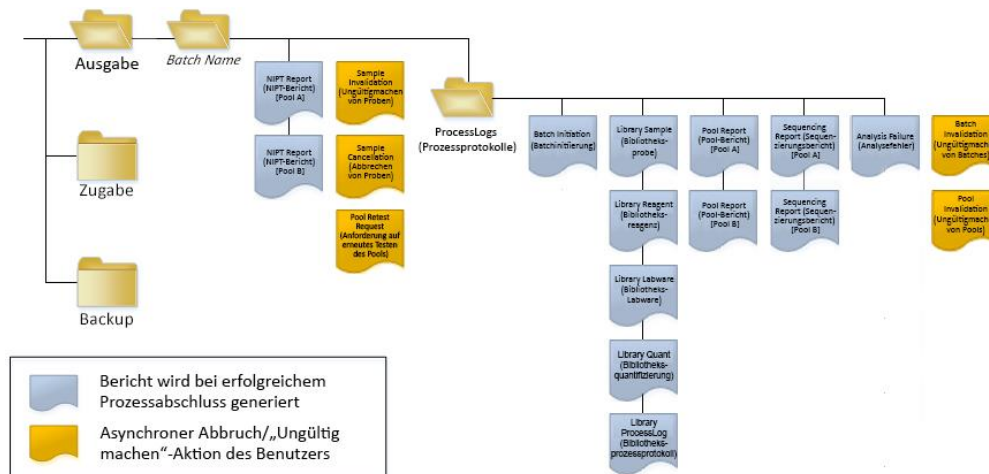

Die Assay Software speichert Berichte im Ordner *Batchname* mit der folgenden Struktur:

- ▶ **Hauptordner (Ordner mit dem Batchnamen):** Enthält Ergebnisberichte und Berichte in Verbindung mit LIMS-generierten E-Mail-Benachrichtigungen. Weitere Informationen finden Sie unter *Berichte zu Ergebnissen und Benachrichtigungen* auf Seite 43.
- ▶ **Ordner „ProcessLogs“ (Prozessprotokolle):** Enthält Berichte, die sich auf den Prozess beziehen. Weitere Informationen finden Sie unter *Prozessberichte* auf Seite 49

Eine Liste aller Berichte finden Sie unter *Übersicht über die Systemberichte* auf Seite 40.

Übersicht über die Systemberichte

Name des Berichts	Berichtstyp	Berichtseinheit	Format des Berichtsdateinamens
<i>NIPT Report (NIPT-Bericht)</i>	Aktion erforderlich	Pool/Fließzelle	<Batchname>_A_<Pool-Barcode>_<Fließzelle>_nipt_report_20150528_163503.tab
<i>Sample Invalidation Report (Bericht zum Ungültigmachen von Proben)</i>	Aktion erforderlich	Probe	<Batchname>_<Proben-Barcode>_sample_invalidation_report_20150528_163503.tab
<i>Sample Cancellation Report (Bericht zum Abbrechen von Proben)</i>	Aktion erforderlich	Probe	<Batchname>_<Proben-Barcode>_sample_cancellation_report_20150528_163503.tab
<i>Pool Retest Request Report (Bericht über die Anforderung auf erneutes Testen des Pools)</i>	Aktion erforderlich	Pool	<Batchname>_<Pooltyp>_pool_retest_request_20150528_163503.tab
<i>Batch Initiation Report (Bericht zur Batchinitiiierung)</i>	Zur Information	Batch	ProcessLogs/<Batchname>_batch_initiation_report_20150528_163503.tab
<i>Batch Invalidation Report (Bericht zum Ungültigmachen von Batches)</i>	Zur Information	Batch	ProcessLogs/<Batchname>_batch_invalidation_report_20150528_163503.tab
<i>Library Sample Report (Bibliothekspaltenbericht)</i>	Zur Information	Batch	ProcessLogs/<Batchname>_library_sample_report_20150529_083503.tab

Name des Berichts	Berichtstyp	Berichtseinheit	Format des Berichtsdateinamens
<i>Library Reagent Report (Bibliotheksreagenzbericht)</i>	Zur Information	Batch	ProcessLogs/<Batchname>_library_reagent_report_20150529_163503.tab
<i>Library Labware Report (Bibliotheks-Labware-Bericht)</i>	Zur Information	Batch	ProcessLogs/<Batchname>_library_labware_report_20150518_163503.tab
<i>Library Quant Report (Bibliotheksquantifizierungsbericht)</i>	Zur Information	Batch	ProcessLogs/<Batchname>_library_quant_report_20150518_163503.tab
<i>Library Process Log (Bibliotheksprozessprotokoll)</i>	Zur Information	Batch	ProcessLogs/<Batchname>_library_process_log.tab
<i>Pool Report (Pool-Bericht)</i>	Zur Information	Pool	ProcessLogs/<Batchname>_<Pool-Barcode>_pool_report_20150528_163503.tab
<i>Pool Invalidation Report (Bericht zum Ungültigmachen von Pools)</i>	Zur Information	Pool	ProcessLogs/<Batchname>_<Pool-Barcode>_pool_invalidation_report_20150528_163503.tab
<i>Sequencing Report (Sequenzierungsbericht)</i>	Zur Information	Pool/Fließzelle	ProcessLogs/<Batchname>_A_<Pool-Barcode>_<Fließzelle>_sequencing_report_20150528_163503.tab ProcessLogs/<Batchname>_B_<Pool-Barcode>_<Fließzelle>_sequencing_report_20150528_163503.tab
<i>Analysis Failure Report (Analysefehlerbericht)</i>	Zur Information	Pool/Fließzelle	ProcessLogs/<Batchname>_<Pool-Barcode>_analysis_failure_report_20150528_163503.tab

Ereignisse für das Erstellen von Berichten

Bericht	Beschreibung	Ereignis für die Erstellung
NIPT	Enthält die endgültigen Ergebnisse eines erfolgreichen Analyselaufs.	<ul style="list-style-type: none"> Sequenzierungslaufanalyse ist beendet.
Sample Invalidation (Ungültigmachen von Proben)	Enthält Informationen über eine ungültig gemachte Probe.	<ul style="list-style-type: none"> Benutzer macht eine Probe ungültig.
Sample Cancelation (Abbrechen von Proben)	Enthält Informationen über eine abgebrochene Probe.	<ul style="list-style-type: none"> Benutzer bricht eine Probe ab.
Pool Retest Request (Anforderung auf erneutes Testen des Pools)	Gibt an, dass aus einem vorhandenen Batch ein zweiter Pool generiert werden kann. Enthält Informationen über den Status des erneuten Testens des Pools. ¹	<ul style="list-style-type: none"> Benutzer macht einen Pool ungültig.
Batch Initiation (Batchinitiierung)	Gibt den Beginn einer neuen Batchverarbeitung an.	<ul style="list-style-type: none"> Benutzer initiiert einen neuen Batch.
Batch Invalidation (Ungültigmachen von Batches)	Enthält Informationen über einen vom Benutzer initiierten und ungültig gemachten Batch.	<ul style="list-style-type: none"> Batch wird ungültig gemacht.
Library Sample (Bibliotheksprobe)	Enthält eine Liste mit allen Proben im Batch.	<ul style="list-style-type: none"> Batch wird ungültig gemacht. Bibliotheksvorbereitung ist abgeschlossen. Quantifizierung des Batches schlägt fehl.

Bericht	Beschreibung	Ereignis für die Erstellung
Library Reagent (Bibliotheksreagenz)	Enthält Reagenzinformationen über die Bibliotheksverarbeitung.	<ul style="list-style-type: none"> • Batch wird ungültig gemacht. • Bibliotheksvorbereitung ist abgeschlossen. • Quantifizierung des Batches schlägt fehl.
Library Labware (Bibliotheks-Labware)	Enthält Labware-Informationen über die Bibliotheksverarbeitung.	<ul style="list-style-type: none"> • Batch wird ungültig gemacht. • Bibliotheksvorbereitung ist abgeschlossen. • Quantifizierung des Batches schlägt fehl.
Library Quant (Bibliotheksquantifizierung)	Enthält Testergebnisse der Bibliotheksquantifizierung.	<ul style="list-style-type: none"> • Batch wird ungültig gemacht. • Bibliotheksvorbereitung ist abgeschlossen. • Quantifizierung des Batches schlägt fehl.
Library Process Log (Bibliotheksprozessprotokoll)	Enthält die während der Bibliotheksverarbeitung ausgeführten Schritte.	<ul style="list-style-type: none"> • Batch wird ungültig gemacht. • Bibliotheksvorbereitung ist abgeschlossen. • Quantifizierung des Batches schlägt fehl. • Batchprozess ist abgeschlossen.
Pool	Enthält Proben-Pooling-Volumina.	<ul style="list-style-type: none"> • Pooling ist abgeschlossen.
Pool Invalidation (Ungültigmachen von Pools)	Enthält Informationen über einen vom Benutzer initiierten und ungültig gemachten Pool.	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzer macht einen Pool ungültig.
Sequenzierung	Enthält die Ergebnisse der Sequenzierungsqualitätssicherung.	<ul style="list-style-type: none"> • Sequenzierungsqualitätssicherung bestanden. • Zeitüberschreitung bei der Sequenzierung (fehlgeschlagen).
Analysis Failure (Analysefehler)	Enthält Analyseinformationen zu einem fehlgeschlagenen Pool.	<ul style="list-style-type: none"> • Sequenzierungslaufanalyse ist fehlgeschlagen.

¹ Benutzer macht einen Pool von einem gültigen Batch, der die maximale Anzahl der Pools nicht überschritten hat, ungültig.

Berichte zu Ergebnissen und Benachrichtigungen

NIPT Report (NIPT-Bericht)

Der „NIPT Report“ (NIPT-Bericht) enthält die Chromosomenklassifizierungsergebnisse, die für jede Probe im Pool als eine Probe pro Zeile aufgeführt werden.

Spalte	Beschreibung	Voreinstellungsoptionen	Typ	Regulärer Ausdruck
batch_name	Batchname	n. z.	text	^[a-zA-Z0-9_]{1,36}\$
sample_barcode	Eindeutiger Barcode der Probe	n. z.	text	^[a-zA-Z0-9_]{1,36}\$
sample_type	Vom Sammlungspunkt bereitgestellte Informationen über den Probentyp. Legt die Darstellung der Aneuploidieklassifizierung fest.	Einer der folgenden Werte: <ul style="list-style-type: none"> • Singleton (Einling): Einlingsschwangerschaft • Twin (Zwilling): Mehrlingsschwangerschaft • Control (Kontrolle): Kontrollprobe von bekanntem Geschlecht und Aneuploidieklassifizierung • NTC: Negativkontrollprobe (keine DNA) 	enum	Unter „Voreinstellungsoptionen“ angegebene Werte
sex_chrom	Analyse der Geschlechtschromosomen angefordert. Legt die Darstellung der Aneuploidieklassifizierung fest.	Einer der folgenden Werte: <ul style="list-style-type: none"> • yes (ja): Bericht zur Aneuploidie der Geschlechtschromosomen und Geschlechtsbericht angefordert • no (nein): Weder Bericht zur Aneuploidie der Geschlechtschromosomen noch Geschlechtsbericht angefordert • sca: Bericht zur Aneuploidie der Geschlechtschromosomen angefordert, Geschlechtsbericht nicht angefordert 	enum	Unter „Voreinstellungsoptionen“ angegebene Werte
flowcell	Barcode der Sequenzierungsfließzelle	n. z.	text	n. z.
class_13	Aneuploidieklassifizierungsergebnisse für Chromosom 13	Einer der folgenden Werte: <ul style="list-style-type: none"> • ANEUPLOIDY DETECTED (Aneuploidie festgestellt) • NO ANEUPLOIDY DETECTED (Keine Aneuploidie festgestellt) • CANCELLED (Abgebrochen) • INVALIDATED (Ungültig gemacht) • NA (n. z.) 	class_13	Aneuploidieklassifizierungsergebnisse für Chromosom 13

Spalte	Beschreibung	Voreinstellungsoptionen	Typ	Regulärer Ausdruck
class_18	Aneuploidieklassifizierungsergebnisse für Chromosom 18	Einer der folgenden Werte: <ul style="list-style-type: none"> • ANEUPLOIDY DETECTED (Aneuploidie festgestellt) • NO ANEUPLOIDY DETECTED (Keine Aneuploidie festgestellt) • CANCELLED (Abgebrochen) • INVALIDATED (Ungültig gemacht) • NA (n. z.) 	class_18	Aneuploidieklassifizierungsergebnisse für Chromosom 18
class_21	Aneuploidieklassifizierungsergebnisse für Chromosom 21	Einer der folgenden Werte: <ul style="list-style-type: none"> • ANEUPLOIDY DETECTED (Aneuploidie festgestellt) • NO ANEUPLOIDY DETECTED (Keine Aneuploidie festgestellt) • CANCELLED (Abgebrochen) • INVALIDATED (Ungültig gemacht) • NA (n. z.) 	class_21	Aneuploidieklassifizierungsergebnisse für Chromosom 21

Spalte	Beschreibung	Voreinstellungsoptionen	Typ	Regulärer Ausdruck
class_sx	Geschlechtschromosomen-Aneuploidieklassifizierung	<p>Einer der folgenden Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANEUPLOIDY DETECTED – XO (Aneuploidie festgestellt – XO): Monosomie X • ANEUPLOIDY DETECTED – XXX (Aneuploidie festgestellt – XXX): Trisomie X • ANEUPLOIDY DETECTED – XXY (Aneuploidie festgestellt – XXY): zwei X-Chromosomen beim Mann • ANEUPLOIDY DETECTED – XYY (Aneuploidie festgestellt – XYY): zwei Y-Chromosomen • NO ANEUPLOIDY DETECTED (Keine Aneuploidie festgestellt): Negative Probe und Geschlecht nicht angegeben • NO ANEUPLOIDY DETECTED – XX (Keine Aneuploidie festgestellt – XX): Negative Probe bei weiblichem Fetus • NO ANEUPLOIDY DETECTED – XY (Keine Aneuploidie festgestellt – XY): Negative Probe bei männlichem Fetus • SEX CHROMOSOMES NOT REPORTABLE (Geschlechtschromosomen nicht ausweisbar): Geschlechtschromosom konnte nicht bestimmt werden • NO CHR Y PRESENT (Kein Y-Chromosom vorhanden): Zwillingsschwangerschaft ohne Y-Chromosom festgestellt • CHR Y PRESENT (Y-Chromosom vorhanden): Zwillingsschwangerschaft mit Y-Chromosom festgestellt • CANCELLED (Abgebrochen): Probe wurde durch den Benutzer abgebrochen • INVALIDATED (Ungültig gemacht): Probe hat die Qualitätssicherung nicht bestanden oder wurde vom Benutzer ungültig gemacht • NOT TESTED (Nicht getestet): Geschlechtschromosom wurde nicht getestet 	class_sx	Geschlechtschromosomen-Aneuploidieklassifizierung

Spalte	Beschreibung	Voreinstellungsoptionen	Typ	Regulärer Ausdruck
qc_flag	Ergebnisse der Qualitätssicherung der Analyse	Einer der folgenden Werte: <ul style="list-style-type: none"> • CANCELLED (Abgebrochen) • INVALIDATED (Ungültig gemacht) • PASS (Bestanden) • NTC_PASS (NTC bestanden) • FAIL (Nicht bestanden) 	enum	Unter „Voreinstellungsoptionen“ angegebene Werte
qc_failure	Informationen zum Nichtbestehen der Qualitätssicherung	Einer der folgenden Werte: <ul style="list-style-type: none"> • FAILED iFACT (iFACT fehlgeschlagen) • DATA OUTSIDE OF EXPECTED RANGE (Daten außerhalb des erwarteten Bereichs) • FRAGMENT SIZE DISTRIBUTION OUTSIDE OF EXPECTED RANGE (Verteilung der Fragmentgröße außerhalb des erwarteten Bereichs) • NTC SAMPLE WITH HIGH COVERAGE (NTC-Probe mit hoher Coverage) • CANCELLED (Abgebrochen) • INVALIDATED (Ungültig gemacht) • NONE (Ohne) (Qualitätssicherungsstatus = Pass [Bestanden]) 	text	Unter „Voreinstellungsoptionen“ angegebene Werte
FF	Geschätzte fetale Fraktion	Prozentualer Anteil der Proben-cfDNA vom Fetus (auf die nächste Ganzzahl aufgerundet). Ergebnisse unter 1 % werden als „< 1 %“ angezeigt.	text	n. z.

Meldungen zum Nichtbestehen der Qualitätssicherung

Das Nichtbestehen der Analyse-Qualitätssicherung führt zur vollständigen Unterdrückung der Ergebnisse zur Aneuploidie von Chromosomen, zur Geschlechtsklassifizierung und zur geschätzten fetalen Fraktion. Dies entspricht den folgenden Feldern im „NIPT Report“ (NIPT-Bericht): class_13, class_18, class_21, class_sx und ff.

Qualitätssicherungsfehlermeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
FAILED iFACT (iFACT fehlgeschlagen)	iFACT (individual Fetal Aneuploidy Confidence Test, individueller Zuverlässigkeitstest zur fetalen Aneuploidie): Eine Qualitätssicherungsmetrik, die die Schätzung der fetalen Fraktion mit Laufmetriken, die mit der Coverage in Zusammenhang stehen, kombiniert, um festzustellen, ob das System die statistische Zuverlässigkeit für die Durchführung eines Calls auf eine gegebene Probe aufweist	Probe neu verarbeiten
DATA OUTSIDE OF EXPECTED RANGE (Daten außerhalb des erwarteten Bereichs)	Abweichung von der euploiden Coverage nicht anvisierter Chromosomen Steht möglicherweise im Zusammenhang mit Trisomie oder Monosomie eines Zielchromosoms oder unspezifischen großen Kopienzahlvarianten über Chromosomen hinweg	Probe neu verarbeiten
FRAGMENT SIZE DISTRIBUTION OUTSIDE OF EXPECTED RANGE (Verteilung der Fragmentgröße außerhalb des erwarteten Bereichs)	Die Datenverteilung entspricht nicht der vorausgesetzten Verteilung. Mögliche Ursachen sind eine Kontamination oder eine falsche Probenverarbeitung.	Probe neu verarbeiten
NTC SAMPLE WITH HIGH COVERAGE (NTC-Probe mit hoher Coverage)	Eine NTC-Probe weist eine hohe Coverage auf (kein DNA-Material erwartet). Mögliche Ursachen sind eine Kontamination oder eine falsche Probenverarbeitung.	Probe neu verarbeiten
CANCELLED (Abgebrochen)	Probe wurde durch den Benutzer abgebrochen	n. z.
INVALIDATED (Ungültig gemacht)	Probe wurde vom Benutzer ungültig gemacht	

Sample Invalidation Report (Bericht zum Ungültigmachen von Proben)

Das System generiert für jede ungültig gemachte oder fehlgeschlagene Probe einen „Sample Invalidation Report“ (Bericht zum Ungültigmachen von Proben).

Spalte	Beschreibung	Typ	Regulärer Ausdruck
batch_name	Batchname	text	^[a-zA-Z0-9_]{1,36}\$
sample_barcode	Eindeutiger Barcode der ungültig gemachten Probe	text	^[a-zA-Z0-9_]{1,36}\$
reason	Vom Benutzer angegebener Grund für das Ungültigmachen der Probe	text	^[a-zA-Z0-9_]{1,36}\$
operator	Benutzername des Bedieners, der die Probe für ungültig bzw. fehlgeschlagen erklärt hat	text	^[a-zA-Z0-9_]{1,36}\$
timestamp	Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die Probe ungültig gemacht wurde	ISO 8601 timestamp	ISO 8601 timestamp

Sample Cancelation Report (Bericht zum Abbrechen von Proben)

Das System generiert für jede abgebrochene Probe einen „Sample Cancelation Report“ (Bericht zum Abbrechen von Proben).

Spalte	Beschreibung	Typ	Regulärer Ausdruck
batch_name	Batchname	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
sample_barcode	Eindeutiger Barcode der abgebrochenen Probe	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
reason	Vom Benutzer angegebener Grund für das Abbrechen der Probe	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
operator	Benutzername des Bedieners, der die Probe abgebrochen hat	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
timestamp	Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die Probe abgebrochen wurde	ISO 8601 timestamp	ISO 8601 timestamp

Pool Retest Request Report (Bericht über die Anforderung auf erneutes Testen des Pools)

Der „Pool Retest Request Report“ (Bericht über die Anforderung auf erneutes Testen des Pools) gibt an, dass entweder Pool A oder Pool B neu gebildet werden kann. Das System generiert einen Bericht über die Anforderung auf erneutes Testen des Pools, wenn der erste von zwei möglichen Sequenzierungsläufen (Pools) für Pool A bzw. Pool B ungültig gemacht wurde.

Spalte	Beschreibung	Typ	Regulärer Ausdruck
batch_name	Batchname	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
pool_type	Typ des Pools Mögliche Werte: A, B, C	enum	Unter „Beschreibung“ angegebene Werte
reason	Vom Benutzer angegebener Grund für das Ungültigmachen des ersten Pools	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
timestamp	Datum und Uhrzeit der Anforderung	ISO 8601 timestamp	ISO 8601 timestamp

Prozessberichte

Batch Initiation Report (Bericht zur Batchinitiierung)

Das System generiert einen „Batch Initiation Report“ (Bericht zur Batchinitiierung), wenn ein Batch initiiert und vor der Plasmatisolation erfolgreich validiert wurde.

Spalte	Beschreibung	Typ	Regulärer Ausdruck
batch_name	Batchname	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
sample_barcode	Eindeutiger Barcode der Probe	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
sample_type	Probentyp des Barcodes der Probe Mögliche Werte: „Singleton“ (Einling), „Twin“ (Zwilling), „Control“ (Kontrolle), „NTC“ (Negativkontrolle)	enum	Unter „Beschreibung“ angegebener Wert
well	Der einer Probe zugeordnete Well	text	^[a-zA-Z]{1,1}[0-9]{1,2}\$
assay	Assay-Name	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,100}\$
method_version	Version der Assay-Automatisierungsmethode	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,100}\$

Batch Invalidation Report (Bericht zum Ungültigmachen von Batches)

Das System generiert für jeden ungültig gemachten oder fehlgeschlagenen Batch einen „Batch Invalidation Report“ (Bericht zum Ungültigmachen von Batches).

Spalte	Beschreibung	Typ	Regulärer Ausdruck
batch_name	Batchname	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
reason	Vom Benutzer angegebener Grund für das Ungültigmachen des Batches	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
operator	Initialen des Bedieners, der den Batch ungültig gemacht hat	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
timestamp	Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Batch ungültig gemacht wurde	ISO 8601 timestamp	ISO 8601 timestamp

Library Sample Report (Bibliotheksprobenbericht)

Das System erstellt einen „Library Sample Report“ (Bibliotheksprobenbericht), wenn der Batch fehlschlägt oder vom Benutzer ungültig gemacht wird, nach einem erfolgreichen Bibliotheksabschluss sowie nach einem erfolgreichen Quantifizierungsabschluss.

Spalte	Beschreibung	Typ	Regulärer Ausdruck
batch_name	Batchname	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
sample_barcode	Eindeutiger Barcode der Probe	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
qc_status	Probenstatus nach Abschluss der Assay-Schritte	enum	Pass/Fail
qc_reason	Grund für den Qualitätssicherungsstatus Mögliche Werte: pass (bestanden), fail (nicht bestanden)	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
starting_volume	Anfangsvolumen des Blutsammelröhrchens bei der Plasmaisolation	float	
index	Index der Probe	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
ccn_library_pg_ul	Bibliothekskonzentration in pg/µl	float	
plasma_isolation_comments	Benutzerkommentare beim Durchführen der Plasmaisolation (freier Text)	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
cfdna_extraction_comments	Benutzerkommentare beim Durchführen der cfDNA-Extraktion (freier Text)	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
library_prep_comments	Benutzerkommentare beim Durchführen der Bibliotheksvorbereitung (freier Text)	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
quantitation_comments	Benutzerkommentare beim Durchführen der Quantifizierung (freier Text)	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$

Library Reagent Report (Bibliotheksreagenzbericht)

Das System erstellt einen „Library Reagent Report“ (Bibliotheksreagenzbericht), wenn der Batch fehlschlägt oder vom Benutzer ungültig gemacht wird, nach einem erfolgreichen Bibliotheksabschluss sowie nach einem erfolgreichen Quantifizierungsabschluss.

Spalte	Beschreibung	Typ	Regulärer Ausdruck
batch_name	Batchname	text	^[a-zA-Z0-9_]{1,36}\$
process	Prozessname. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> • ISOLATION: batch_validation, prespin, postspin, data_transact • EXTRACTION (Extraktion): setup, chemistry, data_transact • LIBRARY (Bibliothek): setup, chemistry, data_transact, complete • QUANT (Quantifizierung): setup, build_standards, build_384, analysis, data_transact • POOLING: analysis, setup, pooling, data_transact, complete 	text	^[a-zA-Z0-9_]{1,36}\$
reagent_name	Name des Reagenz	text	^[a-zA-Z0-9_]{1,36}\$
lot	Reagenz-Barcode	text	^[a-zA-Z0-9_]{1,36}\$
expiration_date	Verfallsdatum im Herstellerformat	text	^[a-zA-Z0-9:/_]{1,100}\$
operator	Benutzername des Bedieners	text	^[a-zA-Z0-9_]{1,36}\$
initiated	Initiierungszeitstempel des Reagenz	ISO 8601 timestamp	ISO 8601 timestamp

Library Labware Report (Bibliotheks-Labware-Bericht)

Im Falle eines Fehlers oder der Ungültigmachung eines Batches, nach erfolgreichem Bibliotheksabschluss und nach erfolgreichem Quantifizierungsabschluss generiert das System einen „Library Labware Report“ (Bibliotheks-Labware-Bericht).

Spalte	Beschreibung	Typ	Regulärer Ausdruck
batch_name	Batchname	text	^[a-zA-Z0-9_]{1,36}\$
labware_name	Labware-Name	text	^[a-zA-Z0-9_]{1,36}\$
labware_barcode	Labware-Barcode	text	^[a-zA-Z0-9_]{1,36}\$
initiated	Initiierungszeitstempel der Labware	ISO 8601 timestamp	ISO 8601 timestamp

Library Quant Report (Bibliotheksquantifizierungsbericht)

Das System generiert bei einem erfolgreichen Abschluss der Quantifizierung einen „Library Quant Report“ (Bibliotheksquantifizierungsbericht).

Spalte	Beschreibung	Typ	Regulärer Ausdruck
batch_name	Batchname	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
quant_id	Numerische ID	long	
instrument	Name des Quantifizierungsgeräts (freier Text)	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
standard_r_squared	R-Quadrat	float	
standard_intercept	Regressionskonstante	float	
standard_slope	Steigungswert	float	
median_ccn_pg_ul	Median der Probenkonzentration	float	
qc_status	Status der Qualitätssicherung der Quantifizierung	enum	Pass/Fail
qc_reason	Ggf. Beschreibung der Fehlerursache	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
initiated	Initiierungszeitstempel der Quantifizierung	ISO 8601 timestamp	ISO 8601 timestamp

Library Process Log (Bibliotheksprozessprotokoll)

Das System generiert ein „Library Process Log“ (Bibliotheksprozessprotokoll) zu Beginn, am Ende und beim Fehlschlagen eines jeden Batchprozesses sowie im Falle des Fehlschlagens oder der Ungültigmachung eines Batches und nach Abschluss der Analyse (pro Pool generiert).

Spalte	Beschreibung	Typ	Regulärer Ausdruck
batch_name	Batchname	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
process	Name des Batch-Prozesses. Mögliche Werte: ISOLATION : batch_validation, prespin, postspin, data_transact EXTRACTION (Extraktion): setup, chemistry, data_transact LIBRARY (Bibliothek): setup, chemistry, data_transact, complete QUANT (Quantifizierung): setup, build_standards, build_384, analysis, data_transact POOLING : analysis, setup, pooling, data_transact, complete	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
operator	Initialen des Bedieners	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
instrument	Gerätename	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
started	Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Batchprozess gestartet wurde.	ISO 8601 timestamp	ISO 8601 timestamp
finished	Datum und Uhrzeit des Abschlusses des Batchprozesses oder -fehlers	ISO 8601 timestamp	ISO 8601 timestamp

Spalte	Beschreibung	Typ	Regulärer Ausdruck
status	Aktueller Batch Mögliche Werte: completed (abgeschlossen), failed (fehlgeschlagen), started (gestartet), aborted (abgebrochen)	enum	Unter „Beschreibung“ angegebene Werte

Pool Report (Pool-Bericht)

Das System generiert einen „Pool Report“ (Pool-Bericht) nach erfolgreichem Bibliotheksabschluss, bei Batchfehlern und nachdem ein Batch ungültig gemacht wurde, sofern das Ereignis nach dem Beginn des Poolings auftritt.

Spalte	Beschreibung	Typ	Regulärer Ausdruck
batch_name	Batchname	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
sample_barcode	Eindeutiger Barcode der Probe	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
pool_barcode	Pool-Barcode, der der Probe zugeordnet ist	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
pool_type	Pooltyp, der der Probe zugeordnet ist Mögliche Werte: A, B, C	enum	Unter „Beschreibung“ angegebene Werte
pooling_volume_ul	Pooling-Volumen in µl	float	
pooling_comments	Benutzerkommentare beim Durchführen des Poolings (freier Text)	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$

Pool Invalidation Report (Bericht zum Ungültigmachen von Pools)

Das System generiert einen „Pool Invalidation Report“ (Bericht zum Ungültigmachen von Pools), wenn der Pool ungültig gemacht wurde.

Spalte	Beschreibung	Typ	Regulärer Ausdruck
batch_name	Batchname	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
pool_barcode	Pool-Barcode des ungültig gemachten Pools	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
reason	Vom Benutzer angegebener Grund für das Ungültigmachen des Pools	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
operator	Initialen des Bedieners, der den Pool ungültig gemacht hat	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
timestamp	Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Pool ungültig gemacht wurde	ISO 8601 timestamp	ISO 8601 timestamp

Sequencing Report (Sequenzierungsbericht)

Nach Abschluss der Sequenzierung oder nach Ablauf der Sequenzierungszeit generiert das System einen „Sequencing Report“ (Sequenzierungsbericht) für den Sequenzierungslauf.

Spalte	Beschreibung	Typ	Regulärer Ausdruck
batch_name	Batchname	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
pool_barcode	Der dem Sequenzierungslauf zugeordnete Pool-Barcode	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
instrument	Seriennummer des Sequenzierers	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
flowcell	Die dem Sequenzierungslauf zugeordnete Fließzelle	text	n. z.
software_version	Aneinanderreihung von Softwareanwendung/Version, die für die Analyse der Daten auf dem Gerät verwendet wird	text	
run_folder	Name des Sequenzierungslaufordners	text	
sequencing_status	Status des Sequenzierungslaufs Mögliche Werte: completed (abgeschlossen), timed out (Zeit überschritten)	enum	Unter „Beschreibung“ angegebene Werte
qc_status	Status der Qualitätssicherung für den Sequenzierungslauf Mögliche Werte: pass (bestanden), fail (nicht bestanden)	enum	Unter „Beschreibung“ angegebene Werte
qc_reason	Gründe für den Fehlschlag der Qualitätssicherung, durch Semikolon getrennte Werte	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
cluster_density	Clusterdichte (Median pro Fließzelle, plattenübergreifend)	float	
pct_q30	Prozentsatz der Basen über Q30	float	
pct_pf	Prozentsatz der Reads nach Filterung	float	
phasing	Phasierung	float	
prephasing	Vorphasierung	float	
predicted_aligned_reads	Prognostizierte alignierte Reads	float	
started	Systemdatum und -zeit, die dem Beginn der Sequenzierung zugeordnet werden	ISO 8601 timestamp	ISO 8601 timestamp
completed	Systemdatum und -zeit, die dem Ende der Sequenzierung zugeordnet werden	ISO 8601 timestamp	ISO 8601 timestamp

Analysis Failure Report (Analysefehlerbericht)

Das System generiert einen „Analysis Failure Report“ (Analysefehlerbericht), wenn die maximale Anzahl der Analyseversuche für den Sequenzierungslauf fehlgeschlagen ist.

Spalte	Beschreibung	Typ	Regulärer Ausdruck
batch_name	Batchname	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
pool_barcode	Pool-Barcode, der der fehlgeschlagenen Analyse zugeordnet wird	text	^[a-zA-Z0-9_-]{1,36}\$
flowcell	Fließzellen-Barcode, der der fehlgeschlagenen Analyse zugeordnet wird	text	n. z.
sequencing_run_folder	Sequenzierungslauf-Status, der der fehlgeschlagenen Analyse zugeordnet wird	text	
analysis_run_status	Sequenzierungslauf-Status, der der fehlgeschlagenen Analyse zugeordnet wird Mögliche Werte: failed_max_analysis_attempts	text	Unter „Beschreibung“ angegebene Werte
timestarted	Systemdatum und -zeit, die dem Beginn der Analyse zugeordnet werden	ISO 8601 timestamp	ISO 8601 timestamp
timefinished	Systemdatum und -zeit, die der fehlgeschlagenen Analyse zugeordnet werden	ISO 8601 timestamp	ISO 8601 timestamp

Fehlerbehebung

Einleitung	56
Benachrichtigungen der Assay Software	56
Systemprobleme	65
Datenverarbeitungstests	66

Einleitung

Die Unterstützung bei Problemen mit VeriSeq NIPT Solution umfasst Folgendes:

- ▶ Assay Software und Systembenachrichtigungen
- ▶ Empfohlene Aktionen bei Systemproblemen
- ▶ Anweisungen zur Durchführung von präventiven und Fehleranalysen mit vorinstallierten Testdaten

Benachrichtigungen der Assay Software

In diesem Abschnitt werden die Benachrichtigungen der Assay Software erläutert:

Fortschrittsbenachrichtigungen

Fortschrittsbenachrichtigungen geben den normalen Fortschritt der Assay-Ausführung an. Diese Benachrichtigungen werden als „Activities“ (Aktivitäten) protokolliert und erfordern keine Benutzeraktionen.

Benachrichtigung	Schritt	Zeitpunkt	Alarmstufe	E-Mail	Empfohlene Maßnahme
Batch Initiation (Batchinitiierung)	Bibliotheksvorbereitung	Benutzer hat einen neuen Batch erstellt	Aktivität	Ja	n. z.
Batch Library Complete (Batch-Bibliothek abgeschlossen)	Bibliotheksvorbereitung	Bibliothek für den aktuellen Batch abgeschlossen	Aktivität	Nein	n. z.
Pool Complete (Pool abgeschlossen)	Bibliotheksvorbereitung	Pool wurde aus einem Batch generiert	Aktivität	Nein	n. z.
Sequencing Started (Sequenzierung gestartet)	Sequenzierung	Das System hat einen neuen Sequenzierungsdatenordner erkannt.	Aktivität	Nein	n. z.
Sequencing QC passed (Sequenzierungsqualitätssicherung bestanden)	Sequenzierung	Der Sequenzierungslauf ist abgeschlossen und die Sequenzierungsqualitätssicherung wurde bestanden	Aktivität	Nein	n. z.
Analysis Started (Analyse gestartet)	Analyse	Die Analyse des angegebenen Sequenzierungslaufs hat begonnen	Aktivität	Ja	n. z.
Analysis Completed NIPT Report Generated (Analyse abgeschlossen, NIPT-Bericht generiert)	Nachanalyse	Die Analyse ist abgeschlossen und Berichte wurden generiert	Aktivität	Ja	n. z.

Benachrichtigungen über das Ungültigmachen

Benachrichtigungen über das Ungültigmachen weisen auf Systemereignisse hin, die aufgrund des Ungültigmachens eines Batches oder eines Pools mit dem Workflow Manager auftreten. Diese Benachrichtigungen werden als „Notices“ (Hinweise) protokolliert und erfordern keine Benutzeraktionen.

Benachrichtigung	Schritt	Zeitpunkt	Alarmstufe	E-Mail	Empfohlene Maßnahme
Batch Invalidation (Ungültigmachen von Batches)	Bibliotheksvorbereitung	Benutzer hat einen Batch ungültig gemacht	Hinweis	Ja	n. z.
Pool Invalidation – Repool (Ungültigmachen von Pools – Pool neu bilden)	Bibliotheksvorbereitung	Benutzer hat den erstmöglichen Pool (eines bestimmten Typs) für den Batch ungültig gemacht	Hinweis	Ja	n. z.
Pool Invalidation – Use second aliquot (Ungültigmachen von Pools – Zweites Aliquot verwenden)	Bibliotheksvorbereitung	Benutzer hat den erstmöglichen Pool (eines bestimmten Typs) für den Batch ungültig gemacht	Hinweis	Ja	n. z.
Sequencing Completed Pool Invalidated (Sequenzierung abgeschlossen, Pool ungültig gemacht)	Sequenzierung	Der Abschluss des Sequenzierungslaufs erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der Benutzer den Pool bereits ungültig gemacht hatte	Hinweis	Ja	n. z.
Sequencing QC passed – All samples are invalid (Sequenzierungsqualitätssicherung bestanden – Alle Proben sind ungültig)	Sequenzierungsqualitätssicherung	Die Qualitätssicherung des Sequenzierungslaufs ist abgeschlossen, aber alle Proben sind ungültig	Hinweis	Ja	n. z.
Analysis Completed Pool Invalidated (Analyse abgeschlossen, Pool ungültig gemacht)	Nachanalyse	Der Abschluss der Analyse erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der Benutzer den Pool bereits ungültig gemacht hatte	Hinweis	Ja	n. z.

Benachrichtigungen zu behebbaren Fehlern

Behebbarer Fehler sind Probleme, die die VeriSeq NIPT Assay Software lösen kann, wenn der Benutzer die empfohlene Maßnahme durchführt. Falls das Problem weiterhin besteht, senden Sie eine E-Mail an den technischen Support von Illumina.

Benachrichtigung	Schritt	Zeitpunkt	Alarmstufe	E-Mail	Empfohlene Maßnahme
Missing Instrument Path (Gerätepfad fehlt)	Sequenzierung	Das System kann einen externen Sequenzierungsordner nicht finden bzw. keine Verbindung mit ihm herstellen.	Alarm	Ja	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ein NAS-System verwendet wird, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Siehe <i>Empfohlene Aktionen</i>, Aktions-ID 1 auf Seite 64. • Möglicher Hardwarefehler. Starten Sie den Server neu. Falls das Problem weiterhin besteht, senden Sie eine E-Mail an den technischen Support von Illumina.
Insufficient Disk Space for Sequencing (Nicht genügend Speicherplatz für die Sequenzierung)	Sequenzierung	Das System hat einen neuen Sequenzierungsdatenordner erkannt, vermutet aber, dass für die Daten nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist.	Alarm	Ja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz. Weitere Informationen finden Sie unter <i>Empfohlene Aktionen</i>, Aktions-ID 2 auf Seite 64. 2. Geben Sie Speicherplatz frei oder sichern Sie Daten. Siehe <i>Empfohlene Aktionen</i>, Aktions-ID 3 auf Seite 65
Sequencing Run Invalid Folder (Ungültiger Sequenzierungslaufordner)	Sequenzierung	Ungültige Zeichen im Namen des Sequenzierungslaufordners.	Alarm	Ja	Der Sequenzierungslaufordner wurde falsch umbenannt. Benennen Sie den Lauf in einen gültigen Namen um.
RTA Complete is not accessible (Kein Zugriff auf die Datei „RTAComplete“)	Sequenzierung	Die Datei „RTAComplete“ im Sequenzierungsordner konnte nicht gelesen werden.	Warnung	Ja	Möglicher Hardwarefehler. Starten Sie den Server neu. Falls das Problem weiterhin besteht, senden Sie eine E-Mail an den technischen Support von Illumina.
Missing Sample Type (Probentyp fehlt)	Voranalyse	Die Software konnte die Probentypdefinition für einige Proben nicht finden.	Hinweis	Ja	Für die angegebene Probe wurde das Probentypattribut nicht angegeben. Machen Sie die Probe ungültig, um fortzufahren.
Missing Sex Chromosome (Geschlechtschromosom fehlt)	Voranalyse	Die Software konnte bei einigen Proben die Definition der Geschlechtschromosomen nicht finden.	Hinweis	Ja	Für die angegebene Probe wurde das Geschlechtschromosomenattribut nicht angegeben. Machen Sie die Probe ungültig, um fortzufahren.

Benachrichtigung	Schritt	Zeitpunkt	Alarmstufe	E-Mail	Empfohlene Maßnahme
Missing Sample Type and Sex Chromosome (Probentyp und Geschlechtschromosom fehlen)	Voranalyse	Die Software konnte bei einigen Proben die Definition des Probentyps und der Geschlechtschromosomen nicht finden.	Hinweis	Ja	Für die angegebene Probe wurden der Probentyp und das Geschlechtschromosomenattribut nicht angegeben. Machen Sie die Probe ungültig, um fortzufahren.
Sample Sheet Generation failed (Generierung des Probenblatts fehlgeschlagen)	Voranalyse	Das Probenblatt konnte nicht erstellt werden.	Alarm	Ja	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz. Weitere Informationen finden Sie unter <i>Empfohlene Aktionen</i>, Aktions-ID 2 auf Seite 64. Falls wenig freier Speicherplatz zur Verfügung steht, geben Sie Speicherplatz frei oder sichern Sie Daten. Siehe <i>Empfohlene Aktionen</i>, Aktions-ID 3 auf Seite 65. Wenn ein NAS-System verwendet wird, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Siehe <i>Empfohlene Aktionen</i>, Aktions-ID 1 auf Seite 64. Möglicher Hardwarefehler. Starten Sie den Server neu. Falls das Problem weiterhin besteht, senden Sie eine E-Mail an den technischen Support von Illumina.
Unable to check disk space (Überprüfen des Speicherplatzes nicht möglich)	Voranalyse	Der verfügbare Speicherplatz konnte nicht überprüft werden.	Alarm	Ja	<ul style="list-style-type: none"> Wenn ein NAS-System verwendet wird, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Weitere Informationen finden Sie unter <i>Empfohlene Aktionen</i>, Aktions-ID 2 auf Seite 64. Möglicher Hardwarefehler. Starten Sie den Server neu. Falls das Problem weiterhin besteht, senden Sie eine E-Mail an den technischen Support von Illumina.
Insufficient Disk Space for Analysis (Nicht genügend Speicherplatz für die Analyse)	Voranalyse	Es wurde festgestellt, dass nicht genügend Speicherplatz für den Beginn eines neuen Analyselaufs vorhanden ist.	Alarm	Ja	Geben Sie Speicherplatz frei oder sichern Sie Daten. Siehe <i>Empfohlene Aktionen</i> Aktions-ID 3 auf Seite 65.
Unable to launch Analysis Pipeline (Analyseverfahren konnte nicht gestartet werden)	Voranalyse	Ein Analyselauf für den angegebenen Sequenzierungsordner konnte nicht gestartet werden.	Alarm	Ja	Möglicher Hardwarefehler. Starten Sie den Server neu. Falls das Problem weiterhin besteht, senden Sie eine E-Mail an den technischen Support von Illumina.

Benachrichtigung	Schritt	Zeitpunkt	Alarmstufe	E-Mail	Empfohlene Maßnahme
Sequencing folder Read/Write permission failed (Lese-/Schreibberechtigung des Sequenzierungsordners fehlgeschlagen)	Voranalyse	Der Softwaretest, der die Lese-/Schreibberechtigung für den Sequenzierungslaufordner prüft, ist fehlgeschlagen.	Warnung	Ja	<ul style="list-style-type: none"> Wenn ein NAS-System verwendet wird, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Siehe <i>Empfohlene Aktionen</i>, Aktions-ID 1 auf Seite 64. Möglicher Hardwarefehler. Starten Sie den Server neu. Falls das Problem weiterhin besteht, senden Sie eine E-Mail an den technischen Support von Illumina.
Analysis Failed - Retry (Analyse fehlgeschlagen – neuer Versuch)	Analyse	Die Analyse ist fehlgeschlagen. Neuer Versuch.	Hinweis	Ja	Keine
Results Already Reported (Ergebnisse bereits gemeldet)	System	Die Software hat festgestellt, dass für den aktuellen Pooltyp bereits ein NIPT-Bericht generiert wurde.	Aktivität	Ja	Keine
Unable to deliver email notifications (Zustellung von E-Mail-Benachrichtigungen nicht möglich)	System	Das System konnte E-Mail-Benachrichtigungen nicht zustellen.	Warnung	n. z.	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Validität der auf dem System definierten E-Mail-Konfiguration. Lesen Sie die Anweisungen unter <i>Konfigurieren von System-E-Mail-Benachrichtigungen auf Seite 28</i>. Senden Sie eine Test-E-Mail. Lesen Sie die Anweisungen unter <i>Konfigurieren von System-E-Mail-Benachrichtigungen auf Seite 28</i>. Starten Sie den Server neu. Falls das Problem weiterhin besteht, senden Sie eine E-Mail an den technischen Support von Illumina.
Time Skew Detected (Zeitabweichung erkannt)	Bibliotheksvorbereitung	Es wurde eine Zeitabweichung von mehr als einer Minute zwischen den Zeitangaben des Workflow Managers und der lokalen Uhrzeit des Servers erkannt.	Warnung	Nein	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die lokale Uhrzeit auf dem Workflow Manager-PC. Überprüfen Sie die auf der Web-Benutzeroberfläche (Registerkarte „Server Status“ (Serverstatus)) angezeigte lokale Uhrzeit des Onsite Servers.

Benachrichtigungen zu nicht behebbaren Fehlern

Nicht zu behebbende Fehler sind Bedingungen, die zu einem Endzustand führen, in dem die Fortsetzung der Assay-Ausführung nicht mehr möglich ist.

Benachrichtigung	Schritt	Zeitpunkt	Alarmstufe	E-Mail	Empfohlene Maßnahme
Batch Failure (Batch-Fehler)	Bibliotheksvorbereitung	Batch-Qualitätssicherung ist fehlgeschlagen	Hinweis	Ja	Starten Sie die Bibliotheksplattierung neu.
Report Generating Failure (Fehler bei der Berichterstellung)	Berichterstellung	Das System konnte einen Bericht nicht erstellen.	Alarm	Ja	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz. Weitere Informationen finden Sie unter <i>Empfohlene Aktionen</i>, Aktions-ID 2 auf Seite 64. Falls wenig freier Speicherplatz zur Verfügung steht, geben Sie Speicherplatz frei oder sichern Sie Daten. Siehe <i>Empfohlene Aktionen</i> Aktions-ID 3 auf Seite 65. Möglicher Hardwarefehler. Starten Sie den Server neu. Falls das Problem weiterhin besteht, senden Sie eine E-Mail an den technischen Support von Illumina.
Failed to Parse Run Parameters file (Laufparameterdatei konnte nicht analysiert werden)	Sequenzierung	Das System konnte die Datei „RunParameters.xml“ nicht öffnen/analysieren.	Warnung	Ja	Die Datei „RunParameters.xml“ ist beschädigt. Prüfen Sie die Konfiguration des Sequenzierers und führen Sie eine erneute Sequenzierung des Pools durch.
Unrecognized Run Parameters (Unerkannte Laufparameter)	Sequenzierung	Die Software hat nicht kompatible Laufparameter eingelesen.	Warnung	Ja	Die Software konnte keine Sequenzierungslaufparameter aus der Konfigurationsdatei des Sequenzierers erstellen. Prüfen Sie die Konfiguration des Sequenzierers und führen Sie eine erneute Sequenzierung des Pools durch.
Invalid Run Parameters (Ungültige Laufparameter)	Sequenzierung	Die Software hat erforderliche Laufparameter eingelesen, die nicht kompatibel mit dem Assay sind.	Warnung	Ja	Die Software-Kompatibilitätsprüfung ist fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Konfiguration des Sequenzierers und führen Sie eine erneute Sequenzierung des Pools durch.

Benachrichtigung	Schritt	Zeitpunkt	Alarmstufe	E-Mail	Empfohlene Maßnahme
No Pool Barcode found (Kein Pool-Barcode gefunden)	Sequenzierung	Die Software konnte der Fließzelle für den Sequenzierungslauf keinen bekannten Pool-Barcode zuordnen.	Warnung	Ja	Möglicherweise wurde ein falscher Pool-Barcode eingegeben. Führen Sie eine erneute Sequenzierung des Pools durch.
Sequencing Timed Out (Zeitüberschreitung bei der Sequenzierung)	Sequenzierung	Der Sequenzierungslauf wurde nicht in dem vorgegebenen Zeitrahmen abgeschlossen.	Warnung	Ja	Prüfen Sie den Sequenzierer und die Netzwerkverbindung. Führen Sie eine erneute Sequenzierung des Pools durch.
Sequencing QC files generation failed (Erstellen der Dateien der Sequenzierungsqualitätssicherung fehlgeschlagen)	Sequenzierungsqualitätssicherung	Der Sequenzierungslauf ist abgeschlossen, aber die InterOp-QS-Dateien sind beschädigt	Alarm	Ja	Prüfen Sie den Sequenzierer und die Netzwerkverbindung. Führen Sie eine erneute Sequenzierung des Pools durch.
Sequencing QC files corrupted (Dateien der Sequenzierungsqualitätssicherung sind beschädigt)	Sequenzierungsqualitätssicherung	Der Sequenzierungslauf ist abgeschlossen und die Dateien der Sequenzierungsqualitätssicherung sind beschädigt.	Warnung	Ja	Prüfen Sie den Sequenzierer und die Netzwerkverbindung. Führen Sie eine erneute Sequenzierung des Pools durch.
Sequencing QC failed (Sequenzierungsqualitätssicherung fehlgeschlagen)	Sequenzierungsqualitätssicherung	Der Sequenzierungslauf ist abgeschlossen und die Sequenzierungsqualitätssicherung ist fehlgeschlagen	Hinweis	Ja	Führen Sie eine erneute Sequenzierung des Pools durch.
Analysis Failed for Maximum number of attempts (Analyse fehlgeschlagen und max. Anzahl an Versuchen erreicht)	Analyse	Alle Analyseversuche sind fehlgeschlagen. Es wird kein erneuter Versuch durchgeführt.	Warnung	Ja	Führen Sie eine erneute Sequenzierung mit dem zweiten Pool durch.

Benachrichtigung	Schritt	Zeitpunkt	Alarmstufe	E-Mail	Empfohlene Maßnahme
Analysis Post-Processing Failed (Nachverarbeitung der Analyse fehlgeschlagen)	Nachanalyse	Die Software konnte die Nachverarbeitung der Analyseergebnisse nicht durchführen.	Alarm	Ja	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ein NAS-System verwendet wird, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Siehe <i>Empfohlene Aktionen</i> Aktions-ID 1 auf Seite 64. • Möglicher Hardwarefehler. Starten Sie den Server neu. Falls das Problem weiterhin besteht, senden Sie eine E-Mail an den technischen Support von Illumina.
Analysis Upload Failed (Hochladen der Analyse fehlgeschlagen)	Nachanalyse	Die Software konnte die Analyseergebnisse nicht in die Datenbank hochladen.	Alarm	Ja	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ein NAS-System verwendet wird, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Siehe <i>Empfohlene Aktionen</i> Aktions-ID 1 auf Seite 64. • Möglicher Hardwarefehler. Starten Sie den Server neu. Falls das Problem weiterhin besteht, senden Sie eine E-Mail an den technischen Support von Illumina.

Empfohlene Aktionen

Aktions-ID	Empfohlene Maßnahme	Schritte
1	Überprüfen der Netzwerkverbindung	<p>HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass sich das NAS-System für die Remote-Speicherung und das lokale System in demselben Netzwerk befinden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geben Sie in einer Windows-Befehlszeile (cmd) den folgenden Befehl ein: ping <IP-Adresse des Servers> HINWEIS: Wenn ein NAS-System verwendet wird, überprüfen Sie auch die Verbindung mit dem NAS. 2. Stellen Sie sicher, dass es keine verloren gegangenen Pakete gibt. HINWEIS: Wenden Sie sich an den IT-Administrator, falls Pakete verloren gegangen sind. 3. Testen Sie die Verbindung: <ol style="list-style-type: none"> a. Melden Sie sich bei der Web-Benutzeroberfläche des Onsite Servers an. b. Wählen Sie im Dashboardmenü Folder (Ordner) aus. c. Klicken Sie auf Test (Testen) und stellen Sie fest, ob der Test erfolgreich durchgeführt wurde. Wenn der Test fehlschlägt, lesen Sie die Informationen unter <i>Bearbeiten eines freigegebenen Netzlaufwerks auf Seite 25</i>. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Einstellungen korrekt konfiguriert sind.
2	Überprüfen des verfügbaren Speicherplatzes	<p>HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Ordner „Input“ (Eingabe) des Onsite Servers dem Windows-Computer zugeordnet ist. Weitere Informationen finden Sie unter <i>Zuordnen von Serverlaufwerken auf Seite 33</i>.</p> <p>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, das dem Ordner „Input“ (Eingabe) zugeordnet ist. Wählen Sie Properties (Eigenschaften) und sehen Sie sich die Informationen zum verfügbaren Speicherplatz an.</p>

Aktions-ID	Empfohlene Maßnahme	Schritte
3	Geben Sie Speicherplatz frei/sichern Sie Daten	<p>HINWEIS: Illumina empfiehlt, in regelmäßigen Intervallen eine Datensicherung durchzuführen und/oder die Sequenzierungsdaten auf dem Server zu speichern. Weitere Informationen finden Sie unter <i>Verwalten eines freigegebenen Netzlaufwerks auf Seite 25</i>.</p> <p>1. Im Falle von Daten, die lokal auf dem Onsite Server gespeichert sind: HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Ordner „Input“ (Eingabe) des Onsite Servers dem Windows-Computer zugeordnet ist. Weitere Informationen finden Sie unter <i>Zuordnen von Serverlaufwerken auf Seite 33</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> Doppelklicken Sie auf den Ordner „Input“ (Eingabe) und geben Sie die entsprechenden Anmeldedaten ein. Die Sequenzierungslaufdaten werden so angezeigt, dass die Ordnernamen mit den Namen der Sequenzierungsläufe übereinstimmen. Löschen oder sichern Sie die verarbeiteten Sequenzierungsordner. <p>2. Im Falle von auf einem Remote-NAS-System gespeicherten Daten: HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass sich das NAS-System für die Remote-Speicherung und das lokale System in demselben Netzwerk befinden. HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Ordner auf dem Remote-Laufwerk zugänglich ist. Fragen Sie hierzu Ihren IT-Administrator nach den entsprechenden Anmeldedaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Die Sequenzierungslaufdaten werden so angezeigt, dass die Ordnernamen mit den Namen der Sequenzierungsläufe übereinstimmen. Löschen oder sichern Sie die verarbeiteten Sequenzierungsordner.

Systemprobleme

Problem	Empfohlene Maßnahme
Das Starten der Software schlägt fehl.	Wenn beim Starten der Assay Software Fehler erkannt werden bzw. auftreten, werden die Fehler in einer Übersicht im Anmeldebildschirm angezeigt. Wenden Sie sich an den technischen Support von Illumina und teilen Sie diesem die aufgeführten Fehler mit.
Datenbankwiederherstellung erforderlich	Wenn das Wiederherstellen einer Datenbanksicherung erforderlich ist, wenden Sie sich an einen Servicetechniker von Illumina.
System-Drift festgestellt	Wenn ein System-Drift erkannt wird, kommuniziert die Assay Software nicht mehr mit den anderen Systemkomponenten. Der Administrator kann das System vom System-Drift-Status wieder auf Normalbetrieb zurücksetzen.

Datenverarbeitungstests

Vorinstallierte Datensätze auf dem Onsite Server ermöglichen die Funktionsüberprüfung des Servers und der Analyse-Engine.

Testen des Servers

Bei diesem Test wird ein Sequenzierungslauf simuliert, d. h., es werden Analyseergebnisse generiert, ohne dass das Analyseverfahren tatsächlich läuft. Führen Sie diesen Test aus, um sicherzustellen, dass der Onsite Server ordnungsgemäß funktioniert und dass Berichte und E-Mail-Benachrichtigungen erstellt werden.
Dauer: ca. 3–4 Minuten.

Verfahren

- 1 Öffnen Sie den aktivierten Ordner „Input“ (Eingabe) und anschließend den Ordner „TestingData“.
- 2 Erstellen Sie im Ordner „TestingData“ eine Kopie des folgenden Ordners:
150824_NS500404_0121_AHGKH5BGXX_COPY_ANALYSIS_WORKFLOW.
- 3 Ändern Sie den Namen der Ordnerkopie durch Hinzufügen der Erweiterung „_XXX“. „_XXX“ stellt eine sequentielle Zählung des Testlaufs dar. Wenn z. B. „_002“ im Ordner vorhanden ist, ändern Sie den Namen der neuen Kopie in „_003“.
- 4 Warten Sie 3–5 Minuten, bis der Lauf abgeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden E-Mail-Benachrichtigungen erhalten haben:
 - a Sequencing Run Analysis Started (Analyse des Sequenzierungslaufs gestartet)
 - b Aneuploidy Detection Report generated for Sequencing Run (Bericht zum Aneuploidie-Nachweis für Sequenzierungslauf generiert)



HINWEIS

Verbinden Sie beide Berichte mit dem Namen der Sequenzierung, die dem Ordner zugeordnet ist.

- 5 Öffnen Sie im Ordner „Output“ (Ausgabe) den Ordner „SampleTestRun“ (Probentestlauf) und suchen Sie den folgenden Bericht: SampleTestRun_C_SampleTestRun_PoolA_HGKH5BGXX_nipt_report_YYYYMMDD_HHMMSS.tab.
Die Dateigröße sollte ca. 5,9 KB betragen.
- 6 Verschieben Sie den Testsequenzierungslauf wieder in den Ordner „TestingData“ (Testdaten). Diese Vorgehensweise hilft, die Anzahl der Sequenzierungstestläufe zu verwalten.

Ausführen des vollständigen Analyse-Tests

Bei diesem Test wird ein vollständiger Analyselauf ausgeführt. Führen Sie diesen Test durch, falls der Server Daten nicht verarbeitet/analysiert hat oder eine Zeitüberschreitung eintritt. Dauer: Ca. 4–5 Stunden.

Verfahren

- 1 Öffnen Sie den aktivierten Ordner „Input“ (Eingabe) und anschließend den Ordner „TestingData“ (Testdaten).
- 2 Benennen Sie den folgenden Ordner durch Hinzufügen der Erweiterung „_000“ um:
150528_NB500886_0002_AH7MHHBGXX_FullTRun.

Durch das Hinzufügen der Erweiterung erhält jeder Sequenzierungslauf einen eindeutigen Namen. Falls der Lauf bereits mit einer Erweiterung versehen ist, benennen Sie den Ordner entsprechend um, indem Sie die Erweiterungszahl um 1 erhöhen.

- 3 Verschieben Sie den umbenannten Ordner in den Ordner „Input“ (Eingabe).
- 4 Warten Sie ca. 4–5 Stunden, bis die Analyse abgeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden E-Mail-Benachrichtigungen erhalten haben:
 - a Sequencing Run Analysis Started (Analyse des Sequenzierungslaufs gestartet)
 - b Aneuploidy Detection Report generated for Sequencing Run (Bericht zum Aneuploidie-Nachweis für Sequenzierungslauf generiert)
- 5 Öffnen Sie im Ordner „Output“ (Ausgabe) den Ordner „SampleTestRun“ (Probentestlauf) und suchen Sie den folgenden Bericht: SampleTestRun2_C_SampleTestRun2_PoolA_H7MHHBGXX_nipt_report_20151105_162434.tab.
Die Dateigröße sollte ca. 7,1 KB betragen.
- 6 Verschieben Sie den Testsequenzierungslauf wieder in den Ordner „TestingData“ (Testdaten).



HINWEIS

Verbinden Sie beide Berichte mit dem Namen der Sequenzierung, die dem Ordner zugeordnet ist.

Weitere Ressourcen

Die folgenden Dokumente stehen auf der Illumina-Website zum Herunterladen zur Verfügung.

Ressource	Beschreibung
<i>VeriSeq NIPT Solution Packungsbeilage</i> (Dokument-Nr. 1000000001856)	Enthält eine Beschreibung des Produkts und dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sowie Gebrauchsanweisungen und Fehlerbehebungsverfahren.
<i>Microlab® STAR Line Operator's Manual</i> , Hamilton Dokument-Nr. 624668	Enthält Informationen zum Betrieb und zur Wartung des Hamilton Microlab STAR-Geräts für das automatisierte Liquid-Handling sowie die technischen Spezifikationen für das Gerät.

Auf den [Supportseiten](#) für VeriSeq NIPT Solution auf der Illumina-Website können Sie auf Dokumentationen, Software-Downloads, Online-Schulungen und häufig gestellte Fragen zugreifen.

Akronyme

Akronym	Definition
BCL	Base-Call-Datei
CE-IVD	Europäische Konformitätskennzeichnung (CE) für Produkte für die <i>In-vitro</i> -Diagnostik
cfDNA	Zellfreie DNA
DNA	Desoxyribonukleinsäure
DNS	Domain Name System (System zur Auflösung von Computernamen in IP-Adressen)
FASTQ	Textbasiertes Dateiformat zum Speichern der Ausgabedaten von Sequenzierungsgeräten
FF	Fetale Fraktion
FIFO	First In, First Out
iFACT	individual Fetal Aneuploidy Confidence Test (individueller Zuverlässigkeitstest zur fetalen Aneuploidie)
IP	Internetprotokoll
LIMS	Laborinformations- und Managementsystem
LIS	Laborinformationssystem
LLR	Log-Likelihood-Quotienten, Wahrscheinlichkeitsquotienten
MAC	Media Access Control (Medienzugriffssteuerung)
NAS	Netzwerkgebundener Speicher
NES	Non Excluded Sites (Nicht ausgeschlossene Bereiche)
NGS	Next-Generation Sequencing (Sequenzierung der nächsten Generation)
NIPT	Nicht invasive Pränataltests
NTC	No Template Control (Negativkontrolle)
NTP	Network Time Protocol (Netzwerkzeitprotokoll)
PF	Passing Filter (Nach Filterung)
PQ	Prozessqualifikation
QC	Qualitätssicherung
RTA	Real-Time Analysis (Echtzeitanalyse)
RUO	Research Use Only (Nur für Forschungszwecke)
SCA	Sex Chromosome Aneuploidy (Geschlechtschromosomen-Aneuploidie)
SDS	Safety Data Sheets (Sicherheitsdatenblätter)
SHA1	Sicherer Hash-Algorithmus 1
SSL	Secure Sockets Layer (Protokoll zur Authentifizierung und Verschlüsselung von Internetverbindungen)

Technische Unterstützung

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Illumina.

Website: www.illumina.com
E-Mail: techsupport@illumina.com

Telefonnummern des Illumina-Kundendiensts

Region	Gebührenfrei	Regional
Nordamerika	+1.800.809.4566	
Australien	+1.800.775.688	
Belgien	+32 80077160	+32 34002973
China	400.066.5835	
Dänemark	+45 80820183	+45 89871156
Deutschland	+49 8001014940	+49 8938035677
Finnland	+358 800918363	+358 974790110
Frankreich	+33 805102193	+33 170770446
Großbritannien	+44 8000126019	+44 2073057197
Hongkong	800960230	
Irland	+353 1800936608	+353 016950506
Italien	+39 800985513	+39 236003759
Japan	0800.111.5011	
Neuseeland	0800.451.650	
Niederlande	+31 8000222493	+31 207132960
Norwegen	+47 800 16836	+47 21939693
Österreich	+43 800006249	+43 19286540
Schweden	+46 850619671	+46 200883979
Schweiz	+41 565800000	+41 800200442
Singapur	1.800.579.2745	
Spanien	+34 911899417	+34 800300143
Taiwan	00806651752	
Andere Länder	+44.1799.534000	

Sicherheitsdatenblätter (SDS, Safety Data Sheets) sind auf der Illumina-Website unter support.illumina.com/sds.html verfügbar.

Die **Produktdokumentation** steht auf der Illumina-Website im PDF-Format zum Herunterladen zur Verfügung. Gehen Sie zu support.illumina.com, wählen Sie ein Produkt und wählen Sie anschließend **Documentation & Literature** (Dokumentation und Literatur).



Illumina

5200 Illumina Way

San Diego, Kalifornien 92122, USA

+1.800.809.ILMN (4566)

+1.858.202.4566 (außerhalb von Nordamerika)

techsupport@illumina.com

www.illumina.com

CE
2797



Illumina Netherlands B. V.
Freddy van Riemsdijkweg 15
5657 EE Eindhoven
Niederlande

Australische Niederlassung

Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Australien

FÜR IN-VITRO-DIAGNOSTIK

© 2019 Illumina, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

illumina[®]