

Prospecto de VeriSeq NIPT Solution

PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO

Uso previsto

La solución VeriSeq NIPT es una prueba diagnóstica *in vitro* concebida para su uso en pruebas de cribado basadas en secuenciación con el objeto de detectar aneuploidías fetales a partir de muestras de sangre total periférica materna de mujeres con al menos 10 semanas de gestación. VeriSeq NIPT proporciona información sobre el estado de aneuploidías de los cromosomas 21, 18, 13, X e Y. Este producto no debe utilizarse como la única base para establecer un diagnóstico ni para tomar cualquier otra decisión en relación con el embarazo.

La solución VeriSeq NIPT incluye: VeriSeq NIPT Workflow Manager para VeriSeq NIPT Microlab STAR, kits de preparación de muestras VeriSeq NIPT y el servidor VeriSeq Onsite con VeriSeq NIPT Assay Software.

Resumen y explicación del ensayo

Las anomalías cromosómicas, específicamente la aneuploidía (un número anormal de cromosomas), son una causa habitual de incapacidad reproductiva, anomalías congénitas, retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual. La aneuploidía afecta aproximadamente a 1 de cada 300 nacidos vivos, y la tasa de aborto o muerte fetal es mucho más elevada.^{1,2} Hasta hace muy poco, había dos tipos de pruebas prenatales para estos trastornos: pruebas diagnósticas o detección de marcadores múltiples. Las pruebas diagnósticas llevan aparejados procedimientos invasivos como la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriónicas. Estos métodos de prueba se consideran los más precisos para la detección de la aneuploidía. Sin embargo, están asociados con un riesgo de pérdida del embarazo de entre el 0,11 % y el 0,22 %.³ Las pruebas de detección de marcadores múltiples no conllevan riesgo de pérdida del embarazo, ya que no son invasivas. No obstante, ofrecen una menor precisión en comparación con las pruebas diagnósticas, con unas tasas de detección de trisomía del 21 que oscilan entre el 69 % y el 96 %, en función de la detección concreta, la edad de la madre y el tiempo de gestación en el momento de la prueba.⁴ Lo importante es que la tasa de falsos positivos es de un 5 % aproximadamente, por lo que puede necesitarse una confirmación mediante pruebas diagnósticas, que, como se ha mencionado, conllevan un riesgo de pérdida del embarazo.⁴

La aneuploidía fetal de los cromosomas 21, 18, 13, X e Y se puede detectar con un alto grado de fiabilidad mediante un método de pruebas prenatales no invasivo (NIPT) con secuenciación del genoma completo del ADN sin células (cfDNA) obtenido del plasma materno a partir de la décima semana de gestación. De un metaanálisis más reciente de varios estudios clínicos se desprenden las siguientes tasas y especificidades de detección agrupadas y ponderadas para la trisomía del 21 y la trisomía del 18 en embarazos con un único embrión: para la trisomía del 21, 99,2 % y 99,91 %, y para la trisomía del 18, 96,3 % y 99,87 %, respectivamente.⁵

La reducción significativa de las tasas de falsos positivos de las NIPT, en comparación con la detección de marcadores múltiples convencional, ha llevado a numerosas organizaciones de profesionales sanitarios a publicar comunicados en los que muestran su apoyo al uso de las NIPT.

En concreto, la International Society for Prenatal Diagnosis (ISPD), el American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)/Society for Maternal Fetal Medicine (SMFM), el American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) y la European Society of Human Genetics/American Society of Human Genetics se muestran a favor de que se ofrezcan NIPT a todas las mujeres embarazadas.⁶ Se recomienda ofrecer asesoramiento antes de la prueba, incluir un consentimiento informado y una prueba diagnóstica para confirmar un resultado positivo de la detección de ADN sin células.⁷

En un estudio se sugiere que el uso de NIPT como herramienta de detección principal en todos los embarazos podría reducir un 89 % el número de procedimientos invasivos de confirmación.⁸

La solución VeriSeq NIPT actual es una prueba de diagnóstico *in vitro* (DIV) no invasiva que utiliza secuenciación del genoma completo de fragmentos de ADN sin células procedentes de muestras de sangre total periférica materna a partir de la décima semana de gestación para detectar la aneuploidía de los cromosomas 21, 18, 13, X e Y en el feto.

Principios de procedimiento

VeriSeq NIPT Solution es una solución automatizada para pruebas de NIPT en laboratorio, que consiste en la preparación de muestras y el análisis de datos de secuenciación de manera automatizada. Los kits de preparación de muestras VeriSeq NIPT Sample Prep Kits constan de reactivos especializados. Estos se usan junto con VeriSeq NIPT Microlab STAR para preparar lotes de 48 o 96 muestras que permiten ofrecer una secuenciación de próxima generación. Los datos de secuenciación “paired-end” del genoma completo se analizan mediante software especializado, VeriSeq NIPT Assay Software, y se genera un informe.

El flujo de trabajo consta de los procedimientos siguientes: recopilación de muestras, aislamiento del plasma, extracción de ADN sin células, preparación de bibliotecas, cuantificación de bibliotecas, agrupación de bibliotecas, secuenciación y análisis. A continuación, se describe cada uno de los procedimientos:

- ▶ Recopilación de muestras: 7–10 ml de sangre total periférica materna recopilada en un tubo de recogida de sangre sin células Streck, que evita la lisis celular y la contaminación genómica, además de estabilizar la sangre total a temperatura ambiente.
- ▶ Aislamiento del plasma: el plasma se aísla de la sangre total periférica materna durante 5 días contados a partir de la recogida (10 días si se almacena a 4 °C). Este aislamiento se logra mediante técnicas de centrifugado estándar. VeriSeq NIPT Microlab STAR aspira y dispensa el plasma en una placa de 96 pocillos profundos para el procesamiento siguiente.
- ▶ Extracción de ADN sin células: la purificación del ADN sin células a partir de plasma se logra mediante la adsorción en una placa de unión, el lavado de la placa de unión para eliminar los contaminantes y la elución.
- ▶ Preparación de bibliotecas: los fragmentos purificados de ADN sin células se someten a un proceso de reparación para convertir los 5' y 3' protuberantes en extremos romos. A continuación, se añade un nucleótido de desoxiadenosina a los extremos 3' para crear un protuberante de base individual. Los adaptadores indexados que contienen un 3' protuberante de desoxitimidina de base sencilla se ligan entonces a los fragmentos de ADN sin células procesados. El ADN ligado se purifica mediante bolas de inmovilización inversa de fase sólida. Cada muestra de un conjunto de 48 o 96 recibe un adaptador indexado único. Los adaptadores cumplen dos funciones:
 - ▶ Los índices permiten la identificación de muestras en la secuenciación siguiente.
 - ▶ Los adaptadores de índices contienen secuencias que permiten capturar bibliotecas en la superficie sólida de una celda de flujo de secuenciación para la generación de grupos y la posterior secuenciación.
- ▶ Cuantificación: el producto de la biblioteca se cuantifica mediante un colorante fluorescente cuya concentración viene dada por la comparación con una curva estándar de ADN.
- ▶ Secuenciación y agrupamiento de bibliotecas: las bibliotecas de lotes de 48 muestras se agrupan en cantidades que se ajustan para minimizar la variación de la cobertura. A continuación, los grupos de lotes de 48 muestras se secuencian mediante un secuenciador de nueva generación con las especificaciones siguientes: capacidad para 2 × 36 lecturas “paired-end”, compatibilidad con adaptadores indexados del kit de preparación de muestras VeriSeq NIPT Sample Prep Kit, proceso químico basado en dos colorantes y producción automática de archivos .BCL (datos sin procesar del instrumento de secuenciación). VeriSeq NIPT Solution no incluye el equipo de secuenciación ni los consumibles.
- ▶ Análisis: las llamadas de bases de nucleótidos se realizan directamente a partir de las medidas de intensidad de señal durante la secuenciación. El análisis secundario consiste en lo siguiente:
 - ▶ Demultiplexado de las lecturas mediante secuencias de índice
 - ▶ Asignación de las secuencias a un genoma humano de referencia
 - ▶ Cálculo del número de lecturas únicas dentro de cada grupo genómico de 100 kb
 - ▶ Normalización de la cobertura en un nivel subcromosómico

- ▶ La información de la lectura “paired-end” sirve para evaluar la cobertura (el número de lecturas únicas que se alinean con la referencia por muestra) y la longitud de los fragmentos individuales dentro de la muestra. La fracción fetal dentro de cada muestra se estima basándose en perfiles de cobertura, distribución del tamaño y número de copias en el cromosoma X. Por último, esta información estadística sirve para determinar la sobre- o infrarrepresentación de los cromosomas 21, 18, 13, X e Y. Los resultados se resumen en un informe en el que se indica “aneuploidy detected” (aneuploidía detectada) o “no aneuploidy detected” (aneuploidía no detectada) para cada cromosoma objetivo en aquellas muestras que superen los niveles de control de calidad. En el informe también se incluye una estimación de la fracción fetal de cada muestra.

Limitaciones del procedimiento

- ▶ La solución VeriSeq NIPT es una prueba de cribado y no debe utilizarse sin recurrir también a otros signos clínicos y resultados de pruebas. Las decisiones administrativas, incluida la terminación del embarazo, no deben basarse exclusivamente en el cribado NIPT.⁷
- ▶ El ensayo requiere muestras de sangre total periférica de una mujer embarazada de no menos de 10 semanas.
- ▶ Los resultados de la prueba se pueden confundir debido a determinados factores maternos y fetales, incluidos, entre otros:
 - ▶ Transfusión de sangre materna reciente
 - ▶ Trasplante de órgano materno
 - ▶ Intervención quirúrgica materna
 - ▶ Inmunoterapia o terapia con células madre
 - ▶ Tumor maligno materno
 - ▶ Mosaicismo materno
 - ▶ Mosaicismo placentario confinado
 - ▶ Pérdida del feto
 - ▶ Gemelo evanescente
 - ▶ Trisomía parcial o monosomía parcial del feto
 - ▶ Mosaicismo fetal
- ▶ Los datos relativos a la sensibilidad y especificidad de la prueba cubren tanto embarazos de un único embrión como gemelares. Estas instrucciones de uso no ofrecen datos de sensibilidad ni especificidad para embarazos de trillizos o embarazos múltiples de orden superior.
- ▶ La solución VeriSeq NIPT genera un informe sobre los siguientes aspectos:
 - ▶ Sobrerrepresentación de cromosomas 21, 18 y 13
 - ▶ Las siguientes aneuploidías de cromosomas sexuales: XO, XXX, XXY y XYY
- ▶ La solución VeriSeq NIPT no está diseñada para la detección de poliploidías, tales como la triploidía.
- ▶ La prueba de la solución VeriSeq NIPT busca anomalías cromosómicas específicas. Los informes con el resultado No Aneuploidy Detected (Aneuploidía no detectada) no eliminan la posibilidad de anomalías cromosómicas de los cromosomas probados. Asimismo, un resultado negativo no elimina la posibilidad de que el embarazo tenga otras anomalías cromosómicas, problemas genéticos o defectos congénitos (p. ej., anomalía congénita de tubo neural abierto).

Componentes del producto

VeriSeq NIPT Solution consta de lo siguiente:

- ▶ VeriSeq NIPT Sample Prep Kit (48 muestras) (n.º de referencia 15066801)
- ▶ VeriSeq NIPT Sample Prep Kit (96 muestras) (n.º de referencia 15066802)
- ▶ Servidor VeriSeq Onsite Server (n.º de referencia 15076164)
 - ▶ VeriSeq NIPT Assay Software, preinstalado en el servidor VeriSeq Onsite Server

- ▶ VeriSeq NIPT Microlab STAR (n.º de referencia Hamilton Company Reno: 95475-01 [115 V] y 95475-02 [230 V], Hamilton Company Bonaduz: 806288)
 - ▶ VeriSeq NIPT Workflow Manager, preinstalado en VeriSeq NIPT Microlab STAR

Reactivos

Reactivos suministrados

Ilumina suministra los reactivos siguientes: el kit de preparación de muestras VeriSeq NIPT (48 muestras) (n.º de referencia 15066801) y el kit de preparación de muestras VeriSeq NIPT (96 muestras) (n.º de referencia 15066802). Los kits de preparación de muestras VeriSeq NIPT están configurados para su uso con ML STAR, suministrado por Hamilton Company (n.º de referencia 806288).

Preparación de muestras de VeriSeq NIPT, caja de extracción

Tabla 1 Caja de extracción VeriSeq NIPT (48), n.º de referencia 15066803

Nombre del reactivo en la etiqueta	Número de contenedores en el kit	Volumen de la etiqueta	Principios activos	Almacenamiento
Tampón de lisis	1	100 ml	Clorhidrato de guanidina en solución acuosa tamponada	Entre 15 °C y 30 °C
Tampón de lavado I	1	125 ml	Clorhidrato de guanidina y 2-propanol en solución acuosa tamponada	Entre 15 °C y 30 °C
Tampón de lavado II	1	25 ml	Solución acuosa tamponada que contiene sales	Entre 15 °C y 30 °C
Tampón de elución	1	30 ml	Solución acuosa tamponada	Entre 15 °C y 30 °C
Tampón de proteinasa	1	35 ml	Glicerol en solución acuosa tamponada	Entre 15 °C y 30 °C
Proteinasa K	3	75 mg	Proteinasa K liofilizada	Entre 15 °C y 30 °C

Tabla 2 Caja de extracción VeriSeq NIPT (96), n.º de referencia 15066807

Nombre del reactivo en la etiqueta	Número de contenedores en el kit	Volumen de la etiqueta	Principios activos	Almacenamiento
Tampón de lisis	1	100 ml	Clorhidrato de guanidina en solución acuosa tamponada	Entre 15 °C y 30 °C
Tampón de lavado I	1	125 ml	Clorhidrato de guanidina y 2-propanol en solución acuosa tamponada	Entre 15 °C y 30 °C
Tampón de lavado II	2	25 ml	Solución acuosa tamponada que contiene sales	Entre 15 °C y 30 °C
Tampón de elución	1	30 ml	Solución acuosa tamponada	Entre 15 °C y 30 °C
Tampón de proteinasa	1	35 ml	Glicerol en solución acuosa tamponada	Entre 15 °C y 30 °C
Proteinasa K	4	75 mg	Proteinasa K liofilizada	Entre 15 °C y 30 °C

Preparación de muestras de VeriSeq NIPT, caja de preparación de bibliotecas

Tabla 3 Caja de extracción VeriSeq NIPT (48), n.º de referencia 15066809

Nombre del reactivo en la etiqueta	Número de contenedores en el kit	Volumen de la etiqueta	Principios activos	Almacenamiento
Mezcla de reparación de extremos	1	2,72 ml	ADN-polimerasa y dNTP en solución acuosa tamponada	Entre -25 °C y -15 °C
Mezcla de A-Tailing	1	910 µl	ADN-polimerasa y dATP en solución acuosa tamponada	Entre -25 °C y -15 °C
Mezcla de ligadura	1	233 µl	ADN-ligasa en solución acuosa tamponada	Entre -25 °C y -15 °C
Tampón de hibridación	1	12 ml	Solución acuosa tamponada	Entre -25 °C y -15 °C
Placa adaptadora de ADN VeriSeq NIPT	1	N/D	Oligonucleótidos en solución acuosa tamponada	Entre -25 °C y -15 °C

Tabla 4 Caja de extracción VeriSeq NIPT (96), n.º de referencia 15066810

Nombre del reactivo en la etiqueta	Número de contenedores en el kit	Volumen de la etiqueta	Principios activos	Almacenamiento
Mezcla de reparación de extremos	1	2,72 ml	ADN-polimerasa y dNTP en solución acuosa tamponada	Entre -25 °C y -15 °C
Mezcla de A-Tailing	2	910 µl	ADN-polimerasa y dATP en solución acuosa tamponada	Entre -25 °C y -15 °C
Mezcla de ligadura	2	233 µl	ADN-ligasa en solución acuosa tamponada	Entre -25 °C y -15 °C
Tampón de hibridación	1	12 ml	Solución acuosa tamponada	Entre -25 °C y -15 °C
Placa adaptadora de ADN VeriSeq NIPT	1	N/D	Oligonucleótidos en solución acuosa tamponada	Entre -25 °C y -15 °C

Preparación de muestras de VeriSeq NIPT, caja de accesorios

Tabla 5 VeriSeq NIPT Accessory Box, n.º de referencia 15066811

Nombre del reactivo en la etiqueta	Número de contenedores en el kit	Volumen de la etiqueta	Principios activos	Almacenamiento
Placa de unión de ADN	1	N/D	Microplaca de polipropileno con membrana de silicona modificada	Entre 2 °C y 8 °C
Tampón de resuspensión	1	35 ml	Solución acuosa tamponada	Entre 2 °C y 8 °C
Bolas de purificación de muestras	1	10 ml	Bolas paramagnéticas de fase sólida en solución acuosa tamponada	Entre 2 °C y 8 °C
Reactivo de cuantificación de ADN	1	294 µl	Colorante intercalado para ADN en DMSO	Entre 2 °C y 8 °C
Estándar de cuantificación de ADN	1	110 µl	ADN bicatenario estándar, ADN no específico y acida sódica en solución acuosa tamponada	Entre 2 °C y 8 °C

Preparación de muestras, tubos de flujo de trabajo y etiquetas para VeriSeq NIPT

Tabla 6 Tubos de flujo de trabajo y etiquetas, n.º de referencia 15071543

Nombre del artículo en la etiqueta	Número de artículos en el kit	Almacenamiento
Etiqueta (LBL): código de barras de placa	9	Entre 15 °C y 30 °C
Etiqueta (LBL): código de barras de placa de pocillos profundos	12	Entre 15 °C y 30 °C
Tubo (TB): tubo de agrupación vacío	5	Entre 15 °C y 30 °C

Reactivos no suministrados

Reactivos necesarios no suministrados

- ▶ Agua sin ARNasa ni ADNasa
- ▶ Etanol, 100 % (etanol puro), para biología molecular
- ▶ Reactivos de secuenciación y consumibles necesarios para el sistema de secuenciación de próxima generación (NGS)

Reactivos opcionales, no suministrados

- ▶ Solución salina tampón fosfato Dulbecco (DPBS) para control sin cadena molde (NTC)

Almacenamiento y manipulación

- 1 La temperatura ambiente se define como la temperatura que oscila entre 15 °C y 30 °C.
- 2 Todos los reactivos son de un solo uso. Una vez preparados los reactivos para el uso, deben usarse de inmediato.
- 3 Si el embalaje o el contenido de los componentes de la solución VeriSeq NIPT resultan dañados o afectados, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Illumina.
- 4 Los reactivos son estables si se almacenan siguiendo las indicaciones hasta la fecha de caducidad especificada en las etiquetas de los kits. Para consultar las condiciones de almacenamiento, vea la columna Almacenamiento en las tablas de *Reactivos suministrados en la página 4*. No utilice reactivos caducados.
- 5 Los cambios en el aspecto físico de los reactivos proporcionados puede señalar el deterioro de los materiales. Si se producen cambios en el aspecto físico (tales como cambios evidentes en el color del reactivo o un aspecto turbio con contaminación microbiana), no utilice los reactivos.
- 6 Siga estas prácticas recomendadas para la manipulación de bolas de purificación de muestras:
 - ▶ No congele nunca las bolas.
 - ▶ Deje que las bolas alcancen la temperatura ambiente antes de usarlas.
 - ▶ Justo antes del uso, agite en vórtice las bolas hasta que queden bien suspendidas y el color tenga un aspecto homogéneo.
- 7 El tampón de lisis, el tampón de lavado I, el tampón de lavado II, el tampón de elución y el tampón de proteinasa pueden formar precipitados o cristales visibles. Antes del uso, agite en vórtice con fuerza y, a continuación, inspeccione visualmente para asegurarse de que no haya precipitados.
- 8 No congele nunca la sangre total después de la recogida.
- 9 Secuencie las bibliotecas lo antes posible tras la agrupación. Las bibliotecas agrupadas son estables durante un periodo máximo de siete días a una temperatura de entre -25 °C y -15 °C.

Materiales y equipo

Materiales y equipo necesarios no suministrados

Equipo necesario, no suministrado

Equipo	Proveedor
Pipetas de canal único de 20 µl	Proveedor de laboratorio general
Pipetas de canal único de 200 µl	Proveedor de laboratorio general
Pipetas de canal único de 1000 µl	Proveedor de laboratorio general
Ayuda para pipeta	Proveedor de laboratorio general
Refrigerador, entre 2 °C y 8 °C	Proveedor de laboratorio general
Congelador, entre -25 °C y -15 °C	Proveedor de laboratorio general
Microcentrífuga	Proveedor de laboratorio general
Mezclador vorticial	Proveedor de laboratorio general
Centrifugadora y ensamblaje de rotor para tubos de recogida de sangre	
Recomendado: <ul style="list-style-type: none"> Centrifugadora de la serie Allegra 6, 1600 g Rotor de la centrifugadora Allegra GH-3.8 con contenedores Cubiertas de los contenedores de la centrifugadora Allegra, conjunto de dos Ensamblaje del adaptador de la centrifugadora Allegra, 16 mm, conjunto de cuatro 	<ul style="list-style-type: none"> Beckman Coulter, n.º de artículo 366830 (120 V) Beckman Coulter, n.º de artículo 360581 Beckman Coulter, n.º de artículo 360585 Beckman Coulter, n.º de artículo 359150
Equivalente: <ul style="list-style-type: none"> Centrifugadora refrigerada con capacidad para 1600 x g sin opción de freno Rotor de contenedores móvil con contenedores Accesorios para inserción de contenedores, capacidad para 48 o 96 tubos, profundidad mínima de 76 mm Adaptadores de inserción que admiten 16 tubos de recogida de sangre de 100 mm 	Proveedor de laboratorio general
Centrifugador y ensamblaje de rotor para microplacas	
Recomendado: <ul style="list-style-type: none"> Centrifugadora Sorvall Legend XTR Rotor de microplacas HIGHPlate 6000 Una de las bases de apoyo para microplacas a continuación: <ul style="list-style-type: none"> Base de apoyo MicroAmp para 96 pocillos Portaplacas de PCR de 96 pocillos 	<ul style="list-style-type: none"> Thermo Fisher Scientific, n.º de catálogo 75004521 (120 V) o n.º de catálogo 75004520 (230 V) Thermo Fisher Scientific, n.º de catálogo 75003606 Thermo Fisher Scientific, n.º de catálogo 4379590 Thermo Fisher Scientific, n.º de catálogo AB-0563/1000
Equivalente: <ul style="list-style-type: none"> Centrifugadora con capacidad para 5600 x g Rotor de placa móvil con portaplacas de 96 pocillos, 76,5 mm de profundidad mínima Base de apoyo para microplacas 	Proveedor de laboratorio general
Uno de los siguientes lectores de microplacas (fluorímetro) con SoftMax Pro v. 6.2.2 o superior: <ul style="list-style-type: none"> Gemini XPS SpectraMax M2 	<ul style="list-style-type: none"> Molecular Devices, n.º de referencia XPS Molecular Devices, n.º de referencia M2
Adaptador USB en serie de alta velocidad SpectraMax	Molecular Devices, n.º de referencia 9000-0938

Equipo	Proveedor
Ciclador térmico con las especificaciones siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Tapa calefactada • Intervalo de temperatura de 4 °C a 98 °C • Precisión de temperatura de ±2 °C • Tasa de incremento mínima de 2 °C por segundo • Compatible con placa Twin.tec PCR de 96 pocillos, de borde completo 	Proveedor de laboratorio general
VeriSeq NIPT Microlab STAR	Hamilton, n.º de referencia 95475-01 (115 V) o n.º de referencia 95475-02 (230 V)
Sistema de secuenciación de próxima generación (NGS) con las siguientes capacidades: <ul style="list-style-type: none"> • Secuenciación “paired-end” de 2 x 36 pb • Compatible con los adaptadores de índices dobles de preparación de muestras VeriSeq NIPT • Producción automática de archivos .BCL • Proceso químico basado en dos colorantes • 400 millones de lecturas “paired-end” por experimento • Compatible con VeriSeq NIPT Assay Software 	Proveedor de instrumentos
Servidor VeriSeq Onsite	Illumina, n.º de referencia 15076164

Equipo opcional, no suministrado

Equipo	Proveedor
Sistema decapsulador Pluggo	LGP Consulting, n.º de referencia 4600 4450
Placa de validación de fluorescencia SpectraMax SpectraTest FL1	Molecular Devices, n.º de referencia 0200-5060
Girador/Rotador de tubos, tubos de 15 ml, 40 r/min, 100-240 V	Thermo Scientific, n.º de catálogo 88881001 (EE. UU.) o n.º de catálogo 88881002 (UE)

Material necesario, no suministrado

Consumible	Proveedor
Puntas de filtros no estériles, conductoras, 1000 µl	Hamilton, n.º de referencia 235905
Puntas de filtros no estériles, conductoras, 300 µl	Hamilton, n.º de referencia 235903
Puntas de filtros no estériles, conductoras, 50 µl	Hamilton, n.º de referencia 235948
Depósito de pocillos profundos	Corning Axygen, n.º de producto RES-SW96-HP-SI
Cubo de reactivo medio MagNA Pure LC 20, 20 ml	Roche, n.º de producto 3004058001
Placa de 96 pocillos profundos, 2 ml	Eppendorf, n.º de referencia 951033600
Microplaca de poliestireno con fondo plano negra de 384 pocillos de volumen bajo	Corning, n.º de producto 3820
Placa Twin.tec PCR de 96 pocillos, de borde completo	Eppendorf, n.º de referencia 30129512
Una de las juntas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Microcierre metálico “F” • Cierres metálicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Bio-Rad, n.º de catálogo MSF1001 • Beckman Coulter, n.º de artículo 538619
Tubo de recogida de sangre para ADN sin células con marca CE	Streck, n.º de catálogo 218997
Tapas a presión	Sarstedt, n.º de pedido 65.802
Tubos con tapa de rosca de 2 ml	Proveedor de laboratorio general

Consumible	Proveedor
Puntas de filtros de 20 µl para pipeta de 20 µl	Proveedor de laboratorio general
Puntas de filtros de 200 µl para pipeta de 200 µl	Proveedor de laboratorio general
Puntas de filtros de 1000 µl para pipeta de 1000 µl	Proveedor de laboratorio general
Pipetas serológicas de 25 ml	Proveedor de laboratorio general
Pipetas serológicas de 10 ml	Proveedor de laboratorio general
Recomendado: • Deconex® SOLARSEPT • Deconex® 61 DR	Borer Chemie AG
Equivalente: • Un spray desinfectante rápido con alcohol • Una solución de detergente desinfectante	Proveedor de laboratorio general

Material opcional, no suministrado

Consumible	Proveedor
Tubo, tapa de rosca, 10 ml	Sarstedt, n.º de pedido 60.551
Tubo, tapa de rosca, 50 ml	Proveedor de laboratorio general

Recopilación, transporte y almacenamiento de muestras



PRECAUCIÓN

Manipule todas las muestras como si fueran agentes potencialmente infecciosos.

- 1 Deben usarse muestras de sangre total de 7 a 10 ml recogidas en tubos de recogida de sangre Streck para ADN sin células. No las congele.
- 2 Almacene el tubo de recogida de sangre a 4 °C durante un máximo de 5 días y realice el aislamiento de plasma en un plazo de 10 días.
- 3 El transporte de la sangre total debe efectuarse conforme a la normativa aplicable al transporte de agentes etiológicos.

Advertencias y precauciones

- ▶ Este ensayo contiene proteinasa K. Evite su inhalación, ingestión y el contacto con la piel o los ojos, puesto que puede provocar lesiones. Utilícelo en un área bien ventilada, use ropa de protección, evite respirar el polvo y deseche los contenedores y los contenidos no utilizados de acuerdo con las normativas de seguridad oficiales de su zona.
- ▶ Este ensayo contiene cloruro de guanidina. Evite su inhalación, ingestión y el contacto con la piel o los ojos, puesto que puede provocar lesiones. Utilícelo en un área bien ventilada, use ropa de protección y deseche los contenedores y los contenidos no utilizados de acuerdo con las normativas de seguridad oficiales de su zona.
- ▶ Este ensayo contiene 2-propanol, un producto químico inflamable. Manténgalo lejos del calor y de llamas sin protección. Evite su inhalación, ingestión y el contacto con la piel o los ojos, puesto que puede provocar lesiones. Utilícelo en un área bien ventilada, use ropa de protección y deseche los contenedores y los contenidos no utilizados de acuerdo con las normativas de seguridad oficiales de su zona.
- ▶ Para evitar la formación de gases peligrosos, no deseche los residuos de extracción de ADN sin células (que contienen tiocianato de guanidina) con residuos que contengan lejía (hipoclorito de sodio).
- ▶ Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes potencialmente infecciosos.

- ▶ Utilice las precauciones rutinarias del laboratorio. No pipetee con la boca. No coma, beba ni fume en las zonas de trabajo designadas. Utilice guantes desechables y batas de laboratorio para la manipulación de muestras y reactivos del ensayo. Lávese bien las manos tras la manipulación de muestras y reactivos del ensayo.
- ▶ No utilice los componentes del ensayo una vez alcanzada la fecha de caducidad indicada en la etiqueta de la caja del ensayo. No intercambie los componentes del ensayo de lotes de ensayo distintos. Los lotes de ensayo se identifican con la etiqueta de la caja del ensayo. Almacene los componentes de ensayo a la temperatura especificada.
- ▶ Para evitar la degradación de las muestras o los reactivos, asegúrese de que se hayan disipado por completo todos los vapores del hipoclorito de sodio usado para limpiar antes de comenzar cualquier proceso.
- ▶ El incumplimiento de los procedimientos descritos puede provocar resultados erróneos o una reducción considerable de la calidad de las muestras.

Notas de procedimiento

Evitar la contaminación

- ▶ Use puntas y materiales de laboratorio consumibles recién preparados.
- ▶ Mezcle las muestras con una pipeta. Las puntas resistentes a los aerosoles reducen el riesgo de contaminación cruzada residual y entre muestras. Centrifugue después de agitar en el vórtice.
- ▶ Dado que existe posibilidad de contaminación, extreme las precauciones para asegurarse de que el contenido permanece íntegramente en el pocillo. Evite las salpicaduras de contenido.
- ▶ Siga la normativa aplicable a las prácticas de laboratorio y de higiene al manipular sangre y sus derivados.

Limpieza de la plataforma de VeriSeq NIPT Microlab STAR

- ▶ Compruebe si la plataforma está limpia antes de usarla. Realice el mantenimiento semanal y siga estas instrucciones de limpieza al menos una vez en semana.
- ▶ Limpie todos los portadores con un spray desinfectante rápido con alcohol (Deconex® SOLARSEPT o equivalente) y déjelos que se sequen. Si están muy sucios, sumérgalos después en una solución de detergente desinfectante (líquido limpiador Deconex® 61 DR o equivalente).
- ▶ Abra la cubierta delantera y limpie la plataforma con un trapo empapado en Deconex® SOLARSEPT (o equivalente). Debe comprobar especialmente la limpieza de los bloques deslizantes.
- ▶ Quite el distribuidor del CVS y limpie el distribuidor, la junta y los compartimentos interiores del CVS con un trapo. Quite los residuos de las puntas del cabezal de 96 pipetas CORE y el canal independiente.
- ▶ Retire de la estación de residuos de puntas la placa de extracción de puntas del canal independiente y límpiela: rocíe Deconex® SOLARSEPT (o equivalente) directamente sobre la superficie y límpiela con un trapo. Coloque una nueva bolsa de plástico sobre el marco y vuelva a colocarla. Coloque la placa de extracción de puntas limpia de nuevo en su sitio.
- ▶ Rocíe Deconex® SOLARSEPT (o equivalente) directamente sobre la superficie de la caja y del contenedor de residuos del cabezal de 96 pipetas CORE, y límpiela con un trapo.
- ▶ Humedezca un trapo que no deje pelusa o un hisopo de algodón en etanol al 70 %. Limpie la ventana del lector láser del lector de códigos de barras con el hisopo. Con el mismo trapo o hisopo, limpie todos los pocillos del adaptador de placa CPAC. Si usa un trapo, utilice la parte trasera de un bolígrafo para apretar contra el interior de cada pocillo del adaptador. De este modo, se asegura de que el fondo del pocillo se limpia correctamente.
- ▶ Limpie los canales independientes:
 - ▶ En los canales independientes, limpie el revestimiento de expulsión de las puntas (parte exterior de los canales de pipeteo) con un trapo que no deje pelusa humedecido con Deconex® SOLARSEPT (o equivalente). (Consulte la *guía de referencia de Hamilton Microlab STAR, n.º 15070074*).

- ▶ Limpie la arandela de fijación y las juntas tóricas del cabezal de pipeteo (parte exterior de los canales de pipeteo) con un trapo que no deje pelusa humedecido con Deconex® SOLARSEPT (o equivalente).
- ▶ Limpie el cabezal de 96 pipetas CORE:
 - ▶ Utilice el mismo trapo humedecido en Deconex® SOLARSEPT (o equivalente) para limpiar la funda del cabezal de 96 pipetas y la parte inferior de las arandelas de fijación.
 - ▶ Con el mismo trapo, o con un jirón de este, humedecido con Deconex® SOLARSEPT (o equivalente), limpie los laterales de los canales de pipeteo del cabezal de 96 pipetas para limpiar las juntas tóricas. Para ello, use el trapo como si fuera hilo dental. Repita este procedimiento en cada canal de pipeteo del cabezal de 96 pipetas.
- ▶ Rocíe Deconex® SOLARSEPT (o equivalente) sobre las cubiertas delantera y lateral, y séquelas con un paño.
- ▶ Limpie la cinta protectora de carga automática con un trapo humedecido con Deconex® SOLARSEPT (o equivalente) sin ejercer presión.

**NOTA**

Una limpieza y mantenimiento incorrectos de ML STAR puede provocar contaminación cruzada y afectar negativamente al rendimiento de los ensayos.

Control de calidad

Se puede realizar una evaluación del material de control con características de rendimiento conocidas para detectar diferencias en el procesamiento y los procedimientos técnicos en laboratorio.

**NOTA**

Los experimentos con una muestra de referencia o de control sin cadena molde reducen el número total de muestras maternas desconocidas que se pueden procesar con cada kit de preparación de muestras.

No use más de dos muestras de NTC por cada lote de 48 muestras ni más de cuatro muestras de NTC por cada lote de 96 muestras.

Instrucciones de uso

Sugerencias y técnicas

A menos que se haya especificado un punto de parada de seguridad en el protocolo, continúe inmediatamente con el siguiente paso.

Colocación del código de barras en las placas

- Los códigos de barras para placas de borde completo comienzan por PL.
- Los códigos de barras para placas de pocillos profundos comienzan por DW.
- Aplique los códigos de barras a las placas de borde completo y las de pocillos profundos en el lado junto a la columna 12.
- Cargue las placas con el código de barras orientado hacia arriba para permitir el escaneo automatizado.

Colocación y retirada de la junta en el plato

- ▶ Selle siempre la placa de 96 pocillos antes de llevar a cabo los siguientes pasos del protocolo:
 - ▶ Centrifugado
 - ▶ Termociclado
- ▶ Para sellar la placa, aplíquela la cubierta adhesiva y después la junta.
- ▶ Antes de retirar la junta:
 - ▶ Centrifugue brevemente la placa de 96 pocillos a 1000 × g durante 20 segundos.

- ▶ Coloque la placa en una superficie plana antes de quitar lentamente la junta.

VeriSeq NIPT Microlab STAR

- ▶ Antes de su uso, realice y registre el mantenimiento necesario conforme a las instrucciones del fabricante.
- ▶ Observe ML STAR durante los pasos automatizados. Supervise la interfaz del software VeriSeq NIPT Workflow Manager para ver las indicaciones y las instrucciones para el operador.
- ▶ La cubierta delantera debe estar colocada durante el funcionamiento.
- ▶ No debe haber ningún objeto en la plataforma.
- ▶ Durante los pasos de vacío de la placa:
 - ▶ Si VeriSeq NIPT Workflow Manager se lo indica, ayude manualmente a formar la junta entre la placa y el distribuidor de vacío.
 - ▶ Si se produce un fallo en el equipo, apague y encienda el vacío manualmente cuando se lo indique el software Workflow Manager.
- ▶ Deje que el sistema deseche automáticamente las puntas del adaptador. No quite las puntas manualmente.
- ▶ Quite los reactivos gastados y los consumibles usados conforme a las indicaciones de Workflow Manager.
- ▶ Vacíe a diario los depósitos de residuos de vacío. El primer depósito no debe superar nunca la mitad de su capacidad. El desbordamiento de los residuos de vacío puede dañar la bomba de vacío.

Procesamiento de muestras de sangre

Procedimiento

- 1 Centrifugue las muestras de sangre con código de barras a 1600 x g durante 10 minutos a 4 °C con el freno desactivado.
- 2 Espere a que la centrifugadora se detenga por completo y, a continuación, retire los tubos de muestras. Tras el centrifugado, inicie el aislamiento de plasma antes de 15 minutos. Si transcurren más de 15 minutos, repita el proceso de centrifugado.
- 3 Inspeccione todos los tubos para determinar la idoneidad de la muestra, incluyendo las verificaciones siguientes:
 - ▶ El volumen de muestra es el esperado.
 - ▶ La muestra se ha separado correctamente durante la centrifugación.
 - ▶ El nivel de plasma es de al menos 1,5 ml por encima de la capa leucocitaria.
 - ▶ La muestra no está muy hemolizada (es decir, el plasma no es de un color rojo oscuro).
 - ▶ La muestra no tiene un aspecto lechoso (p. ej., el plasma no tiene un aspecto blanco y turbio o lechoso y opaco).
 - ▶ No se observa coagulación en la muestra.



PRECAUCIÓN

Las muestras que no se han conservado o manipulado de la manera adecuada pueden no ser aptas para su uso. Si se procesan muestras no aptas con el flujo de trabajo, estas pueden causar una obstrucción en la placa de unión durante las extracciones y provocar desbordamientos de muestra en los pocillos adyacentes.

- 4 Destape los tubos y cárguelos en los portatubos. Cargue todas las muestras y cualquier control de plasma del lote.

Aislamiento de plasma

Preparación

- 1 Etiquete una placa de pocillos profundos de plasma intermedio y adhiérole un código de barras.
- 2 Etiquete una placa de pocillos profundos de plasma final y adhiérole un código de barras.



PRECAUCIÓN

Asegúrese de utilizar el tipo de placa correcto para las placas de plasma intermedio y plasma final. El uso de un depósito de pocillos profundos en lugar de una placa de pocillos profundos da lugar a la amalgamación de muestras, de modo que se pueden generar resultados incorrectos.

Procedimiento

- 1 Abra AppLauncher y, después, haga clic en VeriSeq NIPT Method (Método de VeriSeq NIPT).
- 2 Introduzca el ID de lote y el nombre de usuario y, después, haga clic en OK (Aceptar).
El ID de lote tiene una limitación de 26 caracteres. Use solamente números, letras, guiones bajos (_) o guiones (-). Por ejemplo: 16-10-2025_Lote3.
- 3 Haga clic en New Batch (Nuevo lote) y, tras el inicio, en OK (Aceptar) para empezar con el aislamiento del plasma.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cargar una hoja de muestras existente, seleccione la que se encuentra asociada al lote y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
 - Para continuar sin seleccionar una hoja de muestras, haga clic en No Sample Sheet (Sin hoja de muestras).

Para obtener información sobre la creación de una hoja de muestras, consulte la guía de *VeriSeq NIPT Solution Software* (n.º de documento 1000000001949).



NOTA

Para garantizar un adecuado análisis de los datos debe registrarse con precisión para cada muestra el tipo de muestra, si se trata de embarazo de un único embrión o de un embarazo gemelar.

- 5 Seleccione el tamaño del lote y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
- 6 Seleccione el número de controles sin cadena molde (NTC) y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

- 7 Confirme que todos los códigos de barras estén colocados y cargue las muestras, las puntas y las placas (con el código de barras orientado hacia la derecha) en el portador. Haga clic en OK (Aceptar) cada vez que se muestre un mensaje de carga.

Tamaño del lote de muestras	Portador Tipo	Pista	Elemento	Posición del centro
48	De puntas	7-12	Puntas de 1000 µl	5
	Tubo	15	Tubos de muestras de sangre preparados 1-24	1-24
	Tubo	16	Tubos de muestras de sangre preparados 25-48	25-48
	Multiflex	19-24	Placa de pocillos profundos vacía, plasma final, con código de barras	4
	Multiflex	19-24	Placa de pocillos profundos vacía, plasma intermedio, con código de barras	5
	Reactivo	47	[Opcional] DPBS para control sin cadena molde	5
96	De puntas	7-12	Puntas de 1000 µl	4 y 5
	Tubo	15	Tubos de muestras de sangre preparados 1-24	1-24
	Tubo	16	Tubos de muestras de sangre preparados 25-48	25-48
	Tubo	17	Tubos de muestras de sangre preparados 49-72	49-72
	Tubo	18	Tubos de muestras de sangre preparados 73-96	73-96
	Multiflex	19-24	Placa de pocillos profundos vacía, plasma final, con código de barras	4
	Multiflex	19-24	Placa de pocillos profundos vacía, plasma intermedio, con código de barras	5
	Reactivo	47	[Opcional] DPBS para control sin cadena molde	5

- 8 Asegúrese de que los portadores, los materiales de laboratorio y los reactivos estén cargados correctamente; a continuación, haga clic en OK (Aceptar) en la pantalla Pre-Spin Deck Verification (Verificación de la plataforma previa al centrifugado).
- 9 Observe ML STAR mientras realiza los pasos automatizados.
- 10 Si recibe una alerta de Workflow Manager, compruebe que la plataforma de carga de ML STAR no tiene obstrucciones y permite que ML STAR descargue los portadores. Después, haga clic en Unload (Descargar) para descargar la plataforma.
- 11 Retire la placa de pocillos profundos de plasma intermedio.
- Inspeccione visualmente la placa para comprobar que los volúmenes de los pocillos son homogéneos (no hay errores de pipeta). El volumen previsto es de 1000 µl.
 - Anote cualquier incoherencia y regístrela al final del procedimiento de aislamiento de plasma.
 - Selle la placa, realice la carga de manera equilibrada y centrifugue a 5600 x g durante 10 minutos con el freno desactivado o con la configuración más baja.
- 12 Haga clic en Yes (Sí) para continuar con la preparación del plasma final.
- 13 Retire la junta de la placa y cárguela de nuevo en el portador.

Tamaño del lote de muestras	Portador Tipo	Pista	Elemento	Posición del centro
48 y 96	Multiflex	19-24	Placa de pocillos profundos de plasma intermedio	5

- 14 Seleccione la casilla de verificación Se ha centrifugado la placa de plasma intermedio y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
- 15 Observe ML STAR mientras realiza los pasos automatizados.

- 16 Si recibe una alerta de Workflow Manager, compruebe que la plataforma de carga de ML STAR no tiene obstrucciones y permite que ML STAR descargue los portadores. Después, haga clic en Unload (Descargar) para descargar la plataforma.
- 17 Cuando Workflow Manager se lo indique, vacíe los portadores y la plataforma.
- 18 Retire la placa de pocillos profundos de plasma final.
- 19 Inspeccione visualmente la placa para comprobar lo siguiente:
 - ▶ Los volúmenes son homogéneos en todos los pocillos. El volumen previsto es de 900 µl.
 - ▶ Los pellets de células son visibles.
 - ▶ La hemólisis es excesiva.
 Si observa un pellet de células visible o una hemólisis excesiva, invalide la muestra afectada al final del método de aislamiento de plasma o use Batch Manager. Para obtener más información sobre Batch Manager, consulte la guía de *VeriSeq NIPT Solution Software (documento n.º 1000000001949)*.
- 20 Cuando Workflow Manager se lo indique, haga clic en OK (Aceptar).
- 21 Escriba los comentarios sobre los pocillos afectados y haga clic en OK (Aceptar).
- 22 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para ir a la extracción de ADN sin células, haga clic en Yes (Sí).
 - Para parar, haga clic en Exit (Salir).

PUNTO DE DETENCIÓN SEGURO

Si va a detener el proceso, selle la placa de plasma final y almacénela a una temperatura comprendida entre 2 °C y 8 °C durante un periodo de 7 días como máximo.

Extracción de ADN sin células

Preparación

- 1 Examine visualmente las cajas de extracción y de accesorios para confirmar que el kit no haya caducado.
- 2 Prepare los siguientes reactivos. Etiquete los cubos de los depósitos y los depósitos de pocillos profundos con los nombres de los reactivos.

Elemento	Almacenamiento	Instrucciones
Placa de pocillos profundos de plasma final de <i>Aislamiento de plasma</i> en la página 13.	Entre 2 °C y 8 °C	Si estaba almacenada, déjela reposar durante 30 minutos hasta que alcance la temperatura ambiente. Retire la junta de la placa de pocillos profundos de plasma final antes de usarla.
Proteinasa K	Entre 15 °C y 30 °C	Añada lentamente 3,75 ml de tampón de proteinasa a cada frasco de reactivo. <ul style="list-style-type: none"> • Prepare tres frascos para 48 muestras. • Prepare cuatro frascos para 96 muestras. Tape el frasco y agite en vórtice hasta que se resuspenda. Agrupe el reactivo preparado de todos los frascos en un cubo de reactivo.
Tampón de lavado II	Entre 15 °C y 30 °C	Añada 100 ml de EtOH al 100 % a cada botella de reactivo. <ul style="list-style-type: none"> • Prepare un frasco para 48 muestras. • Prepare dos frascos para 96 muestras. Invierta para mezclar. Marque la casilla en el bote.

- 3 Etiquete una nueva placa de borde completo intermedia y colóquela un nuevo código de barras de placa.
- 4 Etiquete una nueva placa de borde completo de elución de ADN sin células y colóquela un nuevo código de barras de placa.
- 5 Etiquete una nueva placa de pocillos profundos de extracción intermedia y colóquela un nuevo código de barras de placa de pocillos profundos.
- 6 Coloque un código de barras de placa en la placa de unión de ADN.
- 7 Prepare una solución de limpieza de EtOH al 70 % (70 % de EtOH y 30 % de agua sin ADNasa ni ARNasa) para limpiar el sistema de vacío.

- 8 Prepare el sistema de vacío.
 - a Quite el distribuidor de vacío y límpielo con EtOH al 70 %.
 - b Vacíe los residuos de vacío.
 - c Asegúrese de que el sistema de vacío de ML STAR esté activado.

Procedimiento

- 1 Haga clic en OK (Aceptar) para iniciar la extracción del ADN sin células. Si aún no está abierto el método VeriSeq NIPT Method NIPT, realice lo siguiente:

- a Abra AppLauncher y haga clic en VeriSeq NIPT Method (Método de VeriSeq NIPT).
- b Introduzca el ID de lote y el nombre de usuario y, después, haga clic en OK (Aceptar).

- 2 Cargue las puntas en los portadores de puntas del modo siguiente y, después, haga clic en OK (Aceptar).

Tamaño del lote de muestras	Tipo portador	Pista	Elemento	Posición del centro
48	Puntas	1-6	Puntas de 1000 µl	1 y 2
		7-12	Puntas de 300 µl	1
96	Puntas	1-6	Puntas de 1000 µl	1, 2, 3 y 4
		7-12	Puntas de 300 µl	1

- 3 Cargue las puntas contadas en los portadores de puntas del modo siguiente.

Tamaño del lote de muestras	Tipo portador	Pista	Elemento	Posición del centro
48, 96	Puntas	49-54	Puntas de 1000 µl	1
			Puntas de 300 µl	2
			Puntas de 50 µl	3

- 4 Introduzca la ubicación de la primera y la última punta de cada gradilla de puntas y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- 5 Escanee los códigos de barras de extracción.
- 6 Introduzca el nombre de usuario o las iniciales del preparador del reactivo y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- 7 Escanee los códigos de barras de los accesorios.
- 8 Introduzca el nombre de usuario o las iniciales del preparador del reactivo y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- 9 Confirme que los códigos de barras estén colocados, quite la junta de la placa de pocillos profundos de plasma final, si es necesario, y cargue las placas (con el código de barras orientado hacia la derecha) en el portaplacas del modo siguiente; a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

Tamaño del lote de muestras	Tipo portador	Pista	Elemento	Posición del centro
48, 96	Multiflex	19-24	Nueva placa con borde completo, intermedia, con código de barras	1
			Nueva placa con borde completo, elución de ADN sin células, con código de barras	2
			Nueva placa de pocillos profundos, intermedia de extracción, con código de barras	4
			Placa de pocillos profundos de plasma final, con código de barras	5

- 10 Confirme que la placa de unión de ADN tiene código de barras y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- 11 Si trabaja con el lote de 48 muestras, corte en dos una junta a lo ancho y colóquela sobre las columnas 7-12 no usadas de la placa antes de la carga en el distribuidor de vacío.

- 12 Cargue la placa de unión de ADN en el distribuidor de vacío con el código de barras orientado hacia la derecha y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- 13 Cargue los tubos de reactivo en el portarreactivos del modo siguiente y, después, haga clic en OK (Aceptar).

Tamaño del lote de muestras	Tipo portador	Pista	Elemento	Posición del centro
48	Reactivo	47	Tampón de elución, 16 ml	1
			Proteinasa K, 11 ml	2
96	Reactivo	47	Tampón de elución, 16 ml	1
			Proteinasa K, 15 ml	2

- 14 Transfiera los reactivos especificados a los depósitos de pocillos profundos y, después, cargue los depósitos en los portadores de pocillos profundos como se indica a continuación. Luego, haga clic en OK (Aceptar).

Tamaño del lote de muestras	Tipo portador	Pista	Elemento	Posición del centro
48	Pocillo profundo	39-44	Tampón de lavado II, 125 ml	1
			Tampón de lavado I, 125 ml	2
			EtOH al 100 %, 60 ml	3
			Tampón de lisis, 100 ml	4
			Agua sin ARNasa ni ADNasa, 60 ml	5
96	Pocillo profundo	39-44	Tampón de lavado II, 200 ml	1
			Tampón de lavado I, 125 ml	2
			EtOH al 100 %, 100 ml	3
			Tampón de lisis, 100 ml	4
			Agua sin ARNasa ni ADNasa, 100 ml	5

- 15 Espere a que finalice la comprobación automatizada de volúmenes de reactivos.
- 16 Confirme que el depósito de residuos de vacío no se encuentra por encima de la mitad de su capacidad (se recomienda que esté vacío) y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- 17 Confirme la colocación de todos los portadores, materiales de laboratorio y reactivos, y haga clic en OK (Aceptar) en la pantalla Extraction Deck Verification (Verificación de plataforma de extracción).
- 18 Observe ML STAR durante los pasos automatizados.
- 19 Tras el paso de vacío final, centrifugue la placa de unión de ADN y haga clic en OK (Aceptar).
 - a Retire la placa de unión de ADN y limpie la superficie inferior con EtOH al 70 %.
 - b Selle cualquier pocillo no tapado en la placa de unión de ADN y colóquelo en la placa de pocillos profundos de plasma final vacía.
 - c Centrifugue el conjunto de placa de unión de ADN y placa de plasma final a 5600 x g durante 10 minutos con el freno aplicado.
- 20 Durante el centrifugado de la placa de unión de ADN, realice la limpieza de vacío.
 - a Espere a que finalice la limpieza de residuos automatizada.
 - b Limpie el distribuidor de vacío y el interior del sistema de vacío con EtOH al 70 % y, después, reemplace el distribuidor de vacío.
 - c Marque la casilla de verificación Manifold is on Vacuum (El distribuidor está en vacío) para iniciar la transferencia de la placa de elución en el distribuidor de vacío. Después, haga clic en OK (Aceptar).
- 21 Retire el distribuidor de vacío y haga clic en OK (Aceptar).
- 22 Tras el centrifugado, quite la junta de los pocillos que contienen muestras de la placa de unión de ADN y colóquela en la placa de elución de ADN sin células. La placa de elución de ADN sin células está en el distribuidor de vacío. Cargue la placa de unión de ADN con el código de barras a la derecha y haga clic en OK (Aceptar).

23 Observe ML STAR durante los pasos automatizados.



PRECAUCIÓN

Debe invalidar manualmente los desbordamientos de muestra que no haya detectado el sistema antes de que puedan contaminarse los pocillos cercanos.

- 24 Tras el paso de incubación, marque la casilla de verificación Plates are assembled as indicated (Las placas están colocadas conforme se indica), lo cual confirma que el conjunto de las placas de unión de ADN / elución de ADN sin células está sobre una base de apoyo (si lo requiere el centrifugado).
- 25 Selle los pocillos descubiertos en la placa de unión de ADN y centrifugue a 5600 x g durante 2 minutos con el freno aplicado. Después, haga clic en OK (Aceptar).
- 26 Inspeccione visualmente la placa de elución de ADN sin células para comprobar que los volúmenes de cada pocillo sean homogéneos. El volumen previsto es de unos 55 µl.
- 27 Selle y conserve la placa de elución de ADN sin células para la preparación de bibliotecas.
- 28 Si recibe una alerta de Workflow Manager, compruebe que la plataforma de carga de ML STAR no tiene obstrucciones y permite que ML STAR descargue los portadores. Después, haga clic en Unload (Descargar) para descargar la plataforma.
- 29 Descargue todos los portadores y limpie la plataforma de ML STAR; a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
- 30 Escriba los comentarios sobre los pocillos afectados y haga clic en OK (Aceptar).
- 31 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para ir a la preparación de bibliotecas, haga clic en Yes (Sí).
 - Para parar, haga clic en Exit (Salir).

PUNTO DE DETENCIÓN SEGURO

Si va a detener el proceso, selle la placa de elución de ADN sin células y almacénela a una temperatura comprendida entre -25 °C y -15 °C durante un periodo de 7 días como máximo.

Preparación de bibliotecas

Preparación

- 1 Examine visualmente las cajas de preparación de bibliotecas y de accesorios para confirmar que los kits no hayan caducado.
- 2 Prepare los siguientes reactivos. Etiquete los cubos de los depósitos y los depósitos de pocillos profundos con los nombres de los reactivos.

Elemento	Almacenamiento	Instrucciones
Mezcla de reparación de extremos	Entre -25 °C y -15 °C	Descongele a temperatura ambiente. Agite en vórtice para mezclar.
Mezcla de A-Tailing	Entre -25 °C y -15 °C	Descongele a temperatura ambiente. Agite en vórtice para mezclar y, a continuación, centrifugue brevemente.
Mezcla de ligadura	Entre -25 °C y -15 °C	Descongele a temperatura ambiente. Agite en vórtice para mezclar y, a continuación, centrifugue brevemente.
Tampón de resuspensión	Entre 2 °C y 8 °C	Agite en vórtice para mezclar. Devuelva al almacenamiento después de su uso.
Tampón de hibridación	Entre -25 °C y -15 °C	Descongele a temperatura ambiente. Agite en vórtice para mezclar. Devuelva al almacenamiento después de su uso.
Placa adaptadora de ADN VeriSeq NIPT	Entre -25 °C y -15 °C	Descongele a temperatura ambiente. Agite en vórtice para mezclar. Centrifugue a 1000 × g durante 20 segundos. Coloque un código de barras.
Bolas de purificación de muestras	Entre 2 °C y 8 °C	Deje reposar durante 30 minutos hasta que alcance la temperatura ambiente. Agite enérgicamente con un vórtice antes de cada uso. Mezcle con un vórtice o inversor hasta que todas las bolas estén en suspensión y la mezcla sea homogénea.
EtOH al 80 %	Entre 2 °C y 8 °C	Prepare una nueva. Combine 40 ml de EtOH al 100 % y 10 ml de agua sin ADNasa ni ARNasa. Invierta para mezclar.
Placa de elución de ADN sin células de <i>Extracción de ADN sin células</i> en la página 15.	Entre -25 °C y -15 °C	Si la placa estaba almacenada, confirme que no llevaba más de siete días y que se ha descongelado a temperatura ambiente. Agite en vórtice a 1500 r/min durante 1 minuto. Centrifugue a 1000 × g durante 20 segundos.

- 3 Etiquete una nueva placa de borde completo de bibliotecas y colóquela un nuevo código de barras de placa.
- 4 Asegúrese de que la regulación térmica de ML STAR esté activada.

Dilución de enzimas

- 1 Combine una mezcla de A-Tailing con un tampón de resuspensión en un tubo con tapa de rosca. Agite en vórtice para mezclar y, a continuación, centrifugue brevemente.

Tamaño del lote de muestras	Mezcla de A-Tailing	Tampón de resuspensión
48	900 µl	1200 µl
96	1800 µl	2400 µl

- Combine una mezcla de ligadura con un tampón de resuspensión en un tubo con tapa de rosca. Agite en vórtice para mezclar y, a continuación, centrifugue brevemente.

Tamaño del lote de muestras	Mezcla de ligadura	Tampón de resuspensión
48	230 µl	1713 µl
96	440 µl	3278 µl

Procedimiento

- Haga clic en OK (Aceptar) para iniciar la preparación de bibliotecas. Si aún no está abierto el método de VeriSeq NIPT, realice lo siguiente:
 - Abra AppLauncher y haga clic en VeriSeq NIPT Method (Método de VeriSeq NIPT).
 - Introduzca el ID de lote y el nombre de usuario y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- Confirme que los siguientes elementos se preparan conforme a las indicaciones de la pantalla de preparación de reactivos:
 - ▶ Mezcla de A-Tailing, mezcla de ligadura y EtOH al 80 %
 - ▶ Bolas de purificación de muestras, mezcla de reparación de extremos y placa adaptadora de ADN de VeriSeq NIPT
- Seleccione las casillas de verificación y haga clic en OK (Aceptar).
- Escanee los códigos de barras de la caja de preparación de bibliotecas.
- Introduzca el nombre de usuario o las iniciales del preparador del reactivo y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- Escanee los códigos de barras de los accesorios.
- Introduzca el nombre de usuario o las iniciales del preparador del reactivo y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- Cargue las puntas en los portadores de puntas del modo siguiente y, después, haga clic en OK (Aceptar) para cada portador.

Tamaño del lote de muestras	Portador Tipo	Pista	Elemento	Posición del centro
48	De puntas	1-6	Puntas de 50 µl	1 y 2
		7-12	Puntas de 300 µl	1, 2, 3 y 5
96	De puntas	1-6	Puntas de 50 µl	1, 2, 3 y 4
		7-12	Puntas de 300 µl	1, 2, 3, 4 y 5

- Si detuvo el protocolo tras el procedimiento de extracción de ADN sin células, cargue las puntas contadas en los portadores de puntas del modo siguiente.

Tamaño del lote de muestras	Portador	Pista	Elemento	Posición del centro
48 y 96	De puntas	49-54	Puntas de 1000 µl	1
			Puntas de 300 µl	2
			Puntas de 50 µl	3

- Introduzca la ubicación de la primera punta de cada gradilla de puntas y, después, haga clic en OK (Aceptar).

- 11 Confirme que los códigos de barras están colocados y cargue las placas (con el código de barras orientado hacia la derecha) en el portador de placas del modo siguiente. Después, haga clic en OK (Aceptar).

Tamaño del lote de muestras	Portador Tipo	Pista	Elemento	Posición del centro
48 y 96	Multiflex	19–24	Placa de elución de ADN sin células, con código de barras	1
			Placa adaptadora de ADN, con código de barras	2
			Nueva placa de 96 pocillos con borde completo, bibliotecas, con código de barras	3
			Nuevas placas de 96 pocillos con borde completo	4 y 5

- 12 Cargue el portador de pocillos profundos del modo siguiente y, después, haga clic en OK (Aceptar).

Tamaño del lote de muestras	Portador Tipo	Pista	Elemento	Posición del centro
48 y 96	Pocillo profundo	39–44	50 ml de EtOH al 80 % en un depósito de pocillo profundo	1
			Nuevas placas de 96 pocillos con borde completo	2, 3, 4, 5

- 13 Cargue los tubos de reactivo en el portarreactivos del modo siguiente y, después, haga clic en OK (Aceptar).

Tamaño del lote de muestras	Portador Tipo	Pista	Elemento	Posición del centro
48 y 96	Reactivo	47	Mezcla de reparación de extremos de 2,5 ml	1
			Mezcla de A-Tailing preparada (volumen total)	2
			Mezcla de ligadura preparada (volumen total)	3
			Bolas de purificación de muestras de 10 ml	4
			Tampón de hibridación de 12 ml	5

- 14 Asegúrese de que los portadores, los materiales de laboratorio y los reactivos estén cargados como se indica; a continuación, haga clic en OK (Aceptar) en la pantalla Library Deck Verification (Verificación de la plataforma de bibliotecas).
- 15 Espere a que finalice la comprobación automatizada de volúmenes de reactivos.
- 16 Observe ML STAR durante los pasos automatizados.
- 17 Si recibe una alerta de Workflow Manager, compruebe que la plataforma de carga de ML STAR no tiene obstrucciones y permite que ML STAR descargue los portadores. Después, haga clic en Unload (Descargar) para descargar la plataforma.
- 18 Inspeccione visualmente la placa de bibliotecas para comprobar que los volúmenes de cada pocillo sean homogéneos.
- 19 Selle y conserve la placa de bibliotecas.
- 20 Descargue todos los portadores, limpie la plataforma y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
- 21 Escriba los comentarios sobre los pocillos afectados y haga clic en OK (Aceptar).
- 22 Realice una de las siguientes acciones:
- Para ir a la cuantificación de bibliotecas, haga clic en Yes (Sí).
 - Para parar, haga clic en Exit (Salir).



NOTA

Proceda inmediatamente con la cuantificación, a menos que se realice un almacenamiento en un punto de detención de seguridad.

PUNTO DE DETENCIÓN SEGURO

Si va a detener el proceso, selle la placa de bibliotecas antes de su almacenamiento. La placa de bibliotecas permanece estable hasta siete días almacenada a temperaturas de entre -25 °C y -15 °C.

Cuantificación de bibliotecas

Preparación

1 Prepare los siguientes reactivos:

Elemento	Almacenamiento	Instrucciones
Reactivo de cuantificación de ADN	Entre 2 °C y 8 °C	Proteger de la luz. Descongele a temperatura ambiente. Agite en vórtice para mezclar y, a continuación, centrifugue brevemente.
Estándar de cuantificación de ADN	Entre 2 °C y 8 °C	Agite en vórtice para mezclar y, a continuación, centrifugue brevemente.
Placa de bibliotecas de <i>Preparación de bibliotecas en la página 19</i>	Entre -25 °C y -15 °C	Si la placa estaba almacenada, confirme que no llevaba más de siete días y que se ha descongelado a temperatura ambiente. Agite en vórtice para mezclar. Centrifugue a 1000 x g durante 20 segundos.
Tampón de resuspensión	Entre 2 °C y 8 °C	Agite en vórtice para mezclar.

- 2 Encienda el fluorímetro 10 minutos antes de usarlo.
- 3 Adhiera una etiqueta de código de barras en una nueva placa de 384 pocillos.
- 4 Adhiera una etiqueta de código de barras en una nueva placa de bordes completos.

Procedimiento

- 1 Haga clic en OK (Aceptar) para iniciar la cuantificación. Si aún no está abierto el método de VeriSeq NIPT, realice lo siguiente:
 - a Abra AppLauncher y haga clic en VeriSeq NIPT Method (Método de VeriSeq NIPT).
 - b Introduzca el ID de lote y el nombre de usuario y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- 2 Escanee los códigos de barras de los accesorios.
- 3 Introduzca el nombre de usuario o las iniciales del preparador del reactivo y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- 4 Cargue las puntas en el portador de puntas del modo siguiente y, después, haga clic en OK (Aceptar).

Tamaño del lote de muestras	Portador Tipo	Pista	Elemento	Posición del centro
48	De puntas	1-6	Gradilla de puntas de 300 µl	1
			Gradilla de puntas de 50 µl	2
96	De puntas	1-6	Gradilla de puntas de 300 µl	1
			Gradilla de puntas de 50 µl	2 y 3

- 5 Confirme que los códigos de barras están colocados, quite la junta de la placa de bibliotecas y cargue las placas (con el código de barras orientado hacia la derecha) en el portador Multiflex del modo siguiente. Después, haga clic en OK (Aceptar).

Tamaño del lote de muestras	Portador Tipo	Pista	Elemento	Posición del centro
48 y 96	Multiflex	19-24	Nuevas placas con borde completo, con código de barras	1
			Nueva placa de 384 pocillos, con código de barras	2
			Placa de bibliotecas, con código de barras	3
			Nuevas placas de 96 pocillos con borde completo	4 y 5

- 6 Cargue los tubos de reactivo sin tapa en el portatubos del modo siguiente y, después, haga clic en OK (Aceptar).

Tamaño del lote de muestras	Portador	Pista	Elemento	Posición del centro
48 y 96	Tubo	46	Estándar de cuantificación de ADN	1
			Reactivo de cuantificación de ADN	2

- 7 Cargue los tubos de reactivo en el portarreactivos del modo siguiente y, después, haga clic en OK (Aceptar).

Tamaño del lote de muestras	Portador	Pista	Elemento	Posición del centro
48 y 96	Reactivo	47	Nuevos tubos de reactivo	1
			Tampón de resuspensión de 16 ml	2

- 8 Si detuvo el protocolo tras el procedimiento de extracción de preparación de bibliotecas, cargue las puntas contadas en los portadores de puntas del modo siguiente.

Tamaño del lote de muestras	Portador	Pista	Elemento	Posición del centro
48 y 96	De puntas	49–54	Puntas de 1000 µl	1
			Puntas de 300 µl	2
			Puntas de 50 µl	3

- 9 Introduzca la ubicación de la primera y la última punta de cada gradilla de puntas y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- 10 Asegúrese de que los portadores, los materiales de laboratorio y los reactivos estén cargados como se indica; a continuación, haga clic en OK (Aceptar) en la pantalla Quant Deck Verification (Verificación de la plataforma de cuantificación).
- 11 Espere a que finalice la comprobación automatizada de volúmenes de reactivos.
- 12 Observe ML STAR durante los pasos automatizados.
- 13 Si recibe una alerta de Workflow Manager, compruebe que la plataforma de carga de ML STAR no tiene obstrucciones y permite que ML STAR descargue los portadores. Después, haga clic en Unload (Descargar) para descargar la plataforma.
- 14 Descargue la placa de bibliotecas.
- Inspeccione visualmente la placa para comprobar que los volúmenes de cada pocillo sean homogéneos.
 - Selle la placa de bibliotecas y almacénela a temperatura ambiente hasta que se complete el análisis de datos fluorométricos.
- 15 Descargue las placas de 96 pocillos restantes e inspecciónelas visualmente para comprobar los volúmenes de todos los pocillos sean homogéneos. Si hay errores notables en el volumen, tal vez haya un problema con los pasos del pipeteado.
- 16 Descargue la placa de 384 pocillos e inspecciónela visualmente para comprobar el líquido en los pocillos correspondientes.
- Selle la placa con un cierre metálico.
 - Centrifugue a 1000 × g durante 20 segundos.
 - Incube a temperatura ambiente y protegiendo de la luz durante 10 minutos.
- 17 Descargue todos los portadores y limpie la plataforma de ML STAR; a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
- 18 Tras la incubación, quite el cierre metálico y cargue la placa de 384 pocillos en el lector de microplacas. Asegúrese de que A1 esté en la esquina superior izquierda y haga clic en Read (Leer).
- 19 Exporte los datos en formato XML como se explica a continuación:

- a Haga clic con el botón derecho en el código de barras, seleccione Rename (Renombrar), realice la lectura del código de barras de la placa de cuantificación y, por último, haga clic en OK (Aceptar).
- b Haga clic en el icono de placa que aparece en la esquina superior izquierda y, después, seleccione Export (Exportar) en el menú.
- c Marque la casilla de comprobación Expt1 (Exportación 1), elija XML como formato de salida y haga clic en OK (Aceptar).
- d Defina la ruta y el nombre del archivo de salida y haga clic en Save (Guardar).



NOTA

Compruebe que es posible acceder a la ubicación del archivo desde el ordenador de Hamilton. No utilice espacios en el nombre ni en la ruta del archivo.

Análisis

- 1 En la pantalla Scanner Information (Información del lector) de ML STAR, introduzca el ID del fluorímetro.
- 2 Escriba los comentarios sobre el experimento del fluorímetro y haga clic en OK (Aceptar).
- 3 Navegue al archivo XML de cuantificación que contiene los datos fluorométricos y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- 4 Revise los resultados de los análisis de análisis curva y concentración de muestra estándar y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- 5 Si necesita repetir el experimento con la placa, haga clic en Rescan (Repetir lectura).



NOTA

Las muestras son sensibles al tiempo y la luz. Si es necesario repetir la lectura, hágalo inmediatamente.

- 6 Escriba los comentarios sobre los pocillos afectados y haga clic en OK (Aceptar).
- 7 Evalúe los resultados y continúe como se indica a continuación.
 - ▶ Si los resultados superan la especificación, vaya a Agrupación de bibliotecas.
 - ▶ Si los resultados no superan la especificación, el sistema cancela el método. Repita los procedimientos de cuantificación empezando por *Preparación en la página 22*.
- 8 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para ir a la agrupación de bibliotecas, haga clic en Yes (Sí).
 - Para parar, haga clic en Exit (Salir).

PUNTO DE DETENCIÓN SEGURO

Si va a detener el proceso, selle la placa de bibliotecas antes de su almacenamiento. La placa de bibliotecas permanece estable hasta siete días almacenada a temperaturas de entre -25 °C y -15 °C.

Agrupación de bibliotecas

Preparación

- 1 Prepare los siguientes reactivos:

Elemento	Almacenamiento	Instrucciones
Tampón de hibridación	Entre -25 °C y -15 °C	Descongele a temperatura ambiente. Agite en vórtice para mezclar. Devuelva al almacenamiento después de su uso.
Placa de bibliotecas de <i>Procedimiento de Procedimiento en la página 22</i> .	Entre -25 °C y -15 °C	Si ha estado almacenado, debe descongelarse a temperatura ambiente. Agite en vórtice a 1500 r/min durante 1 minuto. Centrifugue a 1000 x g durante 20 segundos.

- 2 Etiquete un tubo de agrupación vacío como Grupo A. En el caso de muestras de 96, etiquete un segundo tubo de agrupación vacío como Grupo B.
- 3 Guarde el siguiente programa de desnaturalización en el ciclador térmico con una tapa calentada.
 - ▶ Seleccione la opción de tapa precalentada y establezca la temperatura a 102 °C.
 - ▶ Defina el volumen de la reacción en 50 µl.
 - ▶ Defina la tasa de incremento en 4 °C por segundo.
 - ▶ Incube a 96 °C durante 10 minutos y, después, a 0 °C durante 5 segundos.
 - ▶ Mantenga la temperatura a 4 °C.

Procedimiento

- 1 Coloque la placa de bibliotecas en el ciclador térmico preprogramado y ejecute el programa de desnaturalización.
- 2 Haga clic en OK (Aceptar) para iniciar la agrupación de bibliotecas. Si aún no está abierto el método de VeriSeq NIPT, realice lo siguiente:
 - a Abra AppLauncher y haga clic en VeriSeq NIPT Method (Método de VeriSeq NIPT).
 - b Introduzca el ID de lote y el nombre de usuario y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- 3 Seleccione la concentración del grupo y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar). La densidad de grupos objetivo es 220–260 k/mm². En caso necesario, ajuste la concentración del grupo para lograr la densidad de grupos objetivo.
- 4 Cuando se lo indique Workflow Manager, realice una de las siguientes acciones:
 - Para cargar una hoja de muestras, seleccione la hoja de muestras asociada al lote y, a continuación, haga clic en Load (Cargar).
 - Para usar los valores predeterminados del sistema con el resto de los tipos de muestras o de los informes sobre el sexo, haga clic en Use Default (Usar predeterminados) en cada ajuste.

Para obtener información sobre la creación de una hoja de muestras, consulte la *guía de VeriSeq NIPT Assay Software (n.º de documento 1000000001949)*.
- 5 Haga clic en Start (Iniciar) para activar el temporizador de la desnaturalización de la placa.
- 6 Cargue las puntas en los portadores de puntas del modo siguiente.

Tamaño del lote de muestras	Portador	Pista	Elemento	Posición del centro
48 y 96	De puntas	7–12	Puntas de filtros de 50 µl	1

- 7 Cargue la placa de biblioteca desnaturalizada (con el código de barras orientado hacia la derecha) en el portador Multiflex del modo siguiente y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

Tamaño del lote de muestras	Portador Tipo	Pista	Elemento	Posición del centro
48 y 96	Multiflex	19–24	Placa de biblioteca desnaturalizada (con código de barras)	1

- 8 Cargue los tubos de grupos en el portatubos del modo siguiente y, después, haga clic en OK (Aceptar).

Tamaño del lote de muestras	Portador Tipo	Pista	Elemento	Posición del centro
48	Tubo	46	Nuevo tubo de 2 ml, grupo A	1
96	Tubo	46	Nuevo tubo de 2 ml, grupo A	1
			Nuevo tubo de 2 ml, grupo B	2

- 9 Cargue los tubos de reactivo en el portarreactivos del modo siguiente y, después, haga clic en OK (Aceptar).

Tamaño del lote de muestras	Portador Tipo	Pista	Elemento	Posición del centro
48	Reactivo	47	Tampón de hibridación de 3 ml	1
96	Reactivo	47	Tampón de hibridación de 3 ml	1

- 10 Cargue las puntas en los portadores de puntas del modo siguiente.

Tamaño del lote de muestras	Portador	Pista	Elemento	Posición del centro
48 y 96	De puntas	49–54	Puntas de filtros de 1000 µl	1
			Puntas de filtros de 300 µl	2
			Puntas de filtros de 50 µl	3

- 11 Introduzca la ubicación de la primera y la última punta de cada gradilla de puntas y, después, haga clic en OK (Aceptar).
- 12 Asegúrese de que los portadores, los materiales de laboratorio y los reactivos estén cargados como se indica; a continuación, haga clic en OK (Aceptar) en la pantalla Pooling Deck Verification (Verificación de la plataforma de agrupación).
- 13 Observe ML STAR durante los pasos automatizados.
- 14 Si recibe una alerta de Workflow Manager, compruebe que la plataforma de carga de ML STAR no tiene obstrucciones y permite que ML STAR descargue los portadores. Después, haga clic en Unload (Descargar) para descargar la plataforma.
- 15 Descargue el portatubos. Tape todos los tubos de agrupación, agite en vórtice y, a continuación, centrifugue brevemente.
- 16 Secuencie las bibliotecas lo antes posible tras la agrupación. Almacene la placa de bibliotecas a una temperatura entre -25 °C y -15 °C durante un máximo de 7 días permitir la reagrupación (si es necesaria). La placa de bibliotecas permanece estable hasta siete días almacenada a temperaturas de entre -25 °C y -15 °C.
- 17 Haga clic en OK (Aceptar).
- 18 Escriba los comentarios sobre los pocillos afectados y haga clic en OK (Aceptar).
- 19 En la pantalla de agrupación terminada, haga clic en OK (Aceptar).

PUNTO DE DETENCIÓN SEGURO

Si va a detener el proceso, tape los tubos de agrupación y almacénelos a una temperatura comprendida entre -25 °C y -15 °C durante un periodo de 7 días como máximo.

Preparación de grupos para la secuenciación

Preparación

- 1 Prepare los siguientes reactivos:

Elemento	Almacenamiento	Instrucciones
Tubos de grupo	Entre -25 °C y -15 °C	Si han estado almacenados, deben descongelarse a temperatura ambiente. Agite en vórtice brevemente. Centrifugue brevemente.

- 2 Prepare el sistema de secuenciación de próxima generación con los siguientes ajustes:
- Experimento “paired-end” con lecturas de 36 x 36 ciclos.
 - Indexación doble con lecturas de índices de 8 ciclos.
 - Nombre del experimento igual que el nombre del grupo.

**NOTA**

El software de análisis rechaza las configuraciones de experimentos incorrectas y tal vez requiera una resecuenciación.

El procedimiento siguiente describe la carga correcta de bibliotecas agrupadas en un instrumento de secuenciación de próxima generación con cartuchos.

Procedimiento

- 1 Añada el tampón y el grupo de bibliotecas directamente al cartucho de muestras para el secuenciador como se indica a continuación.
 - ▶ Tampón de hibridación de 900 µl
 - ▶ Grupo A de 450 µl
 - ▶ Pipetee para mezclar
- 2 Proceda con la secuenciación con un sistema de secuenciación de próxima generación conforme a las instrucciones del fabricante.
- 3 Confirme que la configuración del experimento es correcta cuando se le indique.
- 4 Repita el procedimiento para el paso B si es necesario.

Análisis de datos de secuencias

Una vez completada la secuenciación, los datos de secuenciación se envían automáticamente a VeriSeq NIPT Assay Software, que realiza un análisis y genera un informe. El informe incluye las clasificaciones de cada muestra del lote, así como una evaluación de todos los criterios de medición de CC aplicados. El proceso de análisis de un lote de 48 muestras tarda aproximadamente 4 horas desde que finaliza la secuenciación hasta que se obtienen los resultados finales. Para obtener información detallada sobre análisis de datos y el archivo de resultados, consulte la *Guía de VeriSeq NIPT Solution Software Guide (documento n.º 1000000001949)*.

Interpretación de resultados

VeriSeq NIPT Solution emplea un algoritmo basado en entradas de datos múltiples, como la cobertura de la secuenciación, la calidad de la lectura de la secuencia y una fracción fetal estimada, para determinar la representación cromosómica del feto.

VeriSeq NIPT Assay Software genera automáticamente un resultado, que puede ser ANEUPLOIDY DETECTED (ANEUPLOIDÍA DETECTADA) o NO ANEUPLOIDY DETECTED (ANEUPLOIDÍA NO DETECTADA) para los cromosomas 21, 18 y 13 de cada muestra de paciente. El resultado ANEUPLOIDY DETECTED (ANEUPLOIDÍA DETECTADA) indica que se ha detectado en la muestra una trisomía del cromosoma indicado.

Los resultados del estado de los cromosomas sexuales del feto se generan automáticamente y se pueden incluir de manera opcional en el informe. Si no se detecta aneuploidía de los cromosomas sexuales, el informe indicará NO ANEUPLOIDY DETECTED (ANEUPLOIDÍA NO DETECTADA) junto con la clasificación del sexo: XX (muestra fetal femenina) o XY (muestra fetal masculina). Las aneuploidías de los cromosomas sexuales se indican en el informe mediante ANEUPLOIDY DETECTED (ANEUPLOIDÍA DETECTADA), junto con la aneuploidía concreta que se ha detectado: XXX, XXY, XYY o XO (monosomía del cromosoma X). En casos aislados, los valores de los cromosomas sexuales pueden estar fuera del intervalo notificable. Si es así, el sistema genera el resultado SEX CHROMOSOMES NOT REPORTABLE (CROMOSOMAS SEXUALES NO NOTIFICABLES). Aun así, la aneuploidía autosómica sí se puede incluir en el informe para estas muestras.

VeriSeq NIPT Assay Software usa estadísticas generadas durante la secuenciación para ofrecer una estimación de la fracción fetal (FFE, fetal fraction estimation) de cada muestra. La FFE es el componente de ADN sin células fetal estimado que se recupera en el ensayo y sobre el cual se informa con un porcentaje redondeado para cada muestra. La desviación estándar media de esta estimación en todas las muestras es del 1,3 %. La FFE no se debe usar de manera aislada para excluir muestras al generar informes de los resultados.

Para realizar llamadas de representación cromosómica, VeriSeq NIPT Assay Software utiliza la prueba de confianza de aneuploidía fetal individual (iFACT, individualized Fetal Aneuploidy Confidence Test), un criterio de medición de umbral dinámico que indica si el sistema ha generado una cobertura de secuenciación suficiente, basándose en la estimación de la fracción fetal de cada muestra. El sistema realiza llamadas de representación cromosómica solo si la muestra alcanza el umbral de iFACT. Si una muestra no logra alcanzar este umbral, la evaluación de CC muestra FAILED iFACT (iFACT FALLIDA) y el sistema no genera un resultado. La evaluación de la iFACT se aplica a todas las muestras.

Además de la prueba iFACT, VeriSeq NIPT Assay Software evalúa algunos otros criterios de medición de CC durante el análisis. Las mediciones adicionales incluyen la evaluación de la uniformidad de cobertura en las regiones genómicas de referencia (DATA OUTSIDE OF EXPECTED RANGE [DATOS FUERA DEL INTERVALO PREVISTO]) y la distribución de longitud de fragmento de ADN sin células (FRAGMENT SIZE DISTRIBUTION OUTSIDE OF EXPECTED RANGE [DISTRIBUCIÓN DE LONGITUD DEL FRAGMENTO FUERA DEL INTERVALO PREVISTO]). La evaluación de CC muestra una marca de CC o un error de CC para cualquier criterio de medición que esté fuera del rango admitido. En el caso de que haya un error de CC, el sistema no genera un resultado para la muestra. Si la muestra no supera el CC, se puede procesar otra alícuota del plasma siempre que haya volumen de plasma suficiente en el tubo de recogida de sangre.



PRECAUCIÓN

Compruebe las estimaciones de la fracción fetal de todas las muestras. Si los valores son similares para todas las muestras de un mismo experimento, es posible que se haya producido una amalgamación de las muestras que afecte a los resultados. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Illumina para que le ayuden a solucionar el problema.

Características de rendimiento

Los datos siguientes descritos en las secciones de rendimiento clínico y rendimiento analítico se generaron mediante los protocolos y materiales descritos en *Instrucciones de uso*, empezando por el plasma. Todos los datos de secuenciación de esta sección se generaron en un sistema de secuenciación Illumina NextSeq 500/550 con las configuraciones siguientes:

- Software de control del NextSeq v. 2.1.0.31
- Kit de reactivos de secuenciación de rendimiento elevado NextSeq 500/550 v. 2 (75 ciclos)
- Experimento de secuenciación “paired-end” 2 × 36 en modo de rendimiento elevado

Estudio clínico

La precisión clínica de la solución VeriSeq NIPT en relación con los resultados de una evaluación estándar de la referencia clínica se demostró mediante la evaluación de muestras de plasma de mujeres embarazadas con un único embrión sometidas a pruebas de reconocimiento prenatal de aneuploidías cromosómicas fetales.

Las muestras se obtuvieron a partir de muestras de plasma guardadas en banco y sin identificación que anteriormente se habían procesado a partir de muestras de sangre total periférica.

Se probó un total de 3107 muestras, de las cuales, 21 (0,68 %, 21 de 3107) no superaron el CC del ensayo en la primera ronda durante el análisis de los datos de secuenciación completados:

- ▶ Once no superaron iFACT.
- ▶ Ocho tenían datos fuera del intervalo previsto.
- ▶ Dos tenían una distribución del tamaño de los fragmentos fuera del intervalo previsto.

Demografía y características del embarazo

La edad de la madre, el origen étnico, la edad gestacional y el trimestre del embarazo se resumen en la [Tabla 7](#).

Tabla 7 Demografía y características del embarazo

(n = 3086)	
Edad de la madre: años	
Media	36,8
Desviación estándar	3,6
Mediana	36,7
Percentil 25, percentil 75	35,3 y 38,8
Mínimo, máximo	18,2 y 51,6
Raza/Origen étnico: n (%)^a	
Blanca o caucásica	981 (32 %)
Negra o afroamericana	231 (7 %)
Hispana o latina	1079 (35 %)
Asiática	706 (23 %)
Americano nativo	4 (0,1 %)
Mixta	58 (2 %)
Desconocida ^b	27 (1 %)
Edad gestacional en el momento de la extracción: semanas	
Media	12,2
Desviación estándar	2,8
Mediana	11
Percentil 25, percentil 75	10 y 13
Mínimo, máximo	10 y 25
Trimestre de embarazo: n (%)	
Primero (<14 semanas)	2520 (82 %)
Segundo	566 (18 %)
Tercero (≥27 semanas)	0 (0 %)

^a Estudio realizado en Estados Unidos.

^b Indicado como "desconocida".

Rendimiento clínico en embarazos de un único embrión

Todas las muestras del estudio tenían resultados estándar de referencia clínica (realidad clínica) relacionados con un estado de aneuploidía y se basaron en la evaluación de un facultativo o asesor genético a partir de resultados de pruebas citogenéticas o exámenes físicos de recién nacidos. Las muestras eran válidas para la prueba si se registraban resultados clínicos de estado de aneuploidía fetal de los cromosomas 21, 18 y 13, o bien resultados del sexo del feto que incluyeran aneuploidía del cromosoma sexual (SCA) (monosomía X, XXX, XXY o XYY). Dentro del conjunto de la muestra, 3057 muestras contenían datos de referencia clínica de aneuploidías autosómicas y 3082 tenían datos de referencia clínica de SCA. Los resultados obtenidos del ensayo con la solución VeriSeq NIPT se compararon con los resultados estándar de referencia clínica.

Tabulación cruzada del resultado de la solución VeriSeq NIPT frente al resultado estándar de la referencia clínica para la trisomía del 21, trisomía del 18 y trisomía del 13

Se muestra una tabulación cruzada de los resultados de la solución VeriSeq NIPT (filas) frente al resultado estándar de la referencia clínica (columnas) en una serie de tablas de 2 x 2. No ha habido instancias de llamadas cruzadas entre aneuploidías autosómicas (p. ej., la solución VeriSeq NIPT no detectó trisomía del 18 en una muestra que contuviera un resultado afectado por trisomía del 21).

Tabla 8 Tabulación cruzada de resultados de trisomía del 21

Resultado de la solución VeriSeq NIPT	Referencia clínica Resultado estándar ^a		Total
	Afectado por trisomía del 21	No afectado por trisomía del 21	
Aneuploidía del cromosoma 21 detectada	90	1	91
Aneuploidía de cromosoma 21 no detectada	1	2965	2966
Total	91	2966	3057

^a La evaluación estándar de la referencia clínica se realizó con pruebas citogenéticas o mediante examen físico de recién nacidos.

Tabla 9 Tabulación cruzada de resultados de trisomía del 18

Resultado de la solución VeriSeq NIPT	Referencia clínica Resultado estándar ^a		Total
	Afectado por trisomía del 18	No afectado por trisomía del 18	
Aneuploidía del cromosoma 18 detectada	18	3	21
Aneuploidía de cromosoma 18 no detectada	2	3034	3036
Total	20	3037	3057

^a La evaluación estándar de la referencia clínica se realizó con pruebas citogenéticas o mediante examen físico de recién nacidos.

Tabla 10 Tabulación cruzada de resultados de trisomía del 13

Resultado de la solución VeriSeq NIPT	Referencia clínica Resultado estándar ^a		Total
	Afectado por trisomía del 13	No afectado por trisomía del 13	
Aneuploidía del cromosoma 13 detectada	8	4	12
Aneuploidía de cromosoma 13 no detectada	0	3045	3045
Total	8	3049	3057

^a La evaluación estándar de la referencia clínica se realizó con pruebas citogenéticas o mediante examen físico de recién nacidos.

Sensibilidad y especificidad de la solución VeriSeq NIPT para la detección de trisomías del 21, 18 y 13

Tabla 11 Sensibilidad y especificidad de la solución VeriSeq NIPT para la detección de trisomías del 21, 18 y 13

	Trisomía del 21	Trisomía del 18	Trisomía del 13
Sensibilidad	98,9 % (90/91)	90,0 % (18/20)	100,0 % (8/8)
IC del 95 % bilateral ^a	(94,0 %, 99,8 %)	(69,9 %, 97,2 %)	(67,6 %, 100,0 %)
Especificidad	>99,9 % (2965/2966)	99,9 % (3034/3037)	99,9 % (3045/3049)
IC del 95 % bilateral ^a	(99,8 %, 100,0 %)	(99,7 %, 100,0 %)	(99,7 %, 99,9 %)

^a IC según el método de puntuación de Wilson

Sensibilidad y especificidad de la solución VeriSeq NIPT en muestras con una estimación de la fracción fetal de $\leq 4\%$ y $> 4\%$

Las muestras de los análisis de rendimiento contienen fracciones fetales estimadas que oscilaban entre $< 1\%$ y 30% . La detección de aneuploidías fetales en el ADN sin células materno depende en parte de la fracción fetal de cada muestra. Por lo tanto, el rendimiento del ensayo puede ser inferior con fracciones fetales más bajas. Algunas metodologías de NIPT aplican un límite estricto de fracción fetal^{9, 10, 11, 12} del 4% , puesto que consideran que es la fracción mínima para la detección.^{9, 10, 11} Las siguiente tablas muestran el rendimiento de la solución VeriSeq NIPT con una fracción estimada igual o inferior al 4% y superior al 4% . Los resultados del estudio clínico demuestran que la solución VeriSeq NIPT puede detectar la aneuploidía fetal con fracciones fetales del 4% o inferiores.

Tabla 12 Sensibilidad y especificidad en muestras con una estimación de fracción fetal $\leq 4\%$

	Trisomía del 21	Trisomía del 18	Trisomía del 13
Sensibilidad	90,9 % (10/11)	80,0 % (4/5)	N/A (0/0)
IC del 95 % bilateral*	(62,3 %, 98,4 %)	(37,6 %, 96,4 %)	N/D
Especificidad	99,7 % (329/330)	100,0 % (336/336)	99,7 % (340/341)
IC del 95 % bilateral*	(98,3 %, 99,9 %)	(98,9 %, 100 %)	(98,4 %, 99,9 %)

* IC según el método de puntuación de Wilson

Tabla 13 Sensibilidad y especificidad en muestras con una estimación de fracción fetal $> 4\%$

	Trisomía del 21	Trisomía del 18	Trisomía del 13
Sensibilidad	100,0 % (80/80)	93,3 % (14/15)	100 % (8/8)
IC del 95 % bilateral*	(95,4 %, 100,0 %)	(70,2 %, 98,8 %)	(67,6 %, 100,0 %)
Especificidad	100,0 % (2636/2636)	99,9 % (2698/2701)	99,9 % (2705/2708)
IC del 95 % bilateral*	(99,9 %, 100,0 %)	(99,7 %, 100 %)	(99,7 %, 100 %)

* IC según el método de puntuación de Wilson

Detección de aneuploidías en cromosomas sexuales

Los resultados de cromosomas sexuales de la solución VeriSeq NIPT se compararon con los resultados estándar de la referencia clínica y se resumen en la tabla siguiente. Se calculó el porcentaje de concordancia de cada cromosoma sexual dentro de los resultados (clasificación) estándar de la referencia clínica. El porcentaje de concordancia se calculó como el número de muestras en las cuales la llamada de cromosomas sexuales de la solución VeriSeq NIPT coincidió con la clasificación estándar de la referencia clínica, dividida entre el número total de muestras con la misma clasificación estándar en la referencia clínica.

Tabla 14 Porcentaje de concordancia para la clasificación del sexo del feto

Resultados de la solución VeriSeq NIPT para la clasificación del sexo del feto	Resultado estándar de la referencia clínica								
	Resultado de examen físico de recién nacidos [Sin resultados citogenéticos]		Resultados citogenéticos						
	Mujer	Hombre	XX	XY	XO	XXX	XXY	XYY	Otro ^a
Porcentaje de concordantes	99,9 % (1371/1373)	99,9 % (1420/1422)	97,4 % (147/151)	100,0 % (118/118)	100,0 % (6/6)	80,0 % (4/5)	100,0 % (5/5)	100,0 % (1/1)	No aplicable

^a 1 muestra fue 49, clasificada como XXXXY por la solución VeriSeq NIPT como “Sex chromosome not reportable” (No se puede generar un informe de cromosoma sexual).

Valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la solución VeriSeq NIPT para la detección de trisomías del 21, 18 y 13 para un intervalo de prevalencias

El valor predictivo positivo (PPV) y el valor predictivo negativo (NPV) de la prueba proporcionan información relativa a su capacidad para notificar decisiones clínicas en función de la sensibilidad de la prueba, la especificidad y la probabilidad de prueba previa de que el feto esté afectado por una trisomía (prevalencia). Dado que PPV y NPV dependen de la prevalencia y que la prevalencia de estas aneuploidías puede variar entre las diferentes poblaciones, PPV y NPV se han calculado a partir de la sensibilidad y especificidad observadas en el estudio de precisión clínica de las trisomías del 21, 18 y 13. La tabla siguiente resume los PPV y NPV para un intervalo de valores de prevalencia factibles.

Tabla 15 Valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la solución VeriSeq NIPT para la detección de trisomías del 21, 18 y 13 para un intervalo de prevalencias

Aneuploidía	Prevalencia	PPV	NPV
Trisomía del 21	0,05 %	59,48 %	100,00 %
	0,10 %	74,60 %	100,00 %
	0,20 %	85,47 %	100,00 %
	0,50 %	93,65 %	99,99 %
	1,00 %	96,74 %	99,99 %
	1,50 %	97,81 %	99,98 %
	2,00 %	98,36 %	99,98 %
Trisomía del 18	0,03 %	21,48 %	100,00 %
	0,05 %	31,32 %	99,99 %
	0,10 %	47,71 %	99,99 %
	0,20 %	64,62 %	99,98 %
	0,30 %	73,28 %	99,97 %
	0,40 %	78,54 %	99,96 %
	0,50 %	82,08 %	99,95 %

Aneuploidía	Prevalencia	PPV	NPV
Trisomía del 13	0,01 %	7,09 %	100,00 %
	0,02 %	13,23 %	100,00 %
	0,05 %	27,61 %	100,00 %
	0,10 %	43,29 %	100,00 %
	0,20 %	60,44 %	100,00 %

NPV = valor predictivo negativo, PPV = valor predictivo positivo

Rendimiento en embarazos gemelares

Rendimiento clínico

Debido a su baja prevalencia, solo se dispuso de un pequeño número de muestras gemelares para el estudio clínico. En la prueba se incluyeron cuatro muestras gemelares con trisomía del 21 y en todas ellas se detectó trisomía del 21, así como ausencia de cualquier otra anomalía. No obstante, debido a que el número de muestras gemelares fue demasiado bajo, los niveles de confianza para la sensibilidad y la especificidad son demasiado amplios como para tener utilidad práctica. Por lo tanto, estas muestras no se han incluido en los cálculos de rendimiento generales detallados en la [Tabla 11](#).

Estimación del rendimiento para trisomía del 21, 18 y 13

Para estimar con mayor precisión el rendimiento de la solución VeriSeq NIPT en embarazos gemelares, se usaron modelos por ordenador (*in silico*) basados en observaciones provenientes de muestras clínicas, para simular poblaciones de embarazos gemelares coherentes con la población para el uso previsto. Se determinó la distribución de la fracción fetal a partir de aproximadamente 4500 muestras gemelares y se comparó con la distribución de aproximadamente 120 000 muestras de embarazos de un único embrión. Se determinó la distribución de la fracción fetal con estado de aneuploidía a partir de llamadas putativas en embarazos de un único embrión (1004 de trisomía del 21, 312 de trisomía del 18 y 197 de trisomía del 13). La combinación de las dos distribuciones permitió inferir la detección de aneuploidía en gemelos. Se simularon conjuntos de gemelos dicigóticos y monocigóticos, y se tomó una media ponderada que representara su prevalencia en la población para el uso previsto (2 dicigóticos: 1 monocigótico) para estimar la sensibilidad. Para estimar la especificidad se simularon conjuntos de gemelos no afectados.

La fracción de cada muestra simulada afectada por trisomía (es decir, la "fracción afectada") se calculó de forma distinta para cada categoría de muestra:

- En el caso de los gemelos monocigóticos, la fracción afectada de cada muestra se estableció como 1,0 porque, en esta situación la trisomía afecta a ambos gemelos.
- En el caso de los gemelos dicigóticos, se asumió que solo uno de los gemelos estaba afectado (es muy improbable que ambos gemelos dicigóticos se vean afectados). Los valores de la fracción afectada se simularon mediante la distribución conocida de los ratios de fracción fetal según se determina en muestras gemelares clínicas de distinto sexo. Se adoptó un enfoque conservador según el cual se asumió que el gemelo afectado siempre tenía la fracción fetal menor de los dos gemelos. Se aplicó un factor de corrección a las fracciones fetales con menor afectación media en embarazos con trisomía del 13 y del 18.
- En el caso de los gemelos no afectados, la fracción afectada de cada muestra se estableció en cero.

En el caso de los gemelos afectados por trisomía del 18 o del 13, la fracción fetal correspondiente a la fracción afectada de la muestra se redujo de forma proporcional a la reducción media de la fracción fetal observada en los datos clínicos en embarazos de un único embrión con trisomía del 18 o del 13 frente a embarazos de un único embrión euploide.

Tanto la fracción fetal general como la fracción afectada de cada muestra simulada se usaron luego para calcular una puntuación de aneuploidía mediante el algoritmo estándar de la solución VeriSeq NIPT. La sensibilidad se calculó determinando la frecuencia con la que las puntuaciones de aneuploidía para los gemelos afectados simulados era superior al correspondiente dintel de corte de aneuploidía. Por lo que respecta a la especificidad, se calculó mediante determinando la frecuencia con la que las puntuaciones de aneuploidía para

los gemelos no afectados simulados era inferior al correspondiente dintel de corte de aneuploidía. (Tabla 16). Se estimaron intervalos de confianza del 95 % según el número de muestras gemelares clínicas reales del conjunto de datos original, que se clasificaron como afectadas o no afectadas por la trisomía correspondiente.

Tabla 16 Estimaciones para trisomía del 21, 18 y 13 en población simulada de embarazos gemelares

	Trisomía del 21	Trisomía del 18	Trisomía del 13
Sensibilidad	97,1 %	95,8 %	95,1 %
IC del 95 % bilateral*	(87,9 %, 99,2 %)	(66,7 %, 99,5 %)	(67,7 %, 99,3 %)
Especificidad	99,9 %	>99,9 %	>99,9 %
IC del 95 % bilateral	(99,7 %, 99,9 %)	(99,9 %, >99,9 %)	(99,9 %, 99,9 %)

* IC según el método de puntuación de Wilson

Para la Tabla 16, las estimaciones puntuales y los intervalos de confianza estimados del 95 % para la sensibilidad y la especificidad de la solución VeriSeq NIPT para detectar la trisomía del 21, 18 y 13 se determinaron a partir de una población simulada de embarazos gemelares coherente con la población para el uso indicado. Los intervalos de confianza se estimaron según el número de muestras gemelares clínicas que superaron el CC clasificadas como afectadas o no afectadas por la trisomía correspondiente. El cálculo de sensibilidad asume que dos tercios de los embarazos gemelares afectados son dicigóticos con un gemelo afectado, mientras que un tercio de los embarazos gemelares afectados son monocigóticos con ambos gemelos afectados.

Las estimaciones que figuran en la Tabla 16 corresponden solo a embarazos gemelares. Debido a que su prevalencia es aún menor, los datos de embarazos múltiples de orden superior (trillizos o más) eran insuficientes para establecer modelos estadísticos adecuados a partir de los cuales poder estimar la precisión de la detección de la aneuploidía.

Rendimiento analítico

Precisión

Se han realizado dos estudios para evaluar la precisión de la solución VeriSeq NIPT:

- ▶ Un estudio de reproducibilidad interna descentralizado que constaba de nueve experimentos en tres centros con tres operadores y un único lote de reactivos.
- ▶ Un estudio de precisión en laboratorio que constaba de 12 experimentos en un mismo centro con dos operadores, dos sistemas de instrumentos y tres lotes de reactivos.

Se creó un grupo de trisomía del 21 con 5 % de fracción fetal mediante la combinación de ADN sin células extraído de plasma materno de mujeres embarazadas (con feto afectado por trisomía del 21) y ADN sin células extraído del plasma de mujeres no embarazadas. También se sometió a pruebas el ADN sin células agrupado extraído de plasma materno de embarazos de feto masculino (XY) y femenino (XX) no afectados. Se realizaron pruebas durante 10 días con un total de 21 experimentos en los dos estudios combinados.

De las 903 muestras incluidas en los análisis de los dos estudios, hubo una coincidencia del 100 %, con 84 de 84 para trisomía del 21, 399 de 399 para clasificación del sexo XX y 420 de 420 para clasificación del sexo XY. La distribución de muestras por centro fue la siguiente: centro 1: T21 (12), XX (57), XY (60); centro 2: T21 (12), XX (57), XY (60); centro 3: T21 (60), XX (285), XY (300).

Tabla 17 Reproducibilidad y precisión intralaboratorio (datos combinados)

Esperado	Intentos	Llamadas observadas				
		T21	T18	T13	XX	XY
T21 (XY)	84	84	0	0	0	84
XX	399	0	0	0	399	0
XY	420	0	0	0	0	420

Contaminación cruzada

La contaminación cruzada se evaluó en el flujo de trabajo de preparación de muestras de la solución VeriSeq NIPT. Los grupos de plasma de mujeres no embarazadas (XX) y varones adultos (XY) se probó en un patrón de damero con el formato de placas de 96 pocillos en 4 placas (n = 48 cada una para muestras de mujeres y hombres por placa; total de 192 muestras femeninas y 192 muestras masculinas). Ninguna de las muestras femeninas mostró una cobertura de cromosoma Y que fuera estadísticamente superior a la del contexto estimado, lo que indica una ausencia de contaminación cruzada de muestras masculinas dentro de la misma placa. No se observó contaminación cruzada detectable en la solución VeriSeq NIPT.

Sustancias que pueden interferir

Para evaluar el impacto de las sustancias que pueden interferir en la solución VeriSeq NIPT, el rendimiento del ensayo se evaluó en presencia de sustancias potencialmente interferentes.

Se introdujo albúmina, bilirrubina, hemoglobina y triglicéridos (endógenos) en los grupos de plasma materno de embarazos de feto femenino (XX) y se probaron con dos concentraciones por cada sustancia de prueba (n=16 para cada una). No se observaron interferencias en el rendimiento del ensayo.

Tabla 18 Sustancias potencialmente interferentes (endógenas)

Sustancia de prueba	Concentración de prueba baja (mg/ml)	Concentración de prueba alta (mg/ml)
Albúmina	35	50
Bilirrubina	0,01	0,15
Hemoglobina	100	200
Triglicéridos	1,5	5

El ADN genómico (ADNg) materno presente de manera natural en el plasma también puede interferir en el rendimiento del ensayo, ya que se puede extraer junto con el ADN sin células fetal. Se añadieron niveles de ADN genómico de 1,6, 3,3 y 4,9 ng por muestra (que se corresponden con la una desviación estándar de 1, 2 y 3 sobre la media prevista de concentración de ADN genómico tras 7 días de almacenamiento de sangre total¹³) al ADN sin células extraído del plasma materno de embarazos femeninos (feto XX) no afectados. A continuación, las muestras se probaron en la solución VeriSeq NIPT (n=16 para cada concentración). No se observó interferencia alguna en el rendimiento del ensayo en presencia de niveles elevados de ADN genómico.

Se probaron veinte medicamentos potencialmente interferentes (exógenos) que se toman o recetan habitualmente durante el embarazo conforme a EP7-A2 (Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline; 2.ª edición). Los 20 medicamentos potencialmente interferentes se combinaron en cuatro grupos, se introdujeron en el plasma materno de embarazos femeninos (feto XX) no afectados y se probaron en la solución VeriSeq NIPT (n=16 para cada grupo). No se observó interferencia en el rendimiento del ensayo en presencia estas sustancias exógenas.

Tabla 19 Sustancias potencialmente interferentes (exógenas)

Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Paracetamol	Difenhidramina	Salbutamol	Cetirizina
Acetilcisteína	Eritromicina	Bupropion	Dextrometorfano
Bisoprolol	Guaifenesina	Cafeína	Ácido L-ascórbico
Citalopram	Heparina	Sertralina	Metoprolol
Desloratadina	Lidocaína	Fluoruro de sodio	Nadolol

Solución de problemas

Solución de problemas de VeriSeq NIPT Solution

Tipo de fallo	Resultado posible	Interpretación	Acción recomendada	Comentarios
Entrada insuficiente de plasma	Error de CC de muestra	Volumen de plasma insuficiente	Vuelva a extraer la muestra	Según inspección visual de volumen de plasma.
Fallo de tubo de sangre	Sin separación de sangre en capas	Muestra no centrifugada	Asegúrese de que se inició el centrifugado y de que el tubo se centrifugó con la fuerza correcta. Vuelva a extraer la muestra.	
		Transporte o almacenamiento incorrectos de la muestra (lisis de la muestra)	Vuelva a extraer la muestra.	Las muestras congeladas no se separan.
Obstrucción en muestra/ Flujo lento	Contaminación del plasma	Las muestras individuales pueden obstruir la placa de unión si hay contaminación suficiente en la muestra de plasma.	Inspeccione la muestra; si el plasma que queda en el tubo es de color rojo o lechoso, cancele la muestra y solicite una nueva extracción. Si el aspecto de la muestra es normal, repita la prueba de la muestra.	
	Desbordamiento de la muestra	Inspección visual inadecuada de cada tubo para determinar la idoneidad de la muestra.	Invalide las muestras de los pocillos cercanos afectados por el desbordamiento.	Puede indicar unas condiciones de transporte o conservación incorrectas de la muestra antes del procesamiento. Las muestras no aptas deben descartarse del procesamiento.
	Fallo de hardware	Absorción inadecuada de la muestra	Repita la prueba de la muestra. Si el problema persiste en otros pocillos con otras muestras, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Illumina.	

Tipo de fallo	Resultado posible	Interpretación	Acción recomendada	Comentarios
Error de CC de análisis de muestra individual	Error de CC de secuenciación	Información genética insuficiente o error de transferencia durante la manipulación de la muestra	Compruebe la anotación de la muestra. Compruebe si ha habido un rendimiento similar en muestras anteriores con posiciones de placa relacionadas. Repita la prueba de la muestra.	Indica una entrada de muestras incorrecta de la muestra o un error de transferencia de ML STAR. El material genético insuficiente puede deberse a la escasez de ADN sin células en el plasma o a que el ADN con células provoque una dilución de la muestra excesiva para la secuenciación.
	Recuento bajo de FF (fetal fraction, fracción fetal) o NES (non-excluded sites, sitios no excluidos)	No se han generado datos suficientes para elaborar un informe preciso.	Repita la prueba del plasma.	
Error de CC de cuantificación	Error de ejecución de cuantificación: mediana del lote inferior al mínimo	Rendimiento del proceso insuficiente	Repita la cuantificación. Si la repetición también da error, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Illumina.	Si se superan los criterios de medición de curvas estándar, significa que hay un problema con la preparación de bibliotecas.
	Error de ejecución de la cuantificación	Error de curva estándar debido a una cuantificación incorrecta	Repita la cuantificación. Si la repetición también da error, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Illumina.	
Error de agrupación	Error al realizar la agrupación de la muestra	El análisis de agrupación no puede calcular los volúmenes correctos de los grupos.	Evalúe de nuevo la concentración del grupo objetivo y realice de nuevo el análisis de agrupamiento.	

Solución de problemas de VeriSeq NIPT Microlab STAR

Paso del proceso	Código de error	Cuadro de diálogo de error	Descripción	Solución
Creación de lotes	EM0044	El ID de lote introducido contiene caracteres no permitidos.	La solución VeriSeq NIPT solo admite números, letras, guiones y guiones bajos en los campos de datos.	Cambie el nombre del lote con un nombre que no contenga caracteres de texto especiales.
Creación de lotes	EM0051	El ID de lote supera los 26 caracteres.	La solución VeriSeq NIPT tiene un límite de 26 caracteres para los nombres de lote.	Cambie el nombre del lote con un nombre de menos de 26 caracteres.

Paso del proceso	Código de error	Cuadro de diálogo de error	Descripción	Solución
Creación de lotes	EM0076	No es posible conectar con el servidor VeriSeq Onsite.	El servidor VeriSeq Onsite no responde a las solicitudes de datos de Workflow Manager.	Compruebe lo siguiente: 1. ML STAR está conectado a la red. 2. El servidor VeriSeq Onsite está encendido. 3. ML STAR se puede conectar al servidor VeriSeq Onsite (mediante solicitud de ping). 4. Si los pasos anteriores no resuelven el problema, escriba un correo electrónico al servicio de asistencia técnica de Illumina.
Creación de lotes	EM0118	Este lote ha fallado y no se puede seguir procesando.	El lote especificado ha fallado y no se puede seguir procesando.	El registro del lote del servidor VeriSeq Onsite indica que el lote seleccionado ha fallado. No se puede seguir procesando. Cree otro lote con las muestras que desee.
Creación de lotes	N/D	Este lote ya ha completado el procesamiento. ¿Quiere volver a crear un grupo?	El lote indicado se ha procesado mediante agrupación. El único procesamiento permitido es volver a crear un grupo.	Para volver a crear un grupo, haga clic en Re-Pool (Volver a crear un grupo). O Anule este método y vuelva a comprobar el nombre de lote.
Aislamiento del plasma	WP0087	Se han cargado códigos de barras de muestras por duplicado.	En el sistema hay cargadas muestras con códigos de barras idénticos.	1. Siga las indicaciones de Workflow Manager para identificar las muestras duplicadas. 2. Quite las muestras y cambie la etiqueta o sustitúyalas. 3. Vuelva a cargar las muestras.
Aislamiento del plasma	EP0102	Las muestras especificadas en la hoja de muestras no se han cargado.	Hay muestras incluidas en la hoja de muestras que no se han incluido en los códigos de barras cargados.	1. Siga las indicaciones de Workflow Manager para identificar las muestras que faltan. 2. Añada al lote las muestras que faltan y vuelva a cargar las muestras. O Anule el método, modifique la hoja de muestras y cárguelo de nuevo.
Carga de placas	N/D	Error de máscara de código de barras Venus	Workflow Manager se encarga de aplicar la asociación correcta entre placa y lote mediante máscaras de código de barras Venus.	1. Compruebe la ubicación de las placas para confirmar que su disposición sea correcta. 2. Asegúrese de que la placa cargada es la correcta para el lote indicado.
Extracción del ADN sin células	WE0150	La presión de la cámara de vacío es demasiado baja.	Workflow Manager no continuará si el sensor de presión de la línea de vacío en reposo es < 400 torr.	1. Compruebe si la línea de vacío está retorcida u obstruida. 2. Abra las pinzas de desconexión del conducto de residuos, deje que se reduzca la presión y cierre de nuevo las pinzas. 3. Asegúrese de que el controlador de vacío y la bomba estén encendidos. 4. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Illumina.

Paso del proceso	Código de error	Cuadro de diálogo de error	Descripción	Solución
	WE0153	La presión de la cámara de vacío es demasiado alta.	Si la presión de la cámara de vacío es demasiado alta antes de iniciar el control de presión, puede que haya algún fallo en el sistema.	Revise si en la parte trasera del controlador están bien colocados todos los conductos de vacío y todas las conexiones.
	WE0996	Junta de vacío errónea	El sistema no logra crear una junta de vacío en la placa de unión.	<p>NOTA: No seleccione OK (Aceptar) hasta que resuelva completamente el error.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que la placa de unión se ha lavado en el distribuidor de vacío. Póngase un guante y presione la placa de unión con fuerza. 2. Haga clic en OK (Aceptar) para continuar con la extracción del ADN sin células. 3. Si se muestra este mensaje de error más de tres veces en un experimento, póngase en contacto por correo electrónico con el servicio de asistencia técnica de Illumina.
	WM0219	Si el vacío está activado, detenga la bomba manualmente.	El vacío puede permanecer activo tras anular un método durante la extracción.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el controlador de vacío, pulse el botón de encendido para apagar el vacío. 2. Espere 10 segundos y pulse de nuevo el botón de encendido para apagar el vacío.
	EE0477	Se ha producido un error durante el desplazamiento de una placa. (Error de iSWAP)	Si se detecta un error de iSWAP (se ha caído la placa, no se ha podido recoger, etc.), el sistema indica al usuario que termine de mover la placa manualmente.	<p>Asegúrese de que la placa se puede recuperar (no se ha derramado material).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si no se puede, cancele el experimento. - Si se puede, siga las instrucciones mostradas para realizar la transferencia de la placa manualmente.
	EE0519	Los códigos de barras escaneados no coinciden con el código de barras de unión registrado.	La placa de unión cargada no coincide con el código de barras de la placa quitada.	Asegúrese de que la placa que está en proceso de carga coincide con el código de barras registrado (consulte el registro de rastreo para comprobar el código de barras esperado).

Paso del proceso	Código de error	Cuadro de diálogo de error	Descripción	Solución
API	EA0372	No es posible conectar con el servidor de datos.	El servidor VeriSeq Onsite no responde a las solicitudes de datos de Workflow Manager.	Compruebe lo siguiente: 1. ML STAR está conectado a la red. 2. ML STAR se puede conectar al servidor VeriSeq Onsite (mediante solicitud de ping). 3. El servidor VeriSeq Onsite está encendido.
	EA0774	Error de conexión No se ha podido validar la conexión con el servidor de la API.	El servidor VeriSeq Onsite ha dejado de responder a las solicitudes de datos de Workflow Manager.	Compruebe lo siguiente: 1. ML STAR está conectado a la red. 2. ML STAR se puede conectar al servidor VeriSeq Onsite (mediante solicitud de ping). 3. El servidor VeriSeq Onsite está encendido.
	EA0780	403: solicitud no válida La transacción actual no es válida.	Los datos enviados no cumplen la lógica del flujo de trabajo del sistema.	Consulte los detalles del error para obtener más información. Este error suele deberse a un exceso de caracteres o al uso de caracteres no permitidos.

Referencias

- 1 Nagaoka, S.; Hassold, T.; Hunt, P. Human aneuploidy: mechanisms and new insights into an age-old problem. *Nat Rev Genet.* 2012;13(7): 493-504. DOI: 10.1038/nrg3245.
- 2 Gardner, R. J.; Sutherland, G. R.; Schaffer, L. G. *Chromosome Abnormalities and Genetic Counseling.* 4.^a edición. Nueva York, EE. UU.: Oxford University Press; 2012.
- 3 Akolekar, R.; Beta, J.; Picciarelli, G.; Ogilvie, C.; D'Antonio, F. Procedure-related risk of miscarriage following amniocentesis and chorionic villus sampling: a systematic review and meta-analysis. *Ultrasound Obstet Gynecol.* Enero de 2015; 45(1): 16-26. DOI: 10.1002/uog.14636.
- 4 ACOG Practice Bulletin n.º 163.
- 5 Gil, M. M.; Quezada, M. S.; Revello, R., Akolekar, R. y Nicolaides, K. H. (2015), Analysis of cell-free DNA in maternal blood in screening for fetal aneuploidies: updated meta-analysis. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 45: 249-266. DOI: 10.1002/uog.14791.
- 6 Benn, P.; Borrell, A.; Chiu, R. W.; et al. "Position statement from the Chromosome Abnormality Screening Committee on behalf of the Board of the International Society for Prenatal Diagnosis". *Prenat Diagn* 35 (2015): 725-34.
- 7 2. ACOG Committee on Genetics. "Committee Opinion No. 640: Cell-Free DNA Screening For Fetal Aneuploidy". *Obstet Gynecol* 126 (2015): e31-7.
- 8 Bianchi, D.; Parker, R.; Wentworth, J.; et al. DNA Sequencing Versus Standard Prenatal Aneuploidy Screening. *N Engl J Med.* 2014;370(9): 799-808. DOI: 10.1056/nejmoa1311037.
- 9 McCullough, R. M.; Almasri, E. A.; Guan, X.; et al. Non-invasive prenatal chromosomal aneuploidy testing - clinical experience: 100 000 clinical samples. *PLoS One.* 2014; 9(10): e109173.
- 10 Norton, M. E.; Brar, H.; Weiss, J.; et al. Non-Invasive Chromosomal Evaluation (NICE) Study: results of a multicenter prospective cohort study for detection of fetal trisomy 21 and trisomy 18. *J Obstet Gynecol.* 2012; 207:137.e1-8.
- 11 Norton, M. E.; Jacobsson, B.; Swamy, G. K.; et al. Cell-free DNA analysis for noninvasive examination of trisomy. *New Engl J Med.* 2015; 372(17): 1589-97.
- 12 Ryan, A.; Hunkapiller, N.; Banjevic, M.; et al. Validation of an enhanced version of a single-nucleotide polymorphism-based noninvasive prenatal test for detection of fetal aneuploidies. *Fetal Diagn Ther.* 2016; DOI: 10.1159/000442931.
- 13 Norton, S.; Lechner, J.; Williams, T.; Fernando, M.; et al. A Stabilizing Reagent Prevents Cell-free DNA Contamination by Cellular DNA in Plasma During Blood Sample Storage and Shipping as Determined by Digital PCR. *Clin. Biochem.* 2013; 46: 1561-1565. DOI: 10.1016/j.clinbiochem.2013.06.002.

Patentes y marcas comerciales

Este documento y su contenido son propiedad exclusiva de Illumina, Inc. y sus afiliados ("Illumina") y están previstos solamente para el uso contractual de sus clientes en conexión con el uso de los productos descritos en él y no para ningún otro fin. Este documento y su contenido no se utilizarán ni distribuirán con ningún otro fin ni tampoco se comunicarán, divulgarán ni reproducirán en ninguna otra forma sin el consentimiento previo por escrito de Illumina. Illumina no transfiere mediante este documento ninguna licencia bajo sus derechos de patente, marca comercial, copyright ni derechos de autor o similares derechos de terceros.

Para asegurar el uso correcto y seguro de los productos descritos en este documento, el personal cualificado y adecuadamente capacitado debe seguir las instrucciones incluidas en este de manera rigurosa y expresa. Se debe leer y entender completamente todo el contenido de este documento antes de usar estos productos.

SI NO SE LEE COMPLETAMENTE EL DOCUMENTO Y NO SE SIGUEN EXPRESAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DESCRITAS EN ESTE, PODRÍAN PRODUCIRSE DAÑOS EN EL PRODUCTO, LESIONES PERSONALES, INCLUIDOS LOS USUARIOS U OTRAS PERSONAS Y DAÑOS EN OTROS BIENES Y QUEDARÁ ANULADA TODA GARANTÍA APLICABLE AL PRODUCTO.

ILLUMINA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DEL USO INCORRECTO DE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS (INCLUIDAS LAS PIEZAS O EL SOFTWARE).


© 2021 Illumina, Inc. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas comerciales pertenecen a Illumina, Inc. o a sus respectivos propietarios. Para obtener información específica sobre las marcas comerciales, consulte www.illumina.com/company/legal.html.

Información de contacto



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California 92122 (EE. UU.)
+ 1 800 809 ILMN (4566)
+ 1 858 202 4566 (fuera de Norteamérica)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com

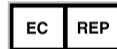

Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
The Netherlands



Patrocinador australiano
Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Australia

Etiquetado de productos

Para obtener una información detallada sobre los símbolos que aparecen en las etiquetas o en el embalaje del producto, consulte la leyenda que se ofrece en support.illumina.com en la ficha *Documentation and Literature* (Documentación y publicaciones) del kit.